

fig. 1. seleccione la vena a puncionar. Coloque el bebé en posición conveniente y confortable. Prepare el sitio de punción. Coloque campos estériles y aplique torniquete

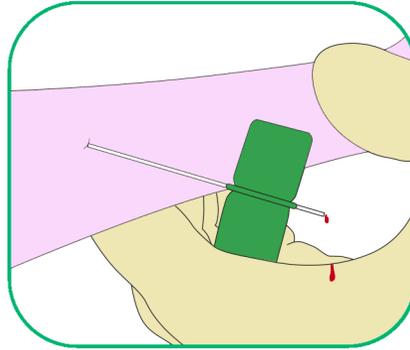


fig. 2. realice la punción venosa con la mariposa 19G suministrada para obtener un reflujo de sangre

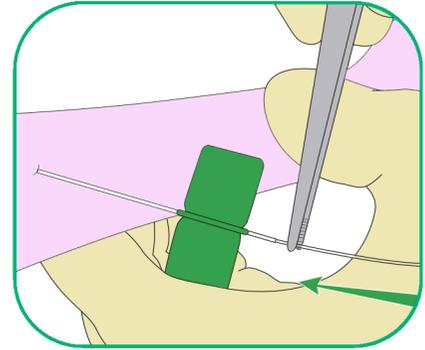


fig. 3. pase el catéter a través de la aguja usando pinzas sin dientes. Insertar, lo suficiente, el catéter como para soltar el torniquete y avanzar lo poco a poco

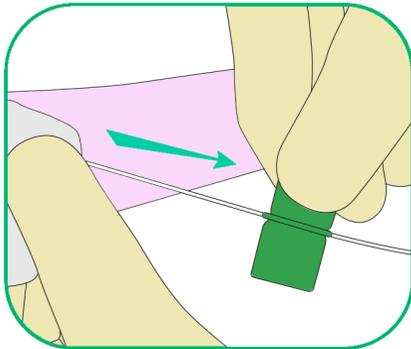


fig. 4. aplique una ligera presión con un dedo más allá de la aguja y con cuidado retire el introductor de la vena

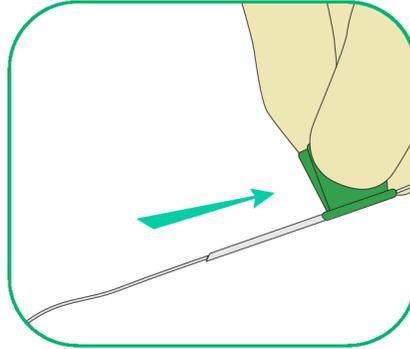


fig. 5. mantenga el catéter recto y con cuidado retire la aguja

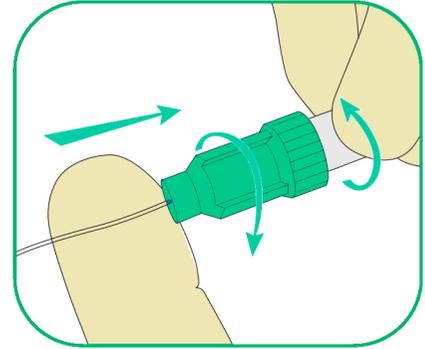


fig. 6. afloje el conector Easy-lock para poder retirar el catéter. **No separe totalmente el conector.** Colocar la punta próxima del catéter hasta que la marca negra desaparezca totalmente dentro del conector azul

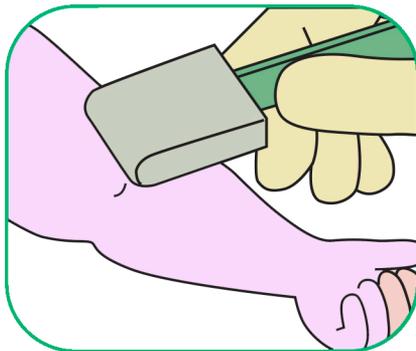


fig. 1. seleccione la vena, prepare, limpie la piel, coloque campos dejando libre sólo el sitio de punción. Aplique torniquete

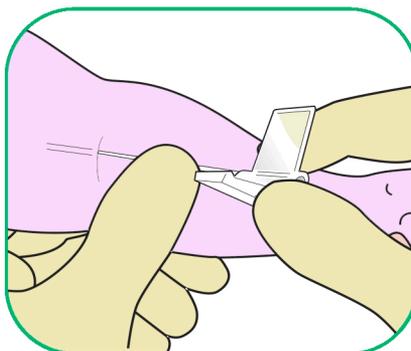


fig. 2. realice la punción de la vena con la aguja pelable. Avance la aguja hasta el reflujo sanguíneo

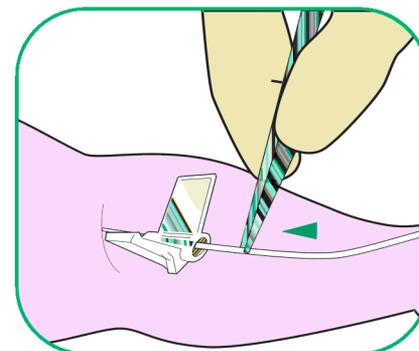


fig. 3. pase el catéter a través de la aguja usando pinzas sin dientes. Insertar, lo suficiente, el catéter como para soltar el torniquete y avanzar lo poco a poco

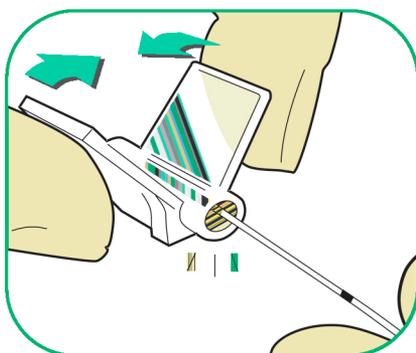


fig. 4. asegure el catéter aplicando una ligera presión con un dedo más allá de la aguja y retire la aguja lentamente. Apriete las aletas firmemente para iniciar la rotura de la aguja

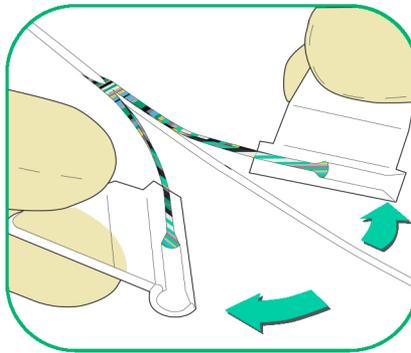


fig. 5. rompa la aguja suavemente hasta que quede unida solamente la punta. No es necesario separar totalmente las dos mitades de la aguja

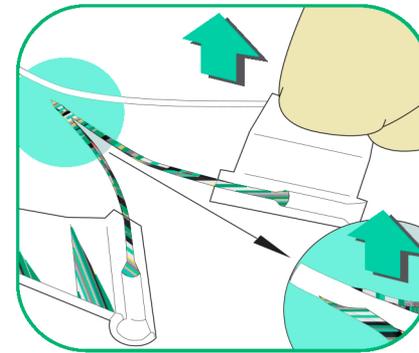


fig. 6. retire el catéter cuidadosamente fuera de la aguja

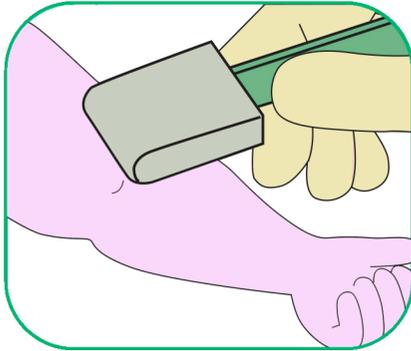


fig. 1. seleccione la vena, prepare, limpie la piel, coloque campos dejando libre sólo el sitio de punción. Aplique torniquete

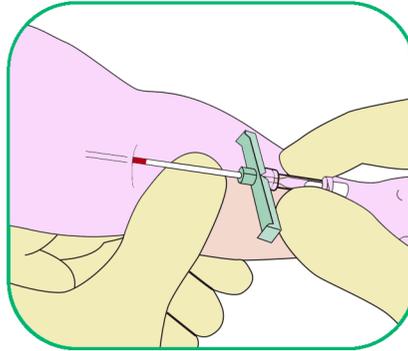


fig. 2. realice la punción de la vena con la cánula pelable Microflash provista, con el ángulo de 15 a 30°. Avance la cánula hasta que la punción se confirme por el reflujo de la sangre

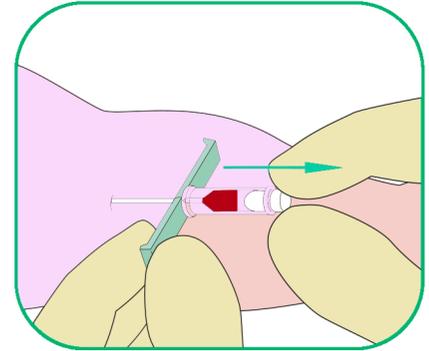


fig. 3. baje el Microflash unos grados y avance sólo la cánula plástica. Retire el torniquete

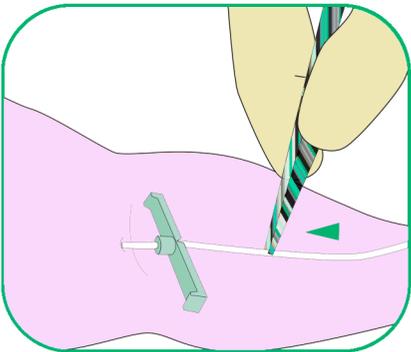


fig. 4. pase el catéter a través de la cánula usando pinzas sin dientes. Insertar, lo suficiente, el catéter como para soltar el torniquete y avanzarlo poco a poco

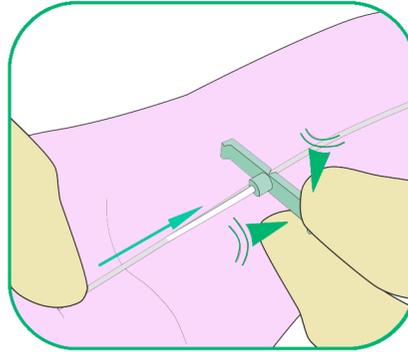


fig. 5. asegure el catéter aplicando con un dedo una suave presión más allá de la cánula y retire la misma lentamente

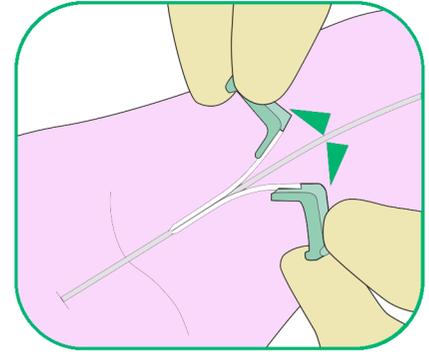


fig. 6. pele lentamente la cánula, tirando de sus aletas, con cuidado de no mover el catéter. Finalmente avance el catéter a la posición deseada

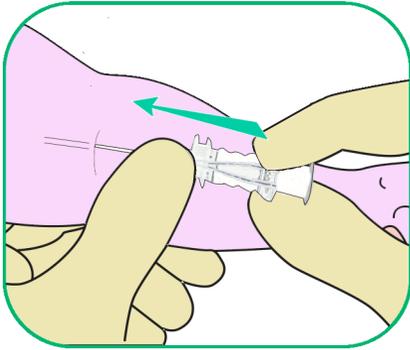


fig. 1. punción con la aguja

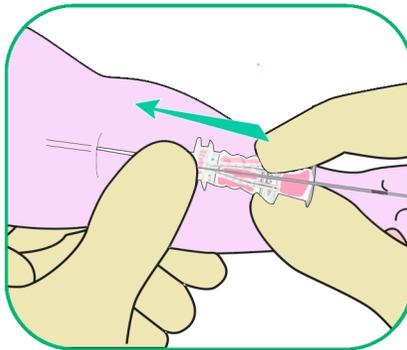


fig. 2. inserción de la guía

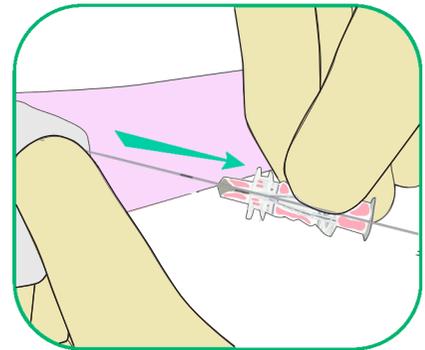


fig. 3. retirada de la aguja

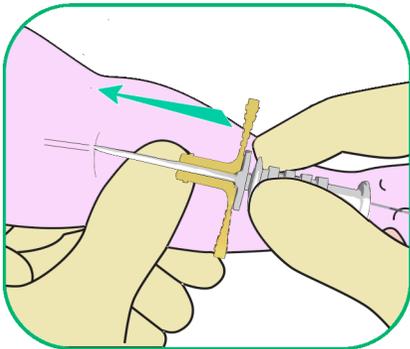


fig. 4. inserción de la cánula

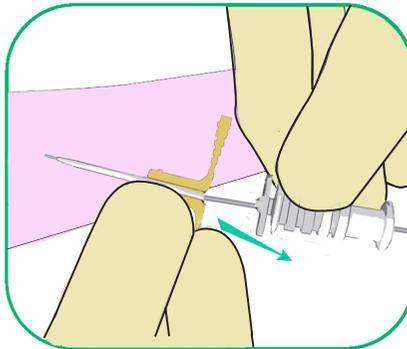


fig. 5. retirada de la guía y del dilatador

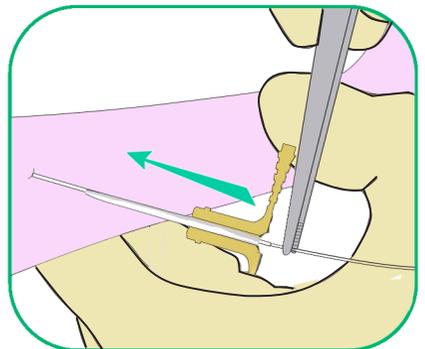


fig. 6. inserción del catéter