


BUJÍA BOUSSIGNAC  
Para intubaciones difíciles

Con la Bujía de Boussignac es posible **oxigenar**

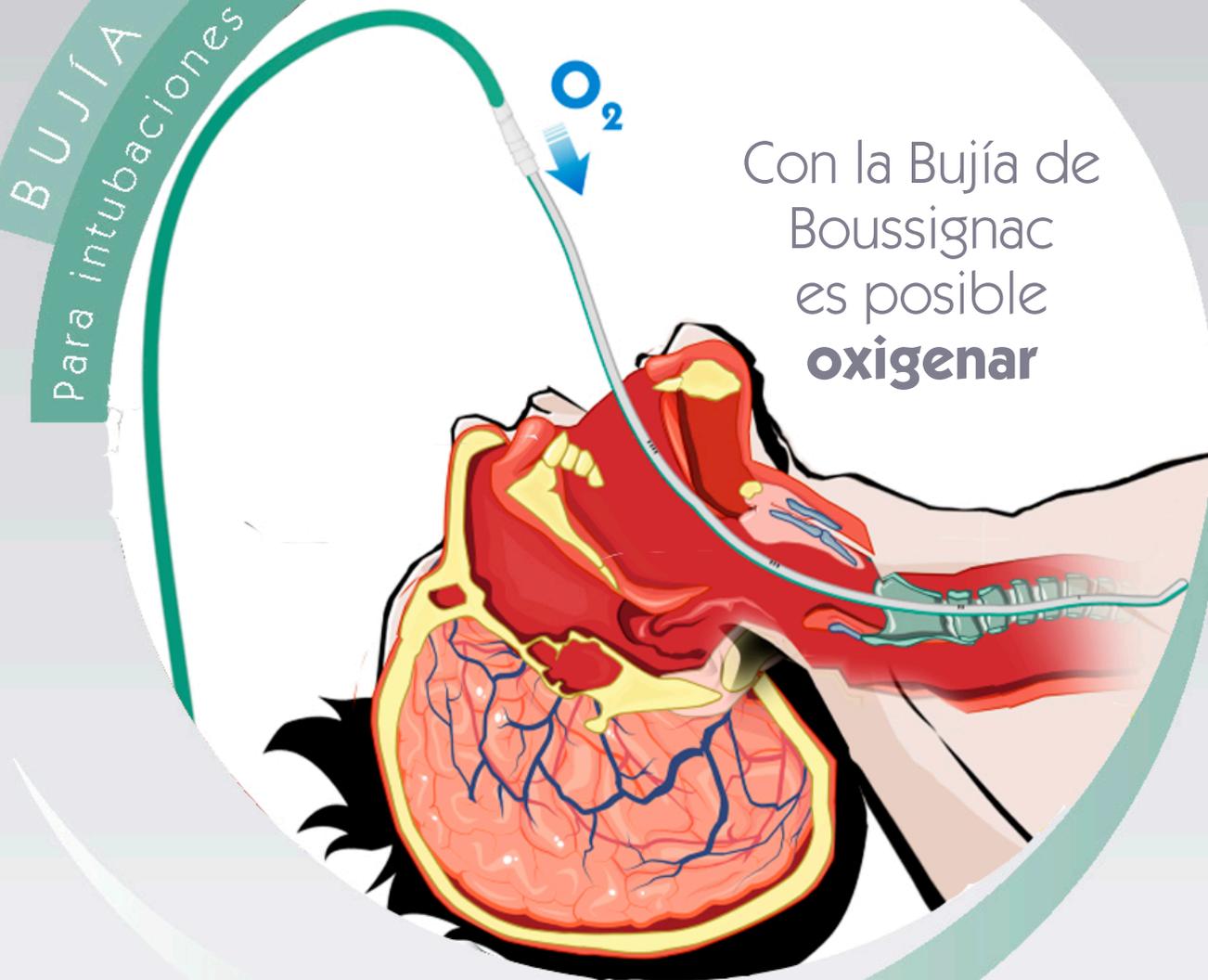


**VYGON**  
Value Life

## ¿Cuándo utilizar la Bujía de Boussignac?


Structures Visualised	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4
<b>Pre-anestesia</b> Pharyngees (mallanpati)				
<b>Laringoscopia</b> Laryngees (Cormack & Lehane)				

## Composición de la Bujía de Boussignac

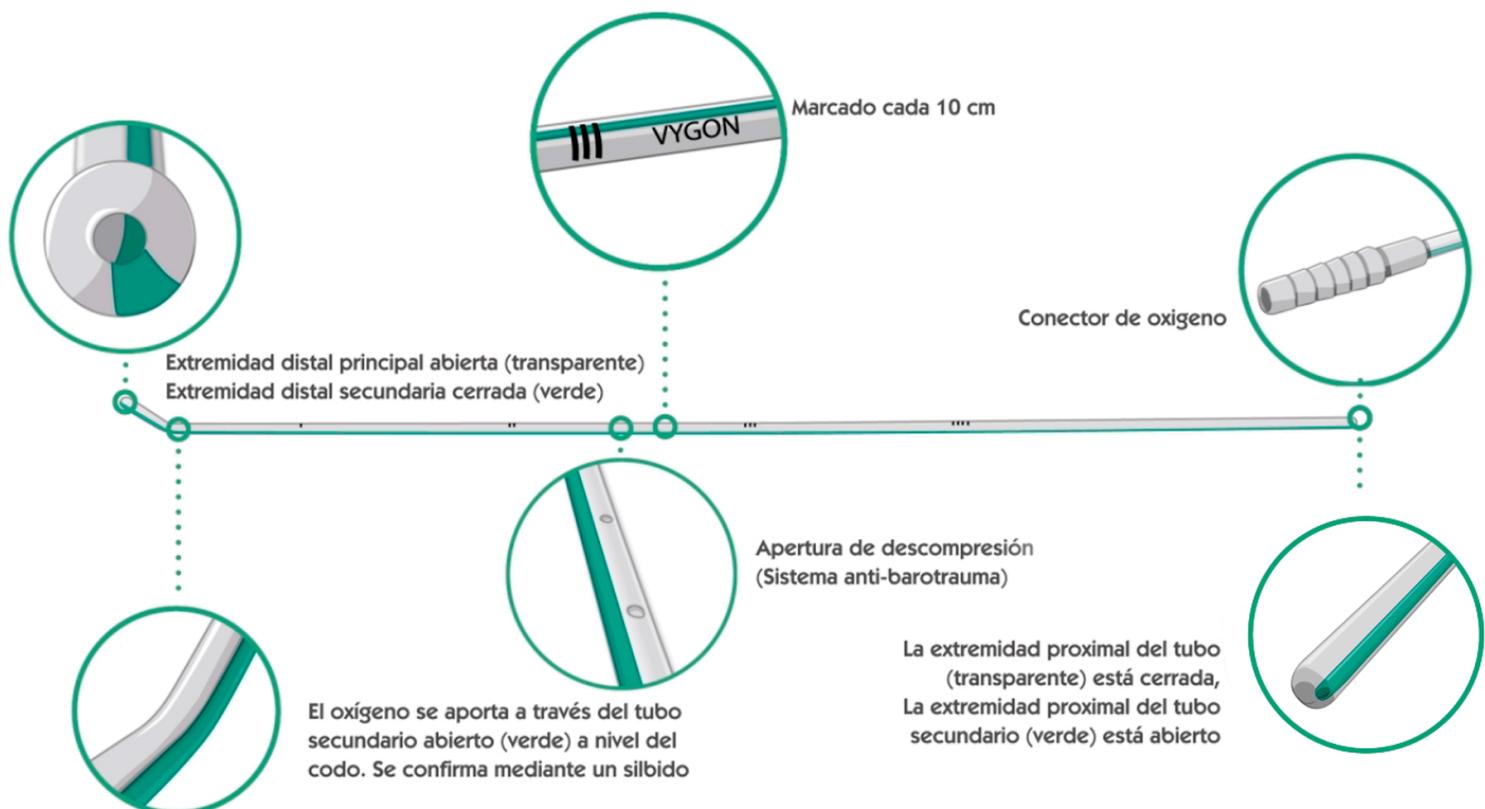

## ● Modo de empleo


1. Realizar laringoscopia

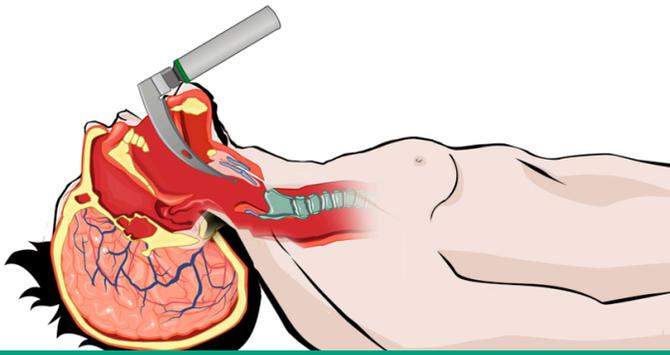


2. Asegurarse de que la Bujía se desliza entre las cuerdas vocales (si es necesario, con O<sub>2</sub>)





3. Retirar el laringoscopio y retirar el conector de O<sub>2</sub> si es necesario

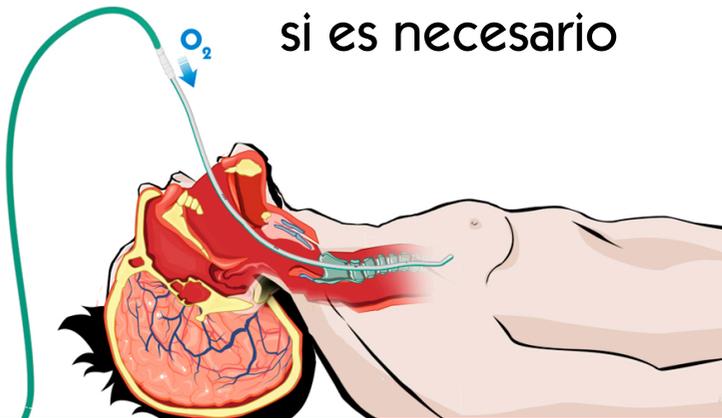

4. Introducir la sonda endotraqueal sobre la Bujía de Boussignac y deslizarla a posición

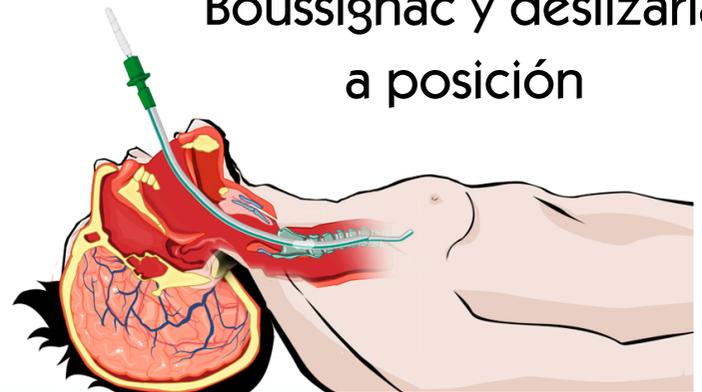

5. Retirar la Bujía de Boussignac e hinchar el balón de la sonda endotraqueal

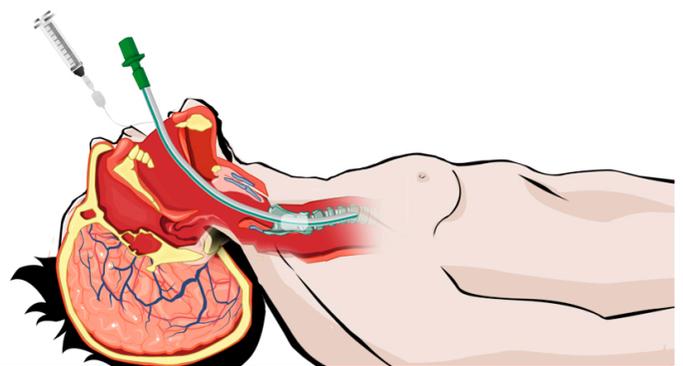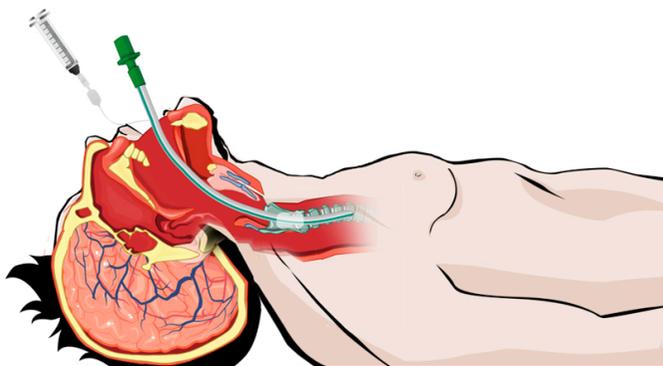

## ● Referencias



Referencias	Longitud cm	Tamaño mm	Código de color
557601	70	6 a 11	verde (adulto)
557602	60	4 a 5,5	azul (pediátrico)
557603	50	2,5 a 3,5	rosa (neonato)

**Para más información, diríjase a: [comercial@vygon.es](mailto:comercial@vygon.es)**

Las especificaciones mostradas en este folleto son sólo para información  
Y no son, en ningún caso, de naturaleza contractual.

---

Vygon Ciudad de Sevilla, 34. Pol. Ind. Fuente del Jarro 46988 PATERNA  
VALENCIA  
Recepción: 902.876.288 Servicio contables: 961.344.364  
Servicios de marketing: 961.344.745 Servicios comerciales: 902.876.288  
Fax.: 902.876.289 [www.vygon.es](http://www.vygon.es)



[www.vygon.com](http://www.vygon.com)