


MÉTODO PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE INSERCIÓN DEL CVC EN VENA YUGULAR

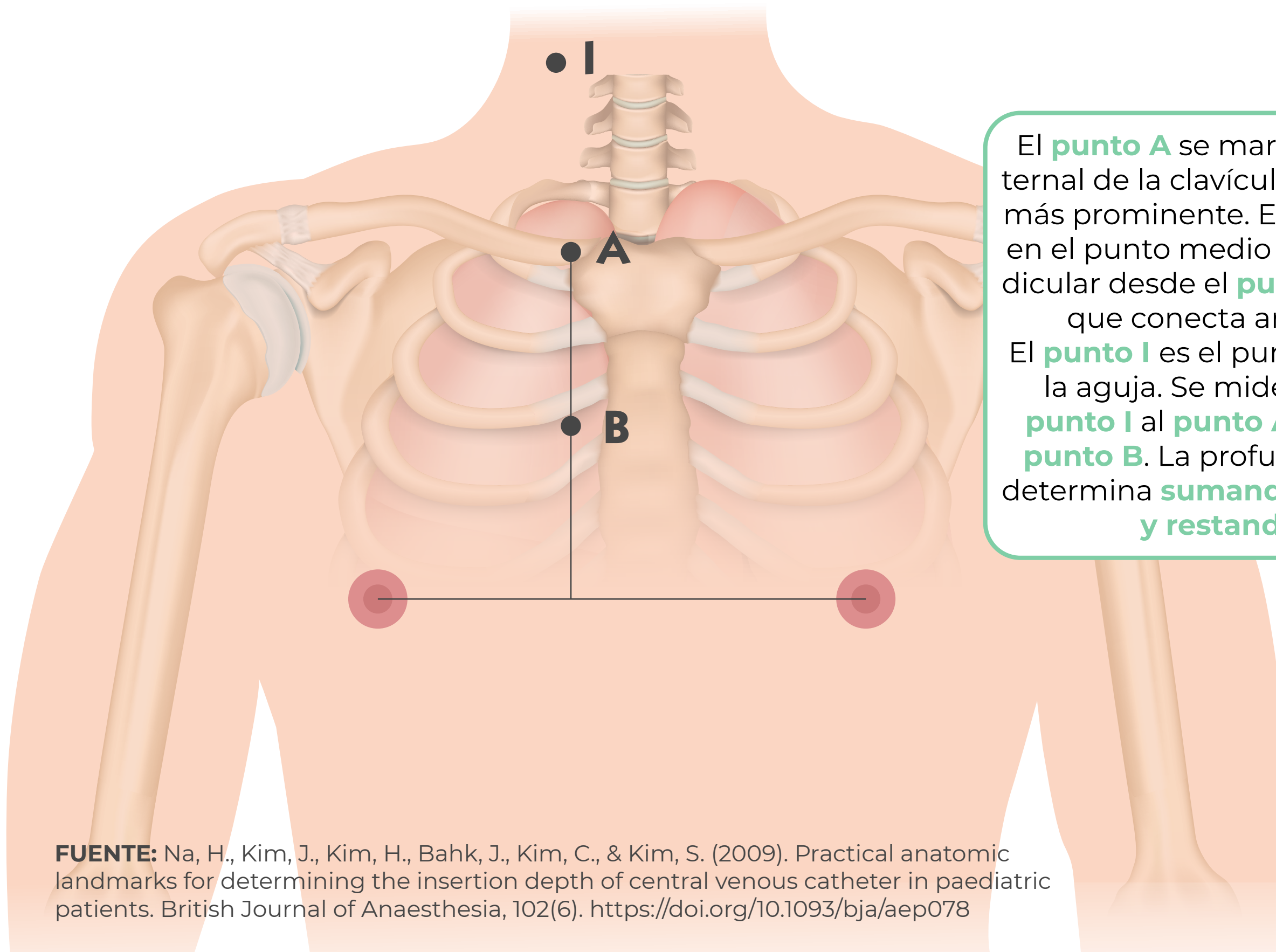

El **punto A** se marca en la cabeza esternal de la clavícula derecha, el punto más prominente. El **punto B** se marca en el punto medio de la línea perpendicular desde el **punto A** hasta la línea que conecta ambos pezones. El **punto I** es el punto de inserción de la aguja. Se mide la distancia del **punto I** al **punto A** y del **punto A** al **punto B**. La profundidad de CVC se determina **sumando las dos medidas y restando 0,5 cm.**

FUENTE: Na, H., Kim, J., Kim, H., Bahk, J., Kim, C., & Kim, S. (2009). Practical anatomic landmarks for determining the insertion depth of central venous catheter in paediatric patients. *British Journal of Anaesthesia*, 102(6). <https://doi.org/10.1093/bja/aep078>