


RECOMENDACIONES EN EL USO DE **ADHESIVOS** DE **FIJACIÓN** DE CATÉTERES **EN NEONATOS**

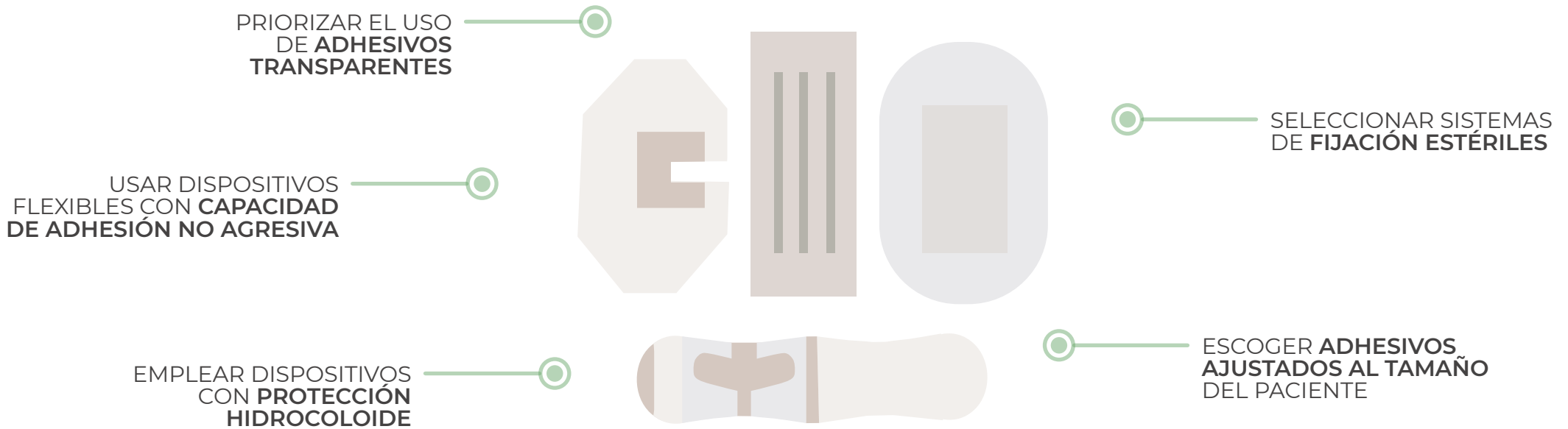

PROTOCOLO DE COLOCACIÓN

- 1 **Evitar fijar** el catéter en zonas con **lesiones previas**
- 2 **Limpiar y secar** la zona donde se **fijará el catéter**
- 3 **No estirar ni tensar el adhesivo** en su colocación
- 4 Realizar una **suave presión** durante la fijación para **activar la fórmula adhesiva**
- 5 **Verificar** que **no quedan arrugas** entre el adhesivo y la piel

PROTOCOLO DE RETIRADA

- 1 **Despegar** los **bordes del adhesivo** de fijación para facilitar la retirada
- 2 **Estabilizar la piel** y **retirar en paralelo** la cinta adhesiva
- 3 **Humeder el adhesivo** con una gasa/algodón impregnada en agua. **Nunca utilizar solventes** con este fin
- 3 **No retirar** la fijación **hasta que disminuya su propiedad adhesiva** (24 horas)