



APLICACIÓN **INCORRECTA** DE LA CÁNULA DE EXTRACCIÓN EN LA CARGA DE JERINGA




Value Life

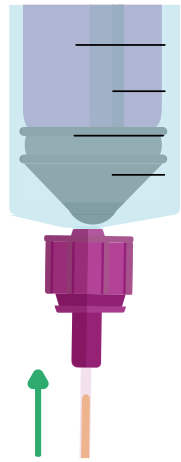


- 1** Conectar la jeringa y cargar con la fórmula

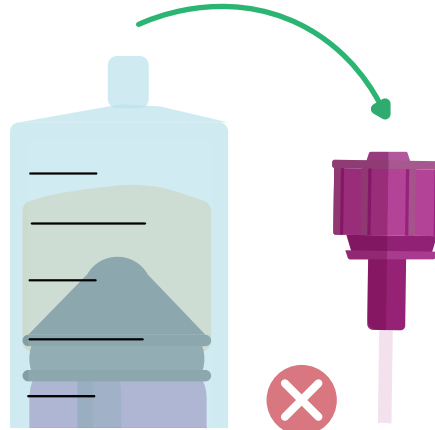

- 2** Desconectar la cánula antes de eliminar las burbujas o aire de la jeringa

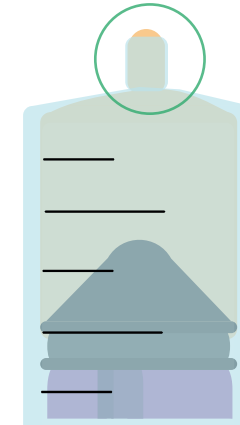

- 3** Observar como la fórmula ocupa el cono de la jeringa

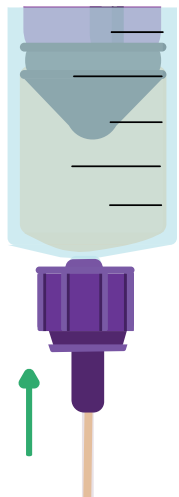

- 4** Conectar la jeringa a la sonda de administración



- 5** Observar como el volumen muerto del cono se desplaza por la sonda causando una **sobredosis** en la administración de hasta **0.150 ml.**