




TÉCNICA DE FIJACIÓN SUBCUTÁNEA

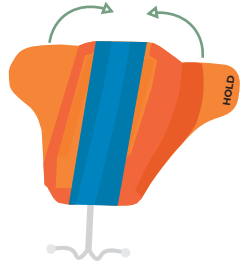


- 1** Doblar la base del dispositivo de fijación subcutáneo hasta que las solapas se unan

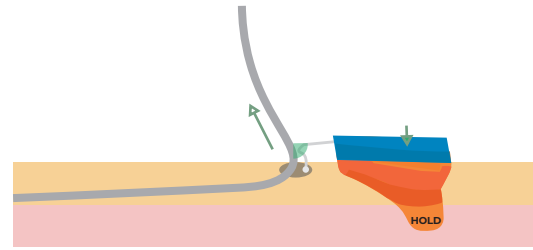


- 2** Con el ancla en 90° respecto al catéter, insertar los pies debajo del mismo en el punto de inserción

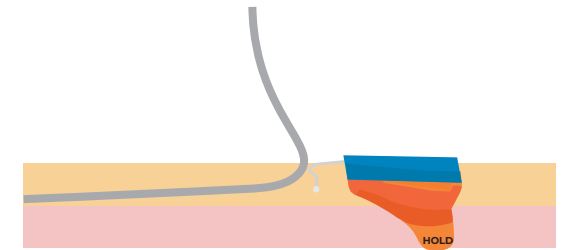


- 3** Introducir el dispositivo de fijación hasta que el segmento curvo no sea visible

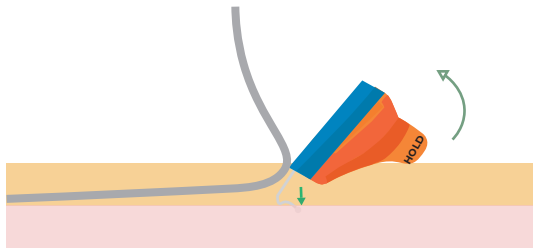


- 4** Alinear el dispositivo y avanzar los pies del ancla unos mm hasta el tejido subcutáneo

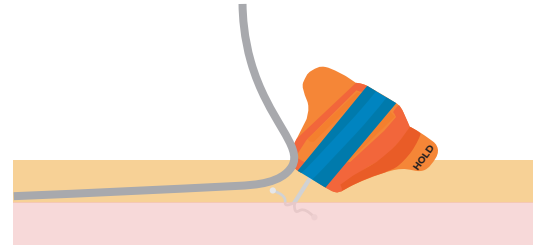


- 5** Soltar la base para permitir su apertura

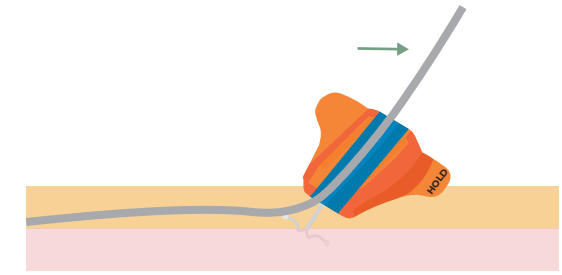


- 6** Asegurar que el catéter y el dispositivo de fijación están limpios e insertar el catéter en la ranura de la base

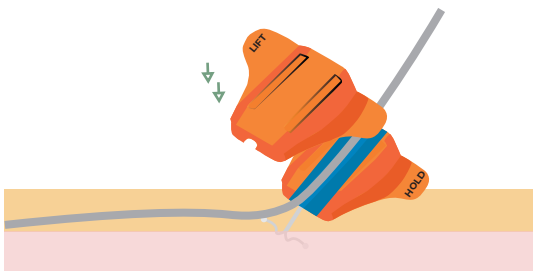

- 7** Colocar la tapa de la base presionando firmemente en el centro y en los bordes

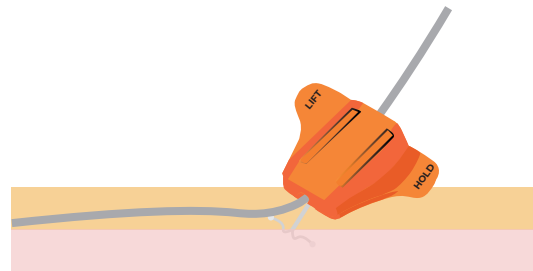

- 8** Comprobar que la tapa esta perfectamente colocada

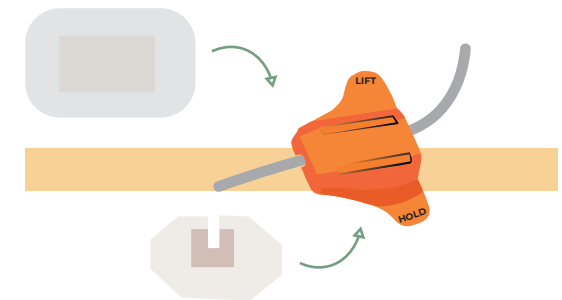

- 9** Colocar el dispositivo en una posición plana sobre la piel. Incorporar un apósito protector bajo de este y un apósito transparente para asegurar la fijación