




# RETIRADA DE SECURACATH


## MÉTODO DE PLEGADO

SE PUEDE HACER CON O SIN EL CATÉTER COLOCADO

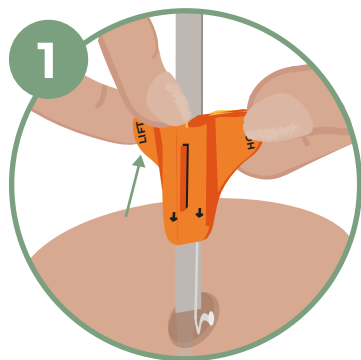


**1** Sujetar la pestaña **HOLD** con el pulgar y el dedo índice para estabilizar el dispositivo y los pies de sujeción bajo la piel.

Haga palanca hacia arriba en el borde de la lengüeta **LIFT** con la punta del dedo índice de la otra mano y el pulgar colocado en el centro para liberar la tapa de la base.

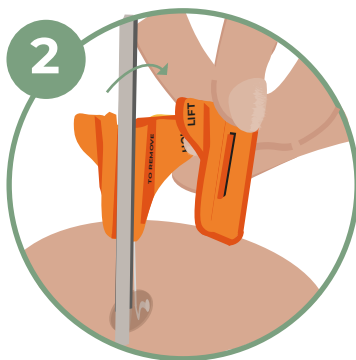


**2** Quitar la parte superior de la base.

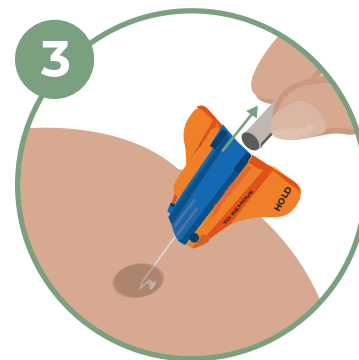

**3** Retirar el catéter - no utilizar una fuerza excesiva.

**Mantener la presión** en el sitio de punción para lograr la hemostasia.

Si el lugar de inserción está costroso o duro, **aplicar una gasa estéril con solución salina** durante unos minutos. El tejido se ablandará y la extracción será más fácil.

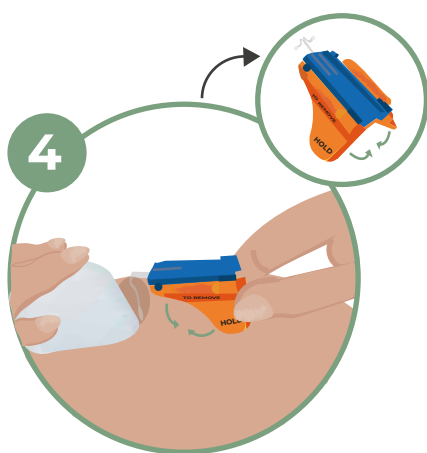

**4** Aplicar una presión firme en el lugar de inserción para mantener el tejido inmóvil.

**Doblar las alas** hacia abajo para juntar los anclas debajo de la piel.



**5** Mantener la base plegada horizontalmente a la piel.

Tirar del dispositivo con un **movimiento rápido y seguro** hacia arriba para retirarlo siguiendo la forma de las anclas.