



VYGON

Value Life


MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO **SECURACATH**

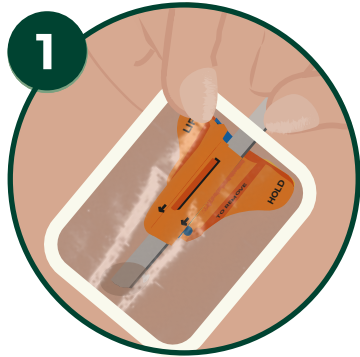

1
Retirar el vendaje según el protocolo del hospital; utilizar un removedor de adhesivo si es necesario. **No retirar la parte superior** del SecurAcath **durante cambios de apósito.**

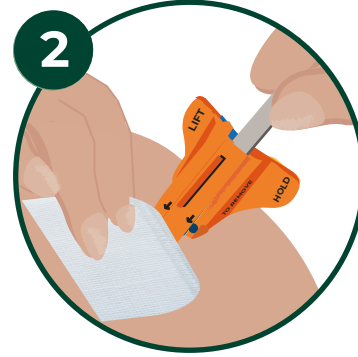

2
Si hay fluidos o sangre en el la zona desde inserción o en el SecurAcath, utilizar una **gasa con solución salina** para limpiar y asegurarse de que el dispositivo esté limpio y seco.

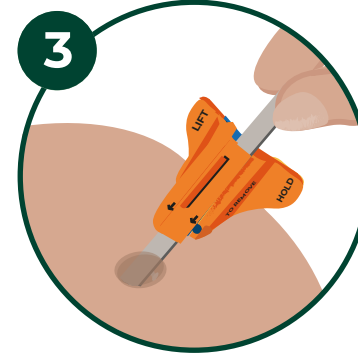

3
Levantar suavemente el catéter y el SecurAcath para limpiar alrededor del sitio de inserción del catéter. **No girar SecurAcath de su orientación original.**



4
Mientras esté levantado, utilizar un agente antiséptico para **limpiar a 360°**:
- Sitio de inserción/zona colindante
- El SecurAcath
- El catéter hasta su pabellón

Dejar que la piel y el dispositivo se sequen completamente.

INFORMACIÓN DE UTILIDAD

Dolor en lugar de inserción

Evaluar y resolverlo. Dolor punzante o transitorio: considerar cambiar el apósito, ya que puede estar apretado y causar presión sobre el SecurAcath.

Retirada de apósito

Evaluar la posición para asegurarse de que SecurAcath no se ha movido. Si no estás seguro, levantar y dejar que vuelva a su forma natural antes de volver a colocar el apósito.

Discos antimicrobianos y los adhesivos tisulares

Colocarlos levantando el SecurAcath y deslizando la hendidura alrededor del catéter y sus patas.