




VYGON
Value Life


RETIRADA DE SECURACATH

MÉTODO DE CORTE EL CATÉTER SE TIENE QUE RETIRAR PREVIAMENTE

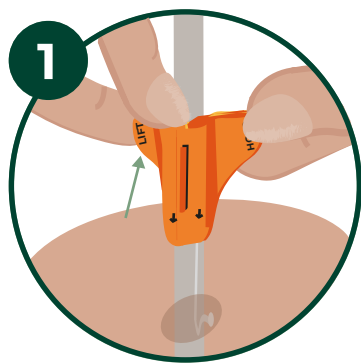


1 Sujetar la pestaña **HOLD** con el pulgar y el dedo índice para estabilizar el dispositivo y los pies de sujeción bajo la piel.

Haga palanca hacia arriba en el borde de la lengüeta **LIFT** con la punta del dedo índice de la otra mano y el pulgar colocado en el centro para liberar la tapa de la base.

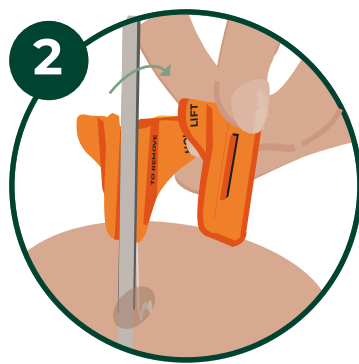

2 Quitar la parte superior de la base.

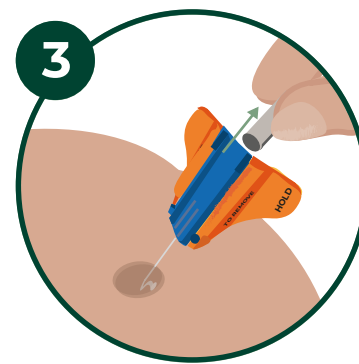

3 Retirar el catéter - no utilizar una fuerza excesiva.

Mantener la presión en el sitio de punción para lograr la hemostasia.

Si el lugar de inserción está costroso o duro, aplicar una gasa estéril con solución salina durante unos minutos. El tejido se ablandará y la extracción será más fácil.



4 Utilizar unas tijeras de punta roma para cortar toda la base por la mitad a lo largo de la ranura azul.



5 Aplicar una presión firme en el lugar de inserción con una mano.

Las anclas flexibles de sujeción tienen forma de "L" y se extienden 5 mm a cada lado del sitio de inserción.



6 Girar el borde azul y utilizar un movimiento rápido y seguro hacia arriba para retirar cada ancla por separado siguiendo la forma su forma.