




TÉCNICA CON INTRODUCIDOR DE MARIPOSA

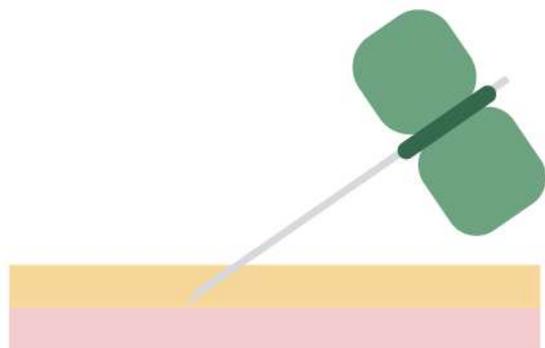


1 Punción con la aguja

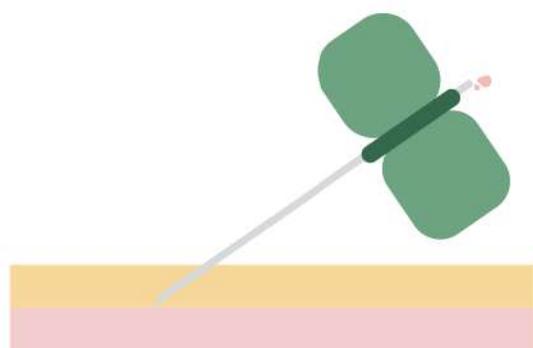


2 Avanzar la aguja hasta observar
reflujo sanguíneo

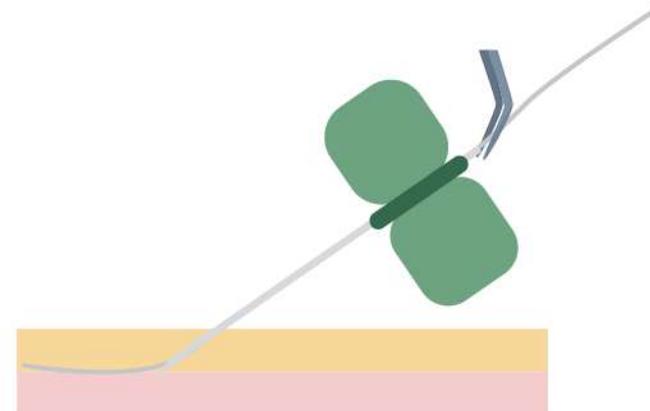

3 Enhebrar el catéter a través de la
aguja con unas pinzas sin dientes

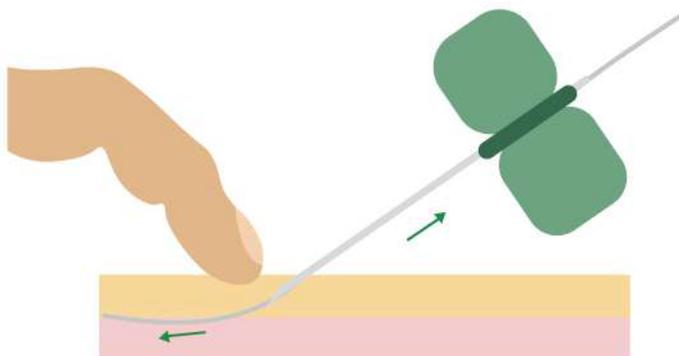

4 Retirar la cánula mientras se fija el
catéter con una suave presión

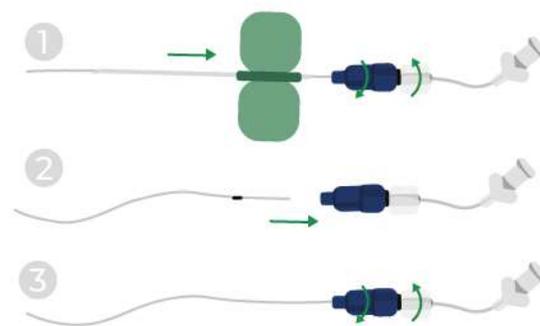

5

- Abrir el conector para permitir la
retira de la aguja de mariposa
- Introducir el catéter en el
conector hasta la marca negra
- Fijar de nuevo el conector



6 Retirar la aguja mariposa y dejar
colocado el catéter