

Administración de surfactante con técnica LISA. Paso a paso

1

Visualizar la glotis

Visualizar la glotis para garantizar que la sonda se colocará correctamente. Si el paciente presenta una leve desaturación, no es necesario interrumpir el procedimiento, a menos que esta sea muy grave.

2

Introducir el catéter en la tráquea

El catéter se introduce cuidadosamente en la tráquea del paciente. El operador debe sujetarlo adecuadamente para evitar que se desplace durante la intervención.

3

Administrar el surfactante

Conectar la jeringa al catéter y administrar el surfactante de forma lenta durante un período de 1 a 3 minutos. Aunque la respuesta no sea inmediata, la saturación de oxígeno aumentará significativamente una vez que el surfactante llegue a los pulmones.

4

Limpiar el catéter

Desconectar la jeringa y cargarla con aire. A continuación, conectar de nuevo la jeringa al catéter introduciendo el aire para limpiar cualquier residuo de surfactante que haya podido quedar dentro del dispositivo.

5

Retirar el catéter

Retirar el catéter con cuidado, asegurándose de que no haya obstrucciones en la vía respiratoria y de que el paciente respire con normalidad.

