

Inserción catéter PICC de corte proximal




1 Anestesia local



2 Punción ecoguiada



3 Introducir guía

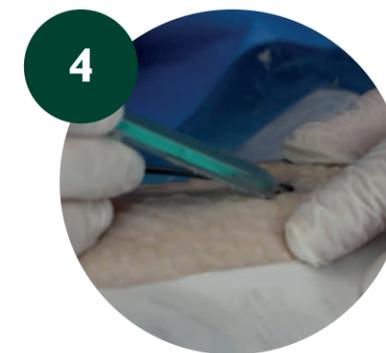


4 Pequeña incisión



5 Introducir microintrodutor y retirar dilatador y guía




6 Progresión PICC

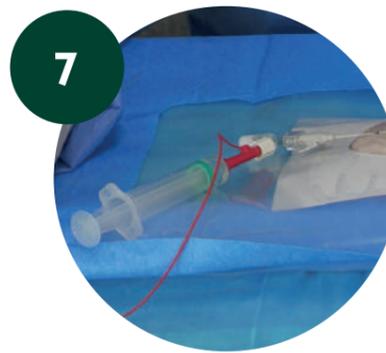

7 Comprobar punta del catéter con ECG-IC



8 Pinzado y corte

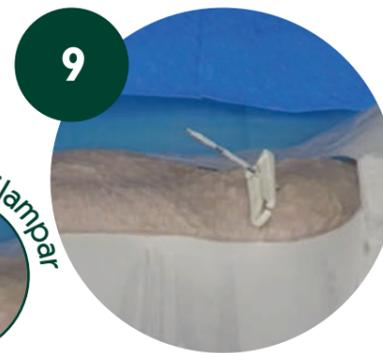


9 Corte proximal



10 Conexión proximal



11 Desclampar

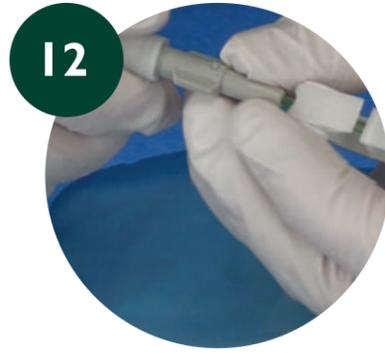

12 Retirar adaptador



13 PICC proximal



14 Colocar la parte inferior del SAS




15 Colocar parte superior del SAS sobre inferior y cerrar SAS




16 PICC proximal - SAS



17 Comprobar punta del catéter con ECG-IC

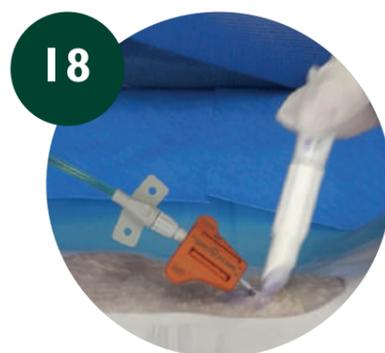

18 Cianocrilato

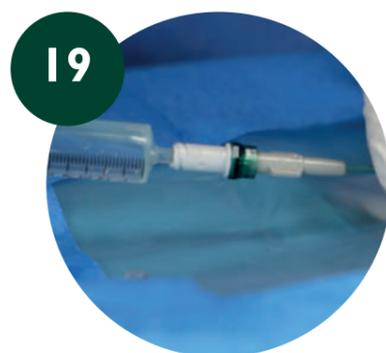

19 Lavado y sellado



20 Tapón protector



21 Colocación PICC



22 Estabilización del PICC y protección del Exit Site