


DISPOSITIVO RESPIRATORIO

DURACIÓN RECOMENDADA

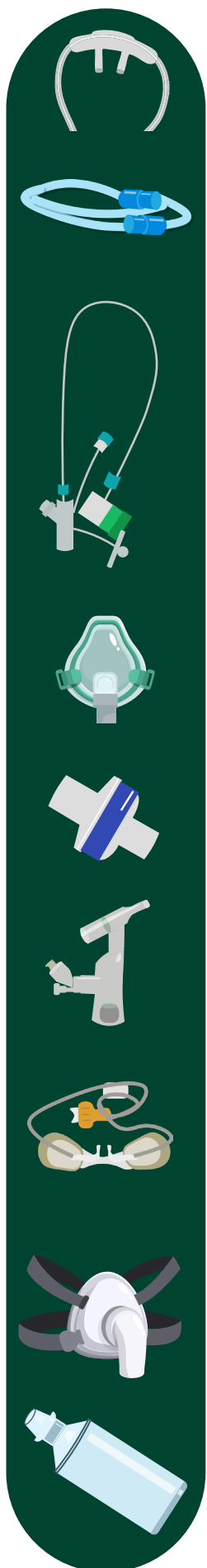

Gafas nasales (GN)	c/3-7 días	
Circuito respirador, tubuladuras	Sin humidificación activa: hasta 15 días Con humidificación activa: hasta 7 días No debe cambiarse de forma rutinaria	
Sistema de aspiración de secrecciones	Cerrado	c/72h (máximo c/7días) No debe cambiarse de forma rutinaria. Retirar ante signos de contaminación/ disfunción. Evaluación diaria.
	Abierto	Sonda Nélaton de 1 solo uso + guante estéril de 1 solo uso. Retirar alargaderas y recolector para cada paciente y/o ante signos de contaminación/ disfunción. Evaluación diaria.
Mascarilla O2	No debe cambiarse de forma rutinaria. Si nebulización c/24h , si es reutilizable limpiar/desinfectar	
Filtro humidificación pasiva	c/24h	
Sistema de nebulización	c/7 días Después de cada uso limpiar con agua estéril o destilada y dejar secar	
Gafas nasales alto flujo	c/24h	
Interfaces CPAP/BIPAP	c/24h cambio o limpieza profunda ResMed: 1-3 días Philips Respironics: 24-48h Fisher & Paykel: 24h	
Cámara espaciadora para inhaladores	Desmontar y limpiar con agua y jabón c/7días (mín 1vez/mes) Recambio c/12 meses .	

*En caso de rotura, suciedad o presencia de signos de infección, se procederá al cambio inmediato del dispositivo, independientemente del tiempo de uso recomendado.