

¿CÓMO PURGAR

UN PICC-PORT?

1

Aspirar y confirmar el retorno de sangre

Al insertar la aguja no coring / Huber, siempre aspirar primero y confirmar el retorno de sangre. Esto asegurará que el dispositivo esté permeable. Después de aspirar, se debe limpiar el dispositivo.

2

Limpiar a intervalos regulares

Y después de cada administración de medicación.

3

Usar al menos 10 ml de suero salino fisiológico al 0,9% para limpiar un DAV

4

Usar una jeringa de 10 ml o mayor

Para limpiar un DAV

5

Limpiar el DAV accedido para infusiones intermitentes inmediatamente antes y después de cada infusión

6

Nunca limpiar en caso de

Encontrar resistencia