

DISPOSITIVO DE INFLADO RÁPIDO

Partes y funciones

Manómetro.
Con dial y aguja
que muestra las
atmósferas

Sistema de
bloqueo
automático

Jeringa
transparente



Mango
hergonómico



- Llenar el dispositivo (medio de contraste + solución salina) tirando del mango y apretando los botones de seguridad.
- Tras retirar las burbujas, soltar los botones para bloquear el dispositivo.
- Conectar el dispositivo al catéter e inflar el balón girando el mango en sentido de las agujas del reloj.
- Para desinflar el balón, girar el mango en sentido contrario o, para un desinflado más rápido, pulsar y soltar los botones, hasta que el manómetro indique 0.