PROCEDIMIENTO SIMPLE









Infiltración con anestesia y suero del bolsillo



Inserción del catéter



Comprobación de la correcta localización de la punta



Disección e introducción del dedo haciendo bolsillo



Cortar el catéter 2cm más largo



Empalmar la cámara e introducir en el bolsillo



Comprobar permeabilidad y reflujo. Sutura intradérmica. Cianoacrilato.

PROCEDIMIENTO CON TUNELIZACIÓN



Inserción



Comprobación de la correcta localización de la punta



Infiltración anestesia y suero en el túnel



Paso del tunelizador y el catéter



Infiltración anestesia y suero del bolsillo



Disección e introducción del dedo haciendo bolsillo



Cortar el catéter 2cm más largo



Empalmar la cámara e introducir en el bolsillo



Comprobar permeabilidad y reflujo. Sutura intradérmica. Cianoacrilato.