


Cómo colocar NeoHelp®: paso a paso

1


- Desplegar NeoHelp por completo.
- Colocar en la **mesa de reanimación**, bajo la lámpara de calor (si procede).
- Abrir completamente **el velcro y la capucha** para facilitar la **recepción del bebé**.

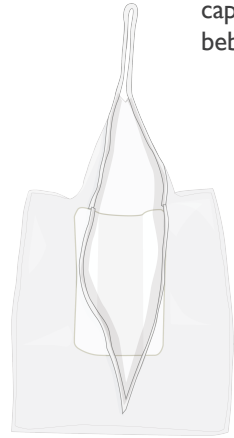

II


2

- **No secar** al bebé tras el nacimiento
- Colocar al bebé en NeoHelp inmediatamente y **alinearlo** con los bordes superiores de la bolsa
- **Cerrar el velcro** en toda su longitud.

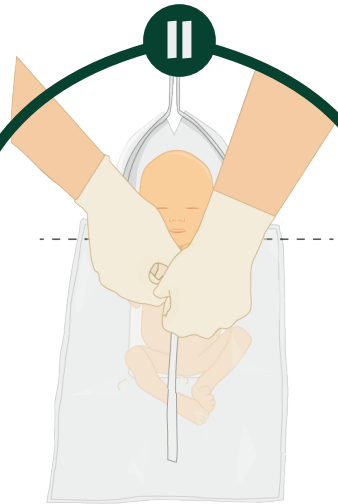

3

- Ajustar la capucha a la cabeza del bebé. **No tapar las vías respiratorias** debido al riesgo de asfixia.

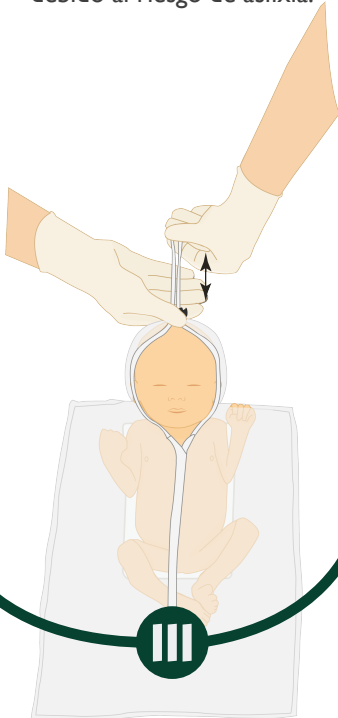

III

IV

4

- El bebé deberá permanecer envuelto hasta que **se establezca la temperatura y hasta un máximo de 24h**.
- Monitorizar la temperatura del bebé de manera continua o consecutiva.



5

- Pleno **acceso y visibilidad** al cuerpo del bebé.
- Diseñado para una **fácil colocación** de los equipos de seguimiento y **catéteres umbilicales**.

