

# Inserción catéter PICC de corte proximal Tunelización



1 Anestesia local



2 Punción ecoguiada



3 Introducir guía



4 Pequeña incisión



5 Comprobar punta del catéter con ECG-IC



6 Introducir microintroducir y retirar guía



7 Progresión PICC




8 Crear habón



9 Realizar una incisión en la zona de salida del catéter



10 Introducir el tunelizador

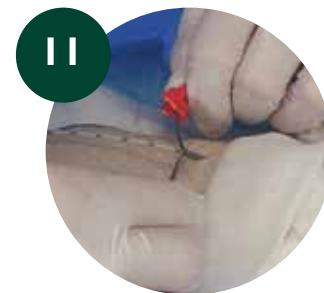

11 Retirar introductor



12 Retirar guía interna y la parte externa desmontable del PICC proximal



13 Conectar PICC al tunelizador y sacar el catéter por el Exite Site



14 Volver a comprobar con ECG-IC y rectificar medida interna si es necesario



15 Pinzado y corte



16 Corte proximal



17 Conexión proximal



18 Desclampar



19 Conectar la parte externa desmontable del PICC proximal



20 Colocar la parte inferior del SAS



21 Colocar parte superior del SAS sobre la inferior y cerrar el SAS



22 PICC proximal - SAS



23 Volver a comprobar con ECG-IC y rectificar medida interna si es necesario



24 Cianoacrilato



25 Lavado y sellado



26 Tapón protector



27 Colocación PICC



28 Estabilización del PICC y protección del Exite Site