

# Insertión catéter PICC de corte proximal

**VYCON**  
Value Life



Anestesia local



Punción ecoguiada



Introducir guía




Pequeña incisión



Introducir  
microintroducer y  
retirar dilatador y guía



Progresión PICC

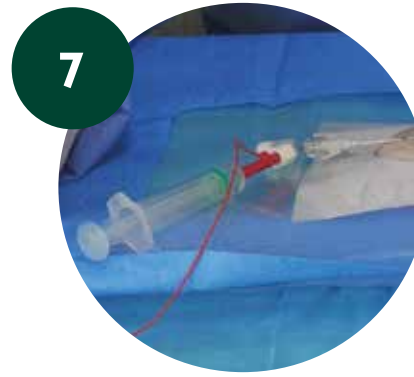


Comprobar punta del  
catéter con ECG-IC



Pinzado y corte



Corte proximal

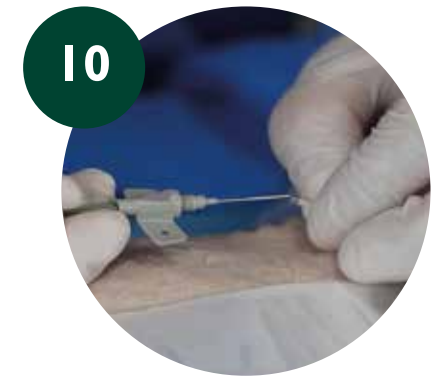

Conexión proximal



Desclampar



Retirar adaptador



PICC proximal



Colocar la parte  
inferior del SAS



Colocar parte superior  
del SAS sobre inferior y  
cerrar SAS



PICC proximal - SAS



Comprobar punta del  
catéter con ECG-IC



Cianoacrilato



Lavado y sellado



Tapón protector



Colocación PICC



Estabilización del  
PICC y protección  
del Exit Site