

ACCESO VASCULAR

CATÉTER VENOSO
CENTRAL DE INSERCIÓN
PERIFÉRICA

maxflo expert

325 psi
Hasta 7 ml/s



Value Life

Vygon se esfuerza por ofrecer a médicos y pacientes productos de acceso vascular de la máxima calidad.


La gama Vygon PICC está pensada para su uso en pacientes que requieren terapia intravenosa a medio y largo plazo. Puede utilizarse para administrar líquidos, antibióticos, quimioterapia, nutrición parenteral, fármacos para el tratamiento del dolor y para la toma de muestras de sangre.

La gama Vygon PICC está diseñada con soluciones inteligentes integradas para acercarse al objetivo de cero complicaciones.

Máxima longevidad

Nuestros PICCs Vygon están fabricados con poliuretano bioestable de larga duración: ofrecen tiempos de permanencia prolongados para adaptarse a todos los requisitos terapéuticos. El poliuretano bioestable de larga duración proporciona una buena estabilidad mecánica y bioquímica durante todo el tratamiento.

maxflo expert puede utilizarse siempre que esté indicado un PICC, incluida la administración a alta presión. Para permitir que los radiólogos obtengan la mejor calidad de imagen de TC, maxflo está diseñado para soportar la inyección de medio de contraste de alta viscosidad **de 5 ml/s a 7 ml/s, con una presión del inyector de TC de hasta 325 psi** (22.4bar) .

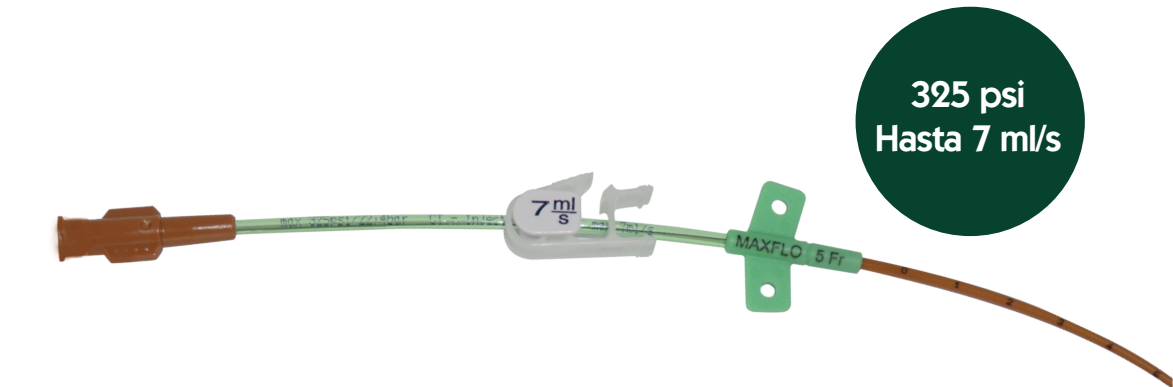

CT compatible maxflo expert:

- Permite caudales de hasta 6 ml/s y **hace posible el examen por TAC de un amplísimo número de órganos¹.**
- Es compatible con **325 psi que es el límite de presión de las nuevas generaciones de inyektres de medios de contraste para alto flujo (CT)** (preajustable a 325 psi)²

Parámetros	Angiografía	CT	IRM
Caudales	0-40 ml/s	0,1-7 ml/s	0,1-7 ml/s
Límite de presión de los inyektres	1200 psi	325 psi	325 psi

Fuente : ECRI Report 2009 : Injectors, Contrast Media,Angiography, CT

1 -ECRI Report 2009 : Injectors, Contrast Media,Angiography, CT
2- Medrad Spectris, Stellant D et Sx, Guerbet Optivantage DH


Eficacia de la tecnología antimicrobiana Agion

“ Tras probar una serie de polímeros de uso médico, Sciescent descubrió que los tratados con la tecnología antimicrobiana Agion® eliminaban más del 99% de los patógenos resistentes a los antibióticos. En el caso de varios tipos de catéteres venosos centrales, el SARM se redujo entre un 99,56% y un 99,999% y la CRE se eliminó en un 99,9999% o más, sin que se detectaran bacterias viables 24 horas después de la inoculación en la mayoría de los tipos de catéteres.


Megan Coyle, Wakefield, MA (PRWEB) May 04, 2015

”

Características y beneficios

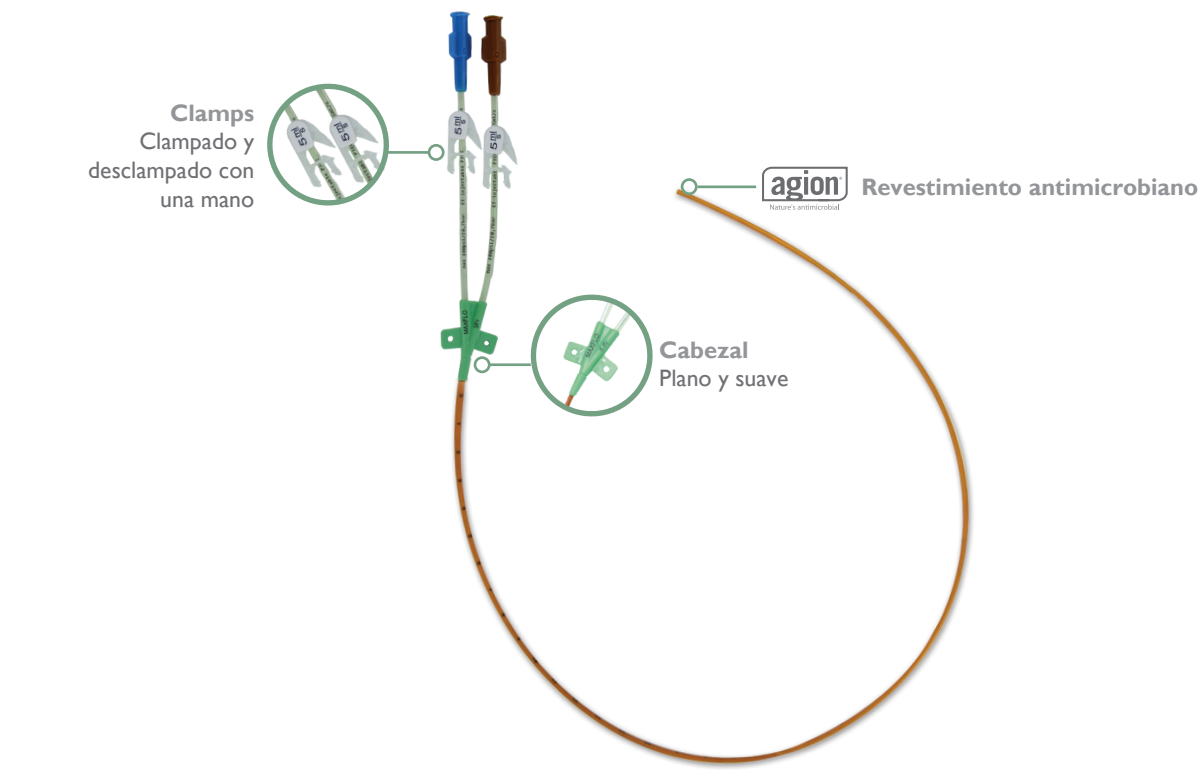

Marcaje numérico del catéter:

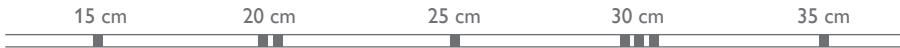

Ventajas para el paciente

- Buena estabilidad mecánica y bioquímica durante el tratamiento
- Se reducen los riesgos de contaminación e infección
- Menor riesgo de oclusión, infección, embolia gaseosa
- Inyecciones seguras de alto flujo
- Agion™ es un compuesto de iones de plata inorgánicos que mantiene una superficie antimicrobiana para ayudar a controlar las infecciones
- Suave y cómodo, menor riesgo de infección, flebitis mecánica y desprendimiento

Solución para una inserción segura del PICC

Un PICC Vygon viene con:


Un juego de introductores **Micro Seldinger** que permite la colocación con ultrasonidos en el tercio medio de la parte superior del brazo:



Aguja de punción de seguridad
Aguja ecogénica de seguridad




Introduccion pelable
Suficientemente rígido - para ayudar a atravesar la piel pero flexible - para ayudar a deslizarse a lo largo de la vena

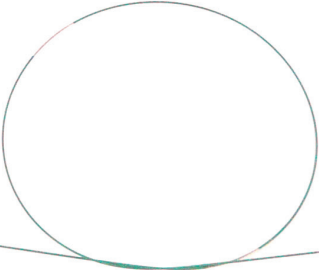

Guía de nitinol
Lectura intuitiva de la longitud insertada cada 5 cm y cada cm en la porción distal.

Incluye la elección de la guía radiológica

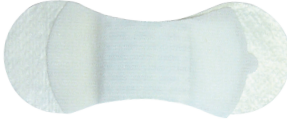

griplok
Fijación suave y segura



bionector
Conector neutro sin aguja, septum dividido y poco espacio muerto



Buen agarre para una mayor comodidad
bionector conexión/desconexión

Para reducir complicaciones sigue el color:

- Infección
- Colocación incorrecta
- Trombosis
- Punción con aguja
- Embolia gaseosa
- Hemorragia
- Obstrucción
- Hematoma

Beneficios para ti

- Dilatador suave para facilitar la inserción a través de la piel y la vena, reduciendo el traumatismo vascular.
- Localización de venas por ultrasonidos más fácil y rápida, mayor tasa de éxito en la inserción.
- La inserción de la guía es más rápida y suave.

Referencias

								Código de producto		
Lúmen	Ø (Fr)	Ext Ø (mm)	Longitud (cm)	Flujo por gravedad (mL/min)	Volumen de purgado (mL)	Caudal máximo	Presión máxima	Kit MST con guía de 50 cm	Kit MST con guía de 67 cm	Kit MST con guía de 135 cm
1	4	1.35	55	19	0,8	5 ml/s	325psi (22.4bar)	8394.14*	8394.414*	8394.514*
1	5	1.70	55	28	0,8	6 ml/s	325psi (22.4bar)	8394.15**	8394.415**	8394.515**
1	5	1.75	55	46	1	7 ml/s	325psi (22.4bar)	8394.105*	8394.405*	8394.505*
2	5	1.75	55	9 (x2)	0,75(x2)	5 ml/s	325psi (22.4bar)	8394.25*	8394.425*	8394.525*
2	6	2.0	55	14 (x2)	0,8 (x2)	5 ml/s	325psi (22.4bar)	8394.26**	8394.426**	8394.526**
2	6	2.0	55	14 (x2)	0,8(x2)	6 ml/s	325psi (22.4bar)	8394.206*	8394.406*	8394.506*
3	6	2.0	55	4 (x2) 10	0,45 (x2) 0.85	5 ml/s	325psi (22.4bar)	8394.36*	8394.436*	8394.536*

* con conicidad inversa / ** con tubo cilíndrico

Descripción

- maxflo expert con estilete premontado en puerto de descarga temporal en T
- Aguja de punción ecogénica de seguridad 21G
- Alambre guía de nitinol con avance de pulgar, Ø 0,46mm x L. 50cm/67cm/135cm
- Funda pelable de 7 cm
- Bisturí
- bionector**
- maxflo griplok 5804.10



PARA MÁS INFORMACIÓN, DIRÍJASE A: **comunicacion@vygon.com**

Las especificaciones que figuran en este folleto son meramente informativas y no tienen, en ningún caso, carácter contractual.



VYGON. Polígono industrial Fuente del Jarro, C/ Ciutat de Sevilla, 34, 46980, Paterna (Valencia)

+34 961 34 30 30

www.vygon.com



Value Life