

10 errores frecuentes que ponen en riesgo la **compresión radial**

ERRORES CRÍTICOS



No verificar permeabilidad arterial.

Aplicar presión en la parte superior de la almohadilla.

Mantener el dispositivo >5 h sin autorización médica.

No detener la descompresión ante la aparición de sangre.

No esperar los 15 min antes de retirar el dispositivo.

ERRORES OPERATIVOS



Colocar mal la almohadilla (distancia incorrecta).

Sujetar incorrectamente la correa.

Aumentar la compresión sin comprobar sangrado.

Permitir que el paciente manipule el dispositivo.

No informar al paciente de las señales de alarma.

