


RADIALES

Enfoque para el cateterismo de la arterial radial

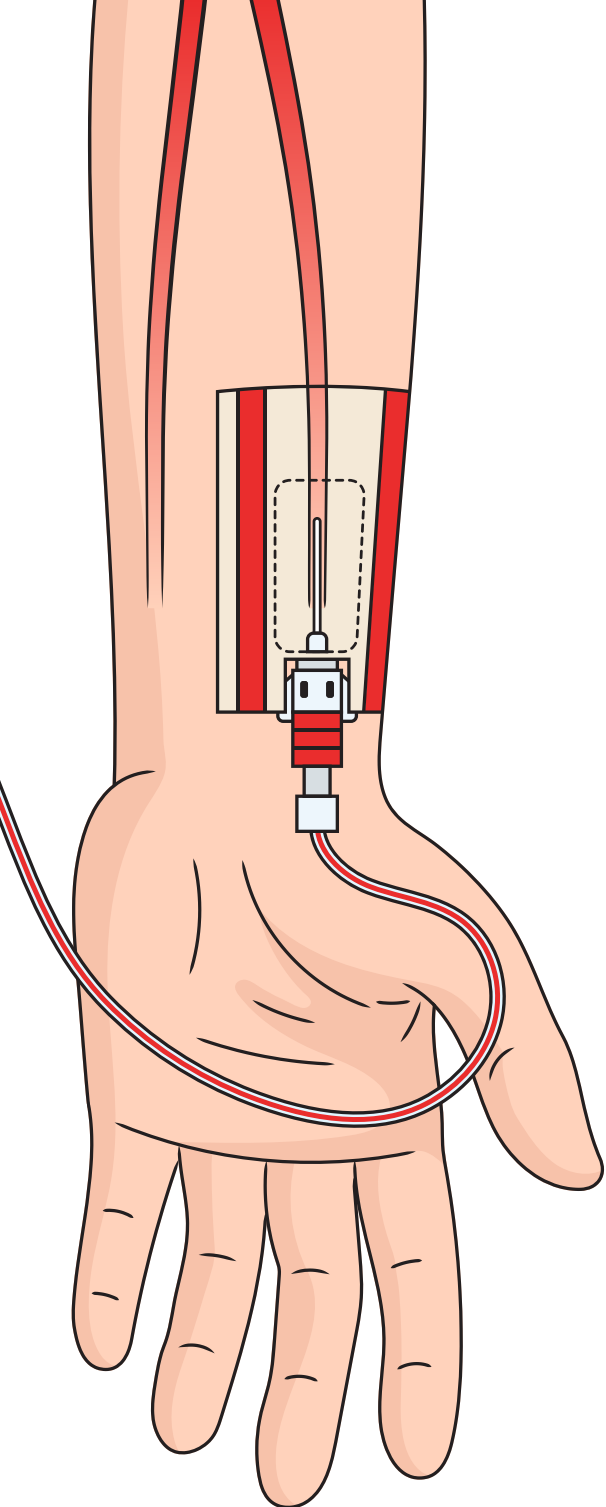

R

Ratio (Catéter-Vaso)

Medir el diámetro del vaso arterial y mantener un CVR < 45%

A

Análisis y test de Allen

Evaluar la región y evaluar la circulación colateral.

D

Distancia desde la muñeca

Sitio de inserción > 4cm proximal desde el pliegue de la muñeca y evitar las zonas de flexión

I

Integridad de la piel

Inspeccionar la muñeca y el antebrazo en busca de enrojecimiento, sangrado, hematomas o hinchazón localizada.

A

Ángulo de inserción

Medir la profundidad del recipiente e insértelo con ultrasonidos < 30°. Evitar ángulos > 45°.

L

Longitud del catéter

Considerar la longitud total del catéter, relativo a la profundidad de la arteria y ángulo de inserción

E

Ecografía

Realizar la técnica ecográfica para una mayor seguridad

S

Seguridad

Estabilizar y sujetar para evitar la retirada o el desplazamiento involuntario del catéter. Evitar las suturas.