






1
Evaluar la piel

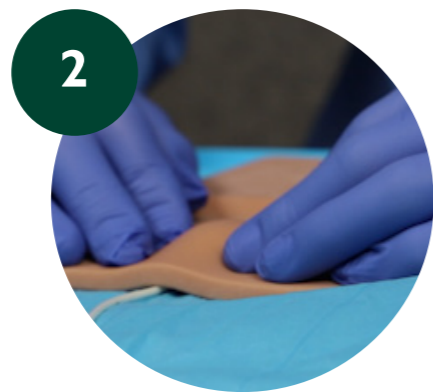


2
Localizar el
reservorio

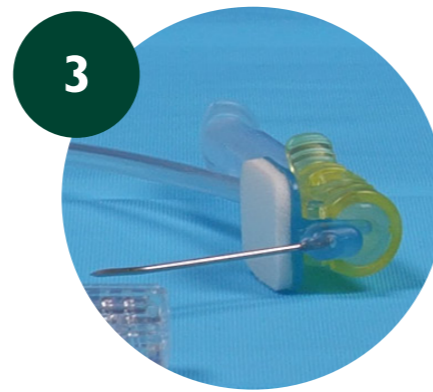


3
Elegir la aguja y
establecer barreras
estériles

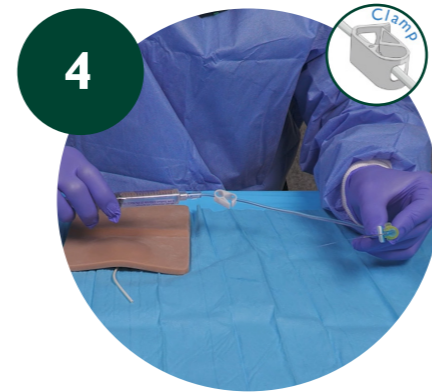


4
Purgar y clampar la
aguja

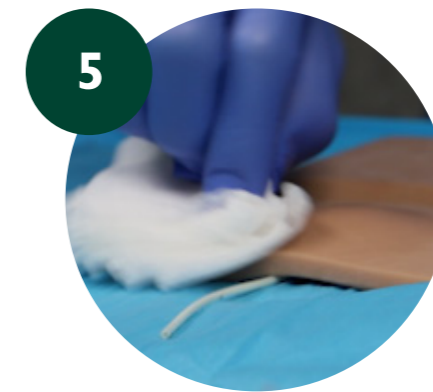


5
Desinfectar la piel

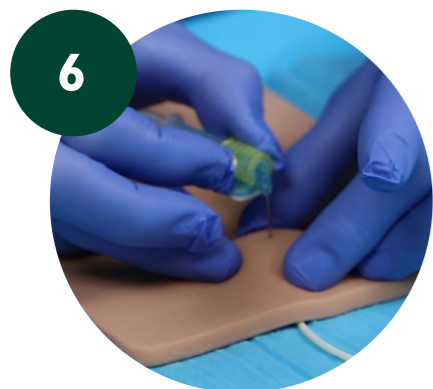

6
Estabilizar el
reservorio

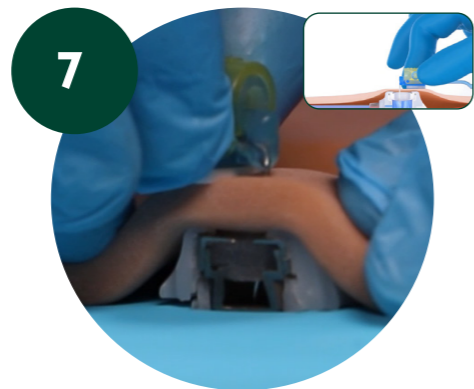

7
Punción de la aguja:
1. Orientar bisel en
dirección opuesta a la
salida del catéter
2. Puncionar reservorio
3. Dejar de presionar al
sentir en fondo del
reservorio

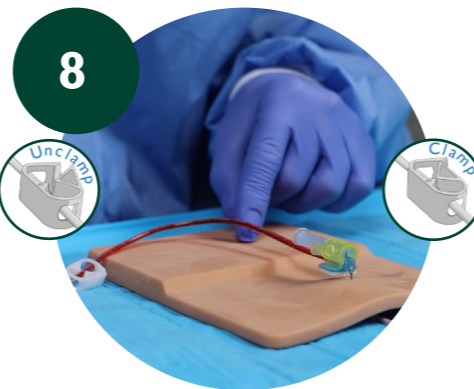

8
Comprobar el
reflujo de sangre y
lavar la línea
aplicandola técnica
push-stop-push



9
Estabilizar la aguja
con almohadilla/gasa
y tiras adhesivas




10
Colocar apósito
oclusivo
transparente y fijar
en omega el
prolongador



11
Si la aguja se va a
utilizar:
Comprobar reflujo,
lavar la línea de
infusión y proceder
a administración



12
Si la aguja NO se va
a utilizar: Colocar
tapón de
desinfección pasiva

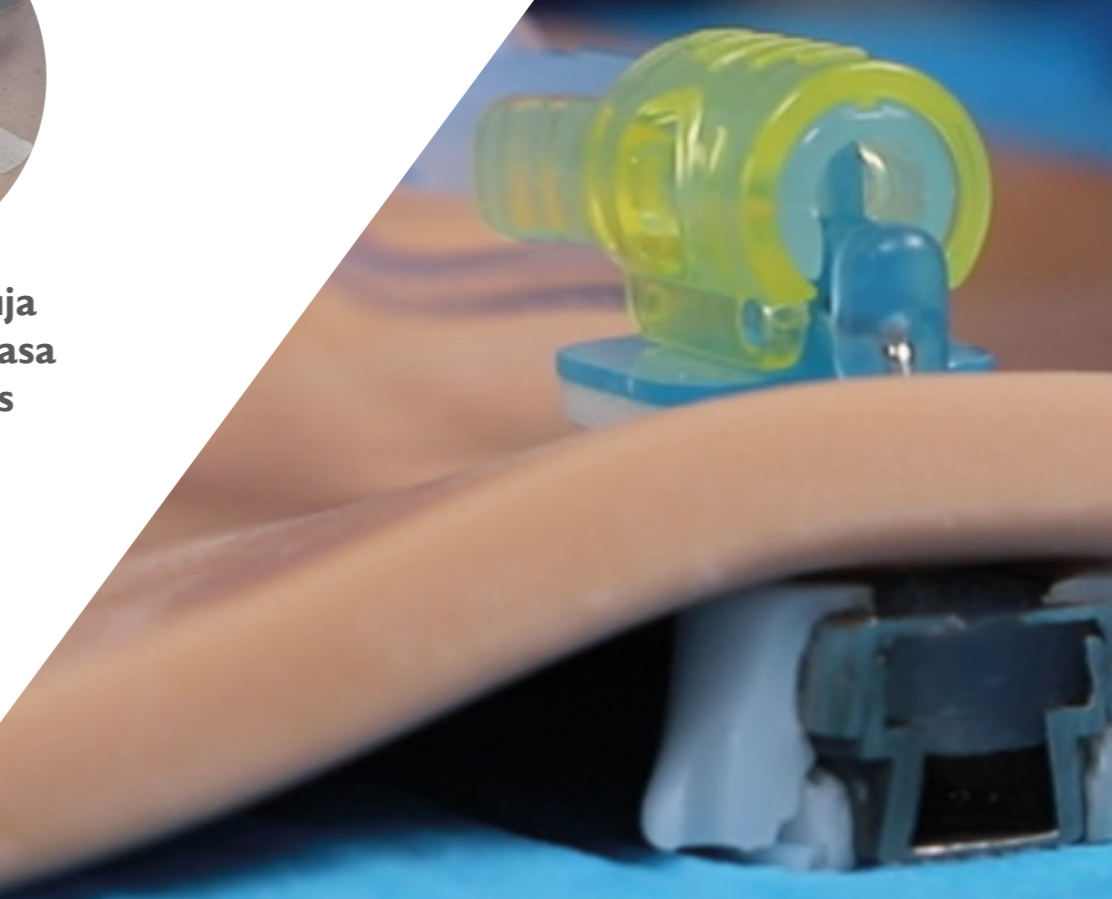

Protocolo de inserción de la Aguja Huber

