



1
Retirar la fijación del prolongador (si se ha seguido esta recomendación)




2
Retirar apósito transparente:
1 - Estirar de los extremos
2 - De arriba a bajo, en sentido de la piel




3
Estabilizar la aguja mientras se retira el apósito




4
Retirar las tiras de fijación y la almohadilla

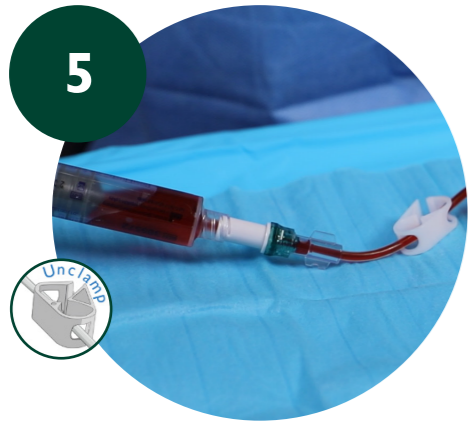


5
Comprobar el reflujo y lavar la aguja con suero fisiológico

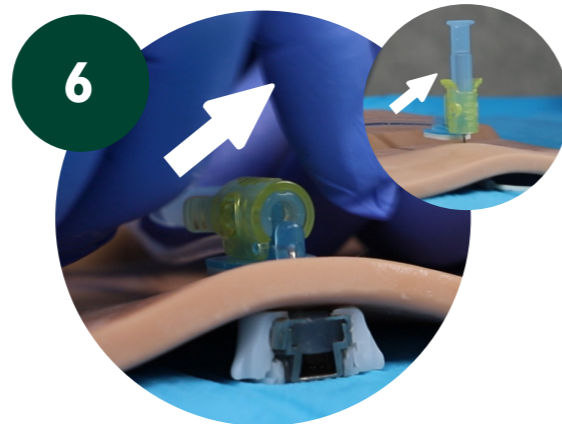

6
Activar el mecanismo de retirada de la aguja levantando el pistón

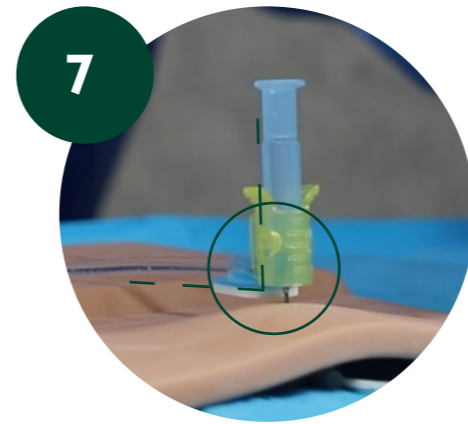

7
El pistón debe estar perpendicular al septum

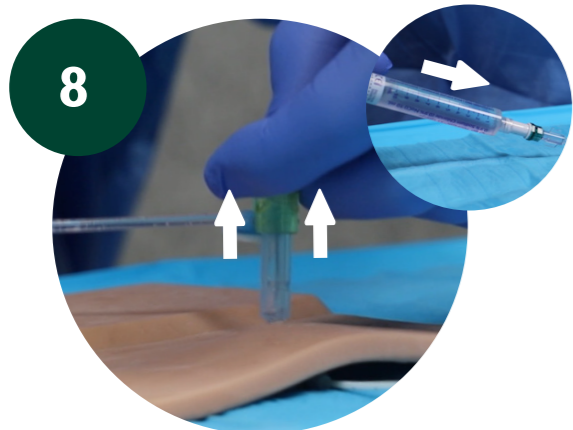

8
Retirar la aguja con una sola mano. Asegurar la estabilidad del puerto e inyectar el suero mientras se retira. La activación del mecanismo de la aguja permite la retirada del dispositivo por un solo operador, garantizando simultáneamente la generación de presión positiva



9
Deshechar la aguja en un contenedor de seguridad para objetos punzantes

Protocolo de
retirada de la
Aguja Huber

