

PROTOCOLO SIP-PORT

GAVeCeLT bundle



Inserción catéter
PICC-Port

¿QUÉ ES UN PICC-PORT?

Reservorio totalmente implantado bajo la piel situado 1/3 proximal del brazo para tratamientos no continuados a largo plazo.

- **LONGITUD:** 40 a 60 cm
- **TIEMPO DE DURACIÓN:** de meses a años
- **UBICACIÓN DE LA PUNTA:** Posición central, generalmente en vena cava superior.

8 PASOS DEL PROTOCOLO

1 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN ECOGRÁFICA



Ecografía sistemática y bilateral. Protocolo RaPeVa.

2 ASEPSIA ADECUADA

Higiene de manos. Clorhexidina al 2% en alcohol isopropílico al 70%. Emplear precauciones máximas de barrera.



4


4 IDENTIFICACIÓN ESTRUCTURAS CRÍTICAS

Identificación ecográfica del nervio mediano y arteria braquial, fundamental para evitar punción arterial o lesión neurológica.

3

3 TAMAÑO DE LA VENA Y TUNELIZACIÓN


Venas posibles: basilica, braquial o axilar. Evaluación de necesidad de tunelización según localización.

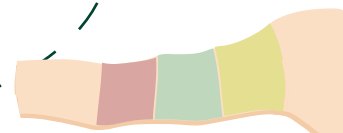

5

5 VENOPUNCIÓN POR ULTRASONIDOS


Punción ecoguiada en eje corto con técnica Microseldinger mediante microintrodutor.

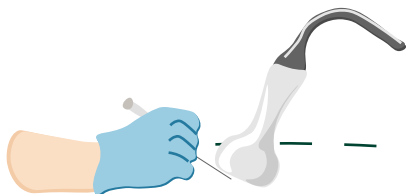

6

6 NAVEGACIÓN DE LA PUNTA

Confirmación de la dirección correcta del catéter con ecografía, visualización hacia vena braquiocefálica según protocolo ECHOTIP.

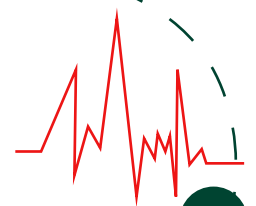

7

7 UBICACIÓN DE LA PUNTA

Verificación de la ubicación de la punta durante el procedimiento con ECG-IC como "gold estándar".



8

8 CIERRE DEL BOLSILLO

Cerrar el bolsillo sobre el bíceps donde se ubica el reservorio y sellar con cianoacrilato.

VYGON

Value Life