

Aguja con bisel Quincke

Diseño y ventajas


Cuenta con un bisel de corte que facilita un flujo rápido de líquido cefalorraquídeo durante la punción.

Riesgos y desventajas

Corta las fibras durales, lo que provoca un mayor traumatismo y una mayor incidencia de PDPH (por ejemplo, un 8,5 % con una aguja de 25G).

Contexto de uso

Evitar su uso en pacientes de alto riesgo. En caso de utilizarse, el bisel debe alinearse en paralelo a las fibras.

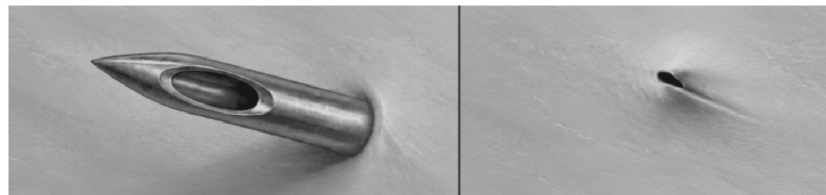

Aguja con bisel Whitacre

Diseño y ventajas

Separa las fibras sin cortarlas, lo que reduce el traumatismo y facilita el cierre de la abertura dural.

Riesgos y desventajas

Las agujas muy finas pueden dificultar la técnica y obligar al operador a realizar más intentos.

Contexto de uso

Opción preferida, incidencia <3 % (con una aguja de 25G): ideal en obstetricia y para pacientes vulnerables.