


PANEL DE SIGNOS DE FALLO DEL CATÉTER

VER - TOCAR - COMPARAR

VER

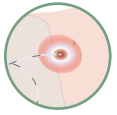

Enrojecimiento

Eritema o rubor alrededor del sitio de inserción.




Edema o tumefacción

Edema o aumento del volumen en el sitio o trayecto.




Isquemia

Cambios de coloración - palidez o blanqueamiento de la piel.

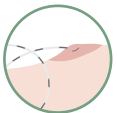

Asimetría

Asimetría visible entre ambas extremidades.

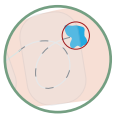

Filtración o fuga

Fuga visible del líquido bajo el apósito o punto de inserción.




Apósito húmedo o levantado

Apósito despegado sin causa externa.


Cualquier cambio visual puede ser un signo temprano de complicación.

TOCAR

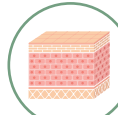


Tensión cutánea

Tensión aumentada al palpar la zona cutánea.

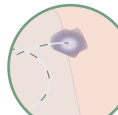


Induración

Endurecimiento del tejido perilesional.

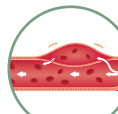

Cambios en la circulación

Cambios en estado circulatorio: pulsos distales y relleno capilar.

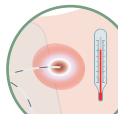

Cambio de temperatura

Temperatura local aumentada o disminuida.



Fluctuación

Crepitación subcutánea en extravasaciones voluminosas


La palpación detecta los cambios que pueden ser no visibles.

COMPARAR




Coloración

Comparar el color y tono con lado contralateral.

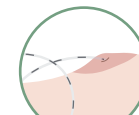

Diámetro

Comparar el diámetro de ambas extremidades

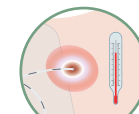


Temperatura

Comparar la temperatura con lado contralateral.



Movilidad

Comparar movilidad espontánea del neonato.

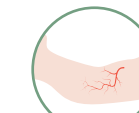

Relleno capilar

Diferencia relleno capilar (normal ≤ 2 segundos).

La comparación permite identificar cambios sutiles y tendencias.