




TECHNIQUE MICROSELDINGER : SET MICROSELDINGER

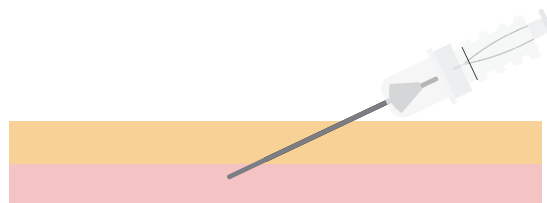


1 Ponction à l'aiguille

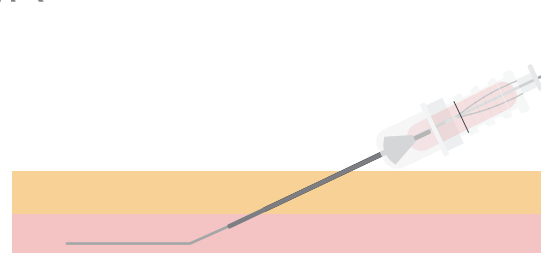


2 Insertion du guide dans la canule de l'aiguille

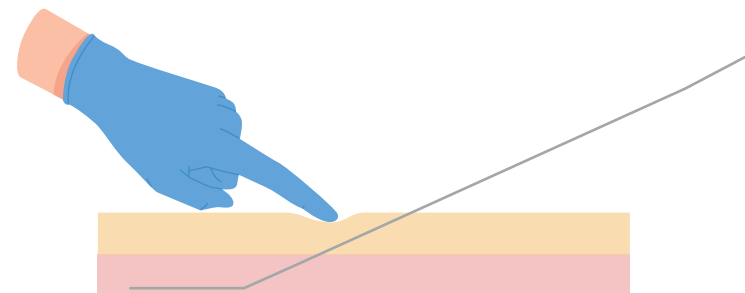


3 Retirer l'aiguille tout en maintenant le guide à l'intérieur du vaisseau

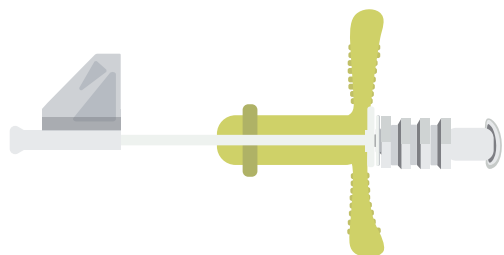


4 Insertion de l'aide à l'insertion dans la canule

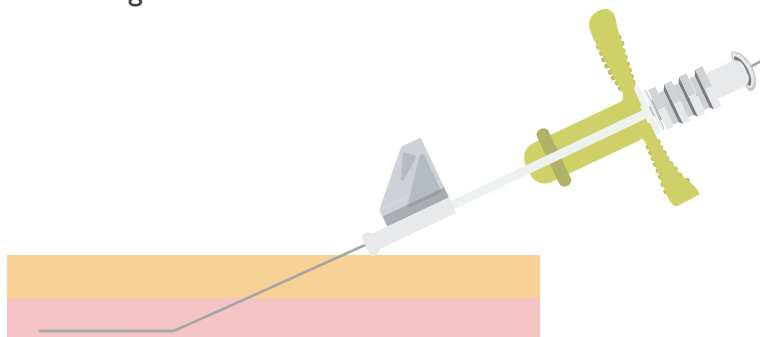


5 Faire avancer le dilateur avec l'aide à l'insertion à travers le guide

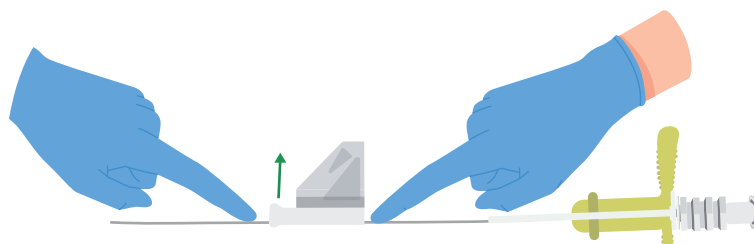


6 Retirer l'aide et poursuivre l'insertion du dilateur

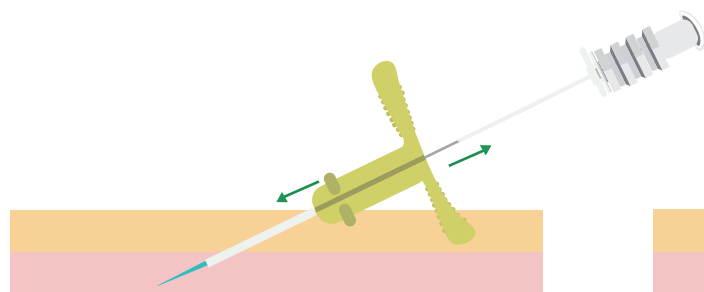

7 Retirer le dilateur avec le guide en nitinol

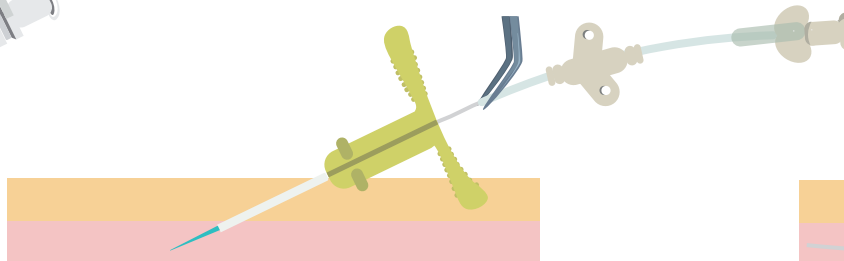

8 Enfiler le cathéter à l'aide d'une pince non dentée

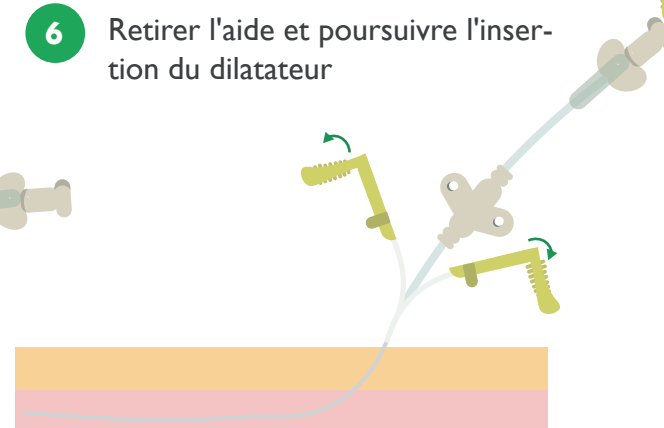

9 Retirer la canule pelable et s'assurer que le cathéter est correctement placé