

Mon guide **Mieux Comprendre**  
pour les enfants et les adolescents  
atteints de cancer

# Bienvenue dans le service pédiatrie !

Toute l'équipe est là pour prendre  
soin de toi, t'écouter et  
t'accompagner pendant ton  
traitement.


Tu as sûrement dû recevoir ce petit  
guide car tu vas recevoir ou tu as  
reçu une chambre implantable. Ce  
guide créé par Vygon, va t'aider à  
comprendre ce qu'est une chambre  
implantable et comment elle va être  
utilisée.

Tu peux le lire seule(e) ou avec tes  
parents. Il est là pour vous rassurer !

Mon nom :

Mon prénom :

## MES PARENTS

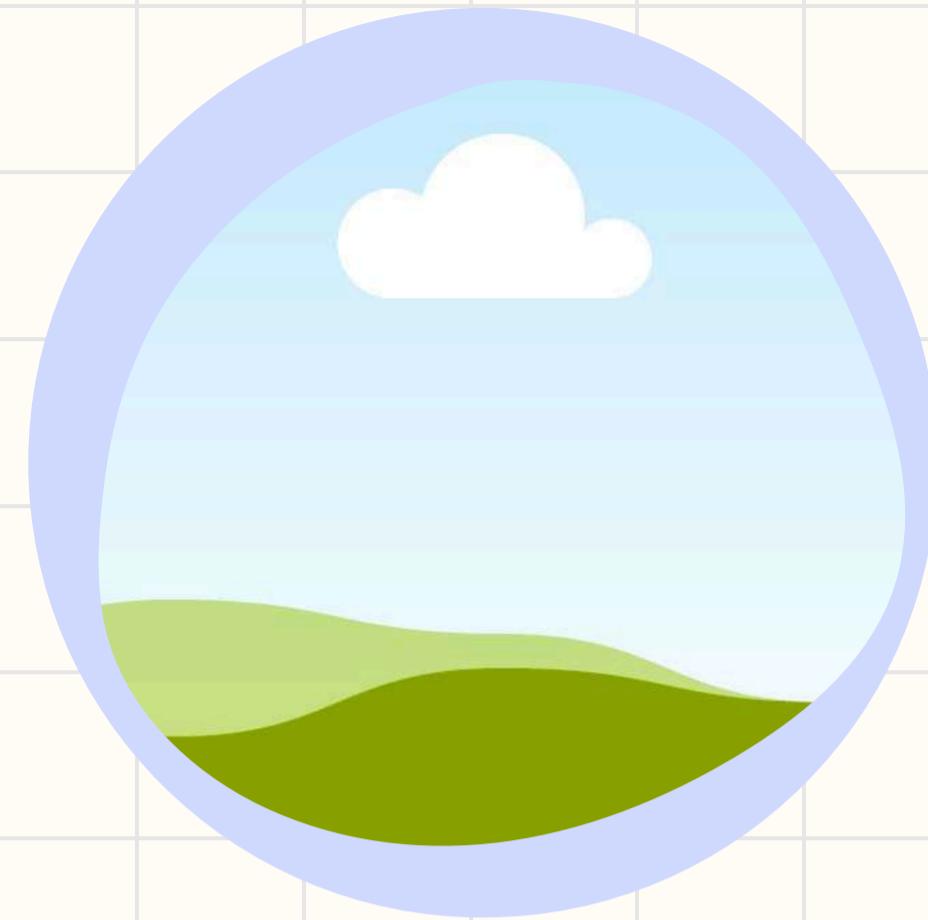

## INFOS MEDICALS

Mon hôpital :


Mon service:

Mon médecin:

Téléphone :

MON ESPACE

# Nos personnages

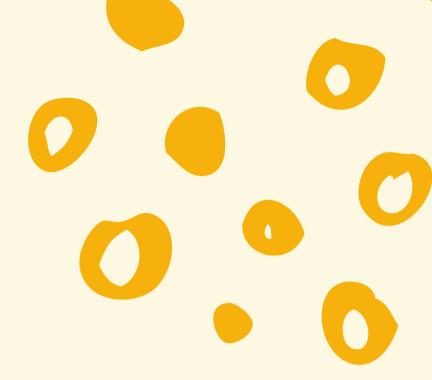

Sloane




Mère de Sloane



Père de Sloane




Dr Agate Hope  
Oncologue

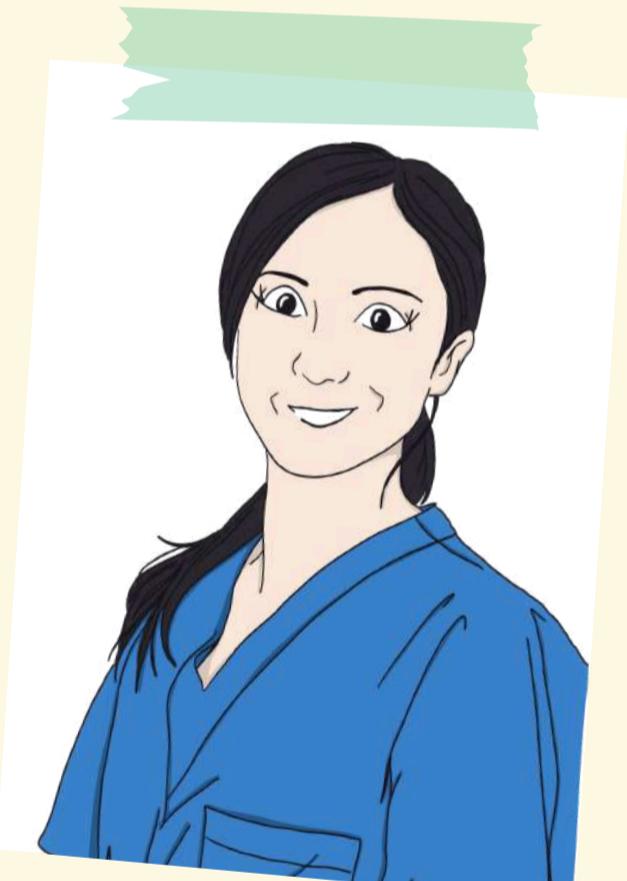

Milla  
Infirmière



Infirmière  
en oncologie

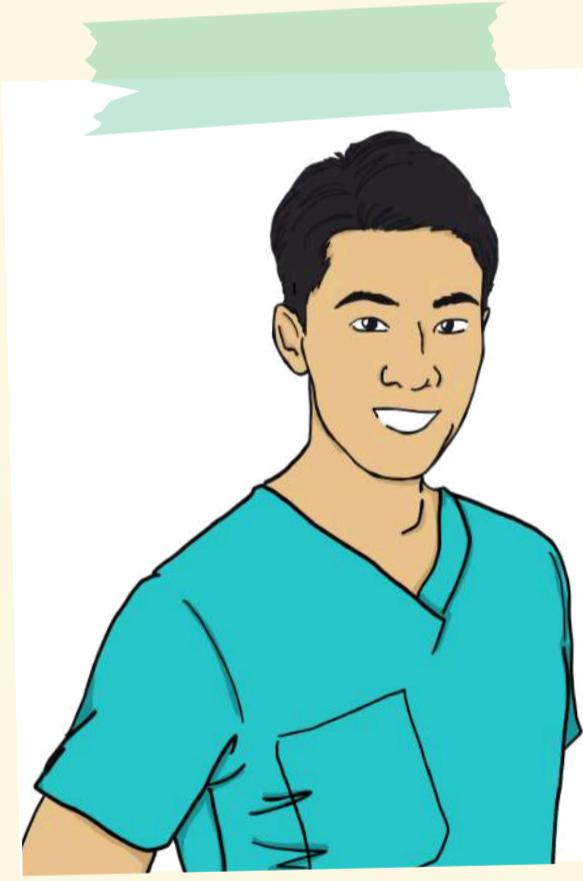

Dr Ina  
Anesthésiste








Cousin de  
Sloane




Guardian of the Vessels : Mouvement Vygon pour créer une communauté de professionnels de santé qui ont pour objectif commun de faire les meilleures pratiques pour améliorer les soins aux patients.




# Chapitre 1: Dr Hope a de l'espoir !


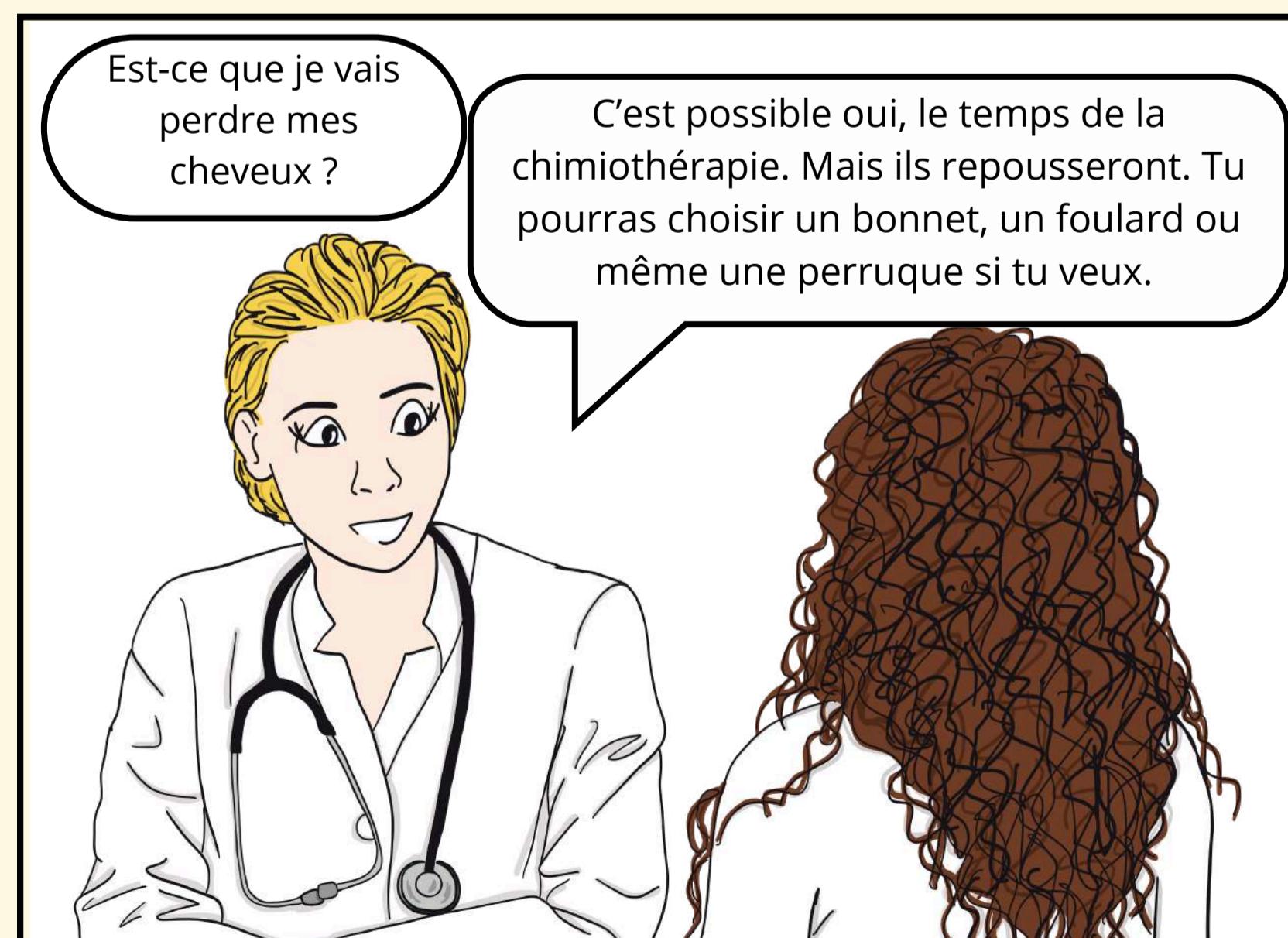
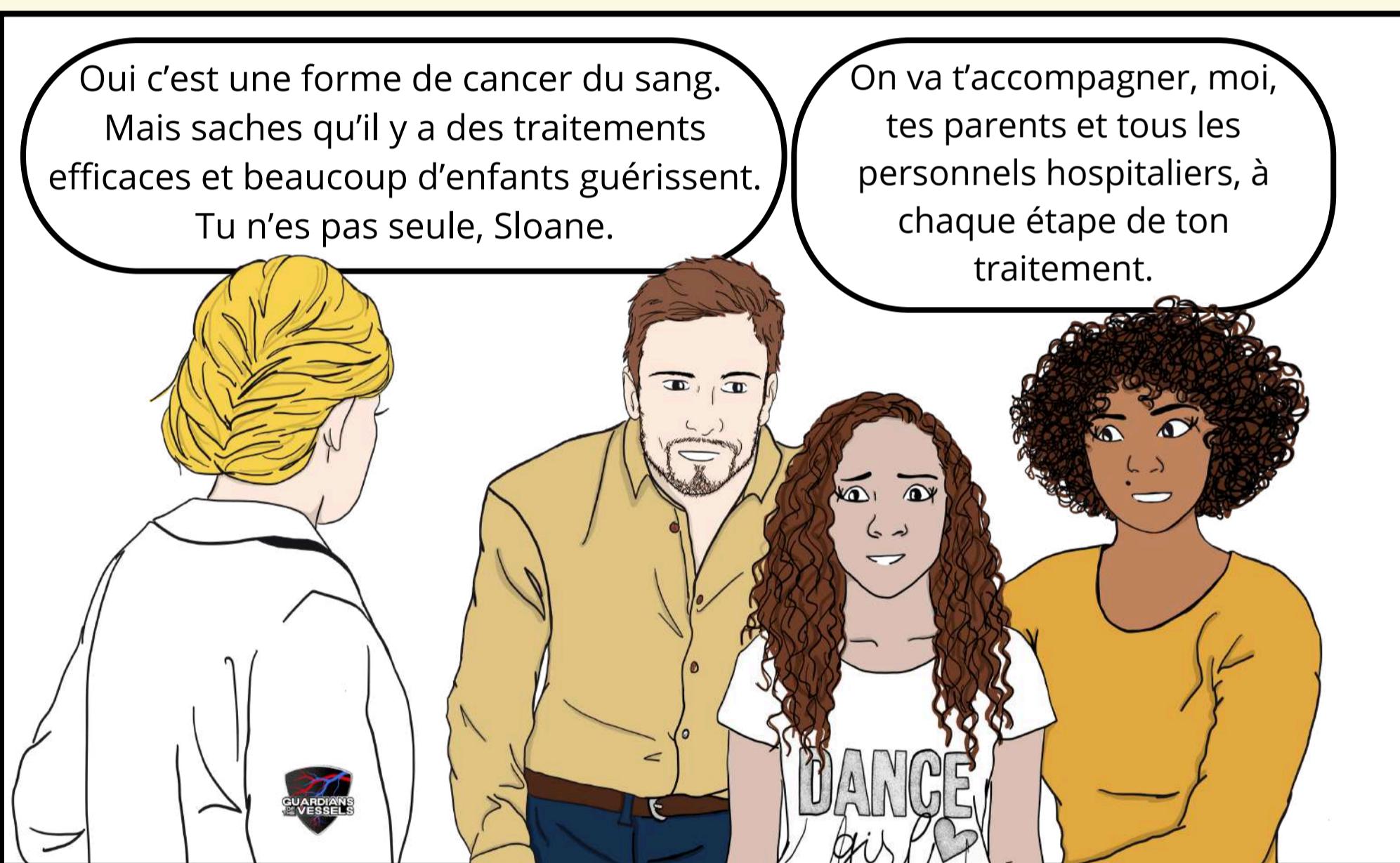


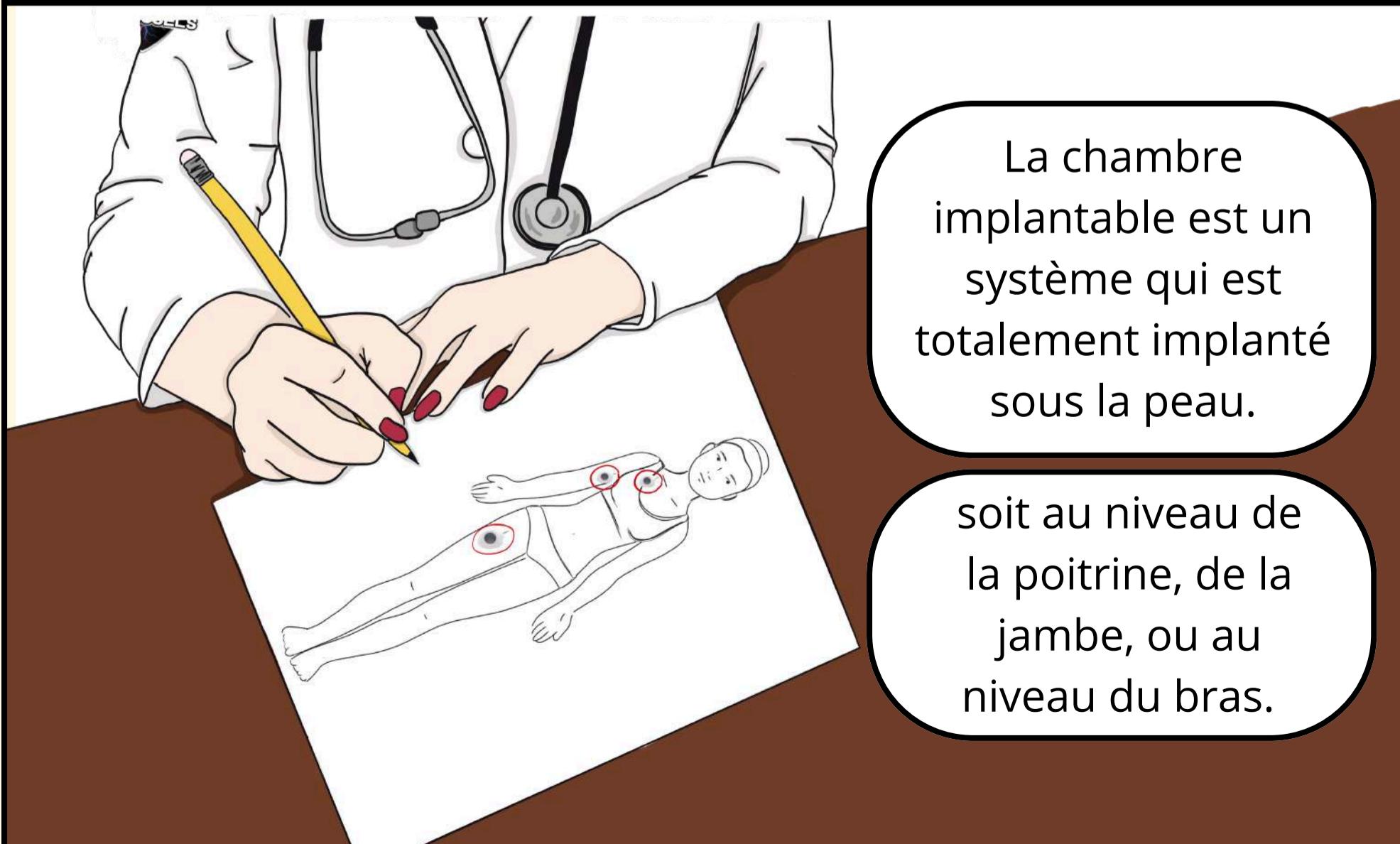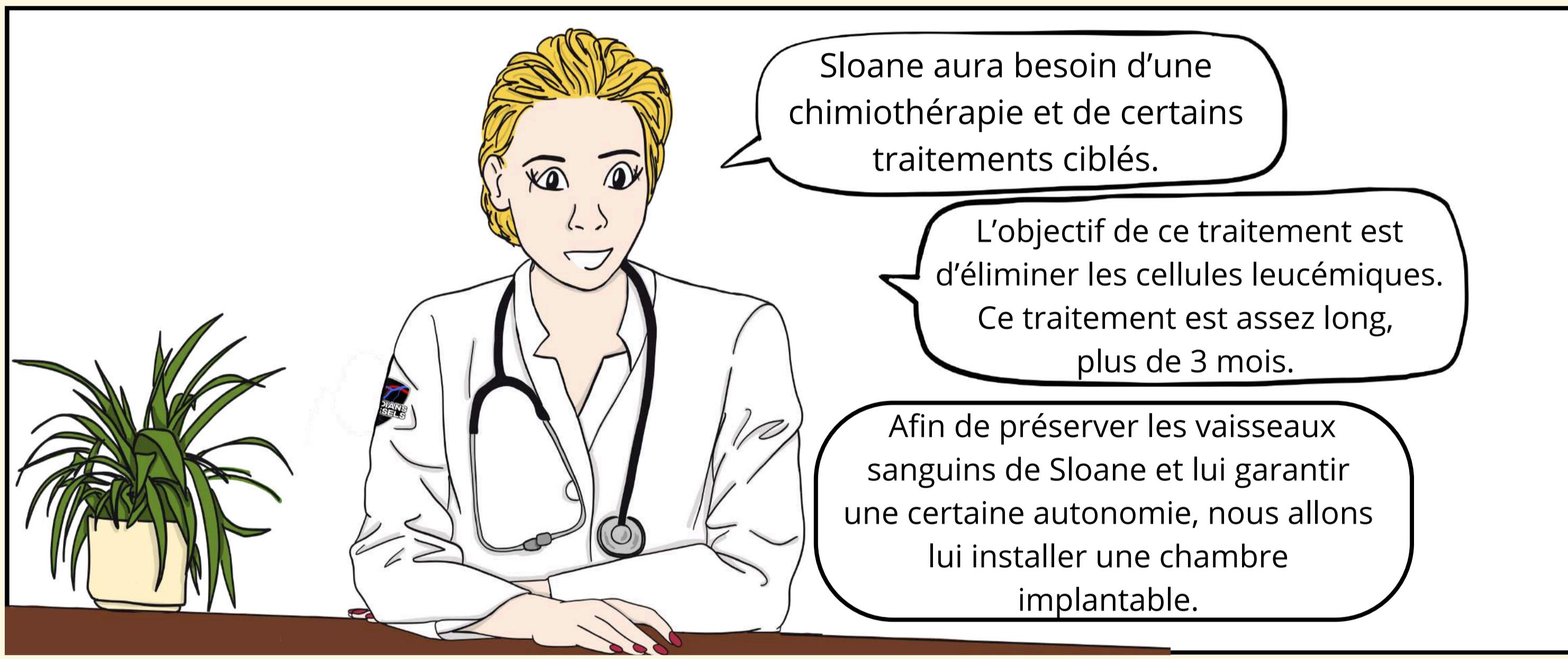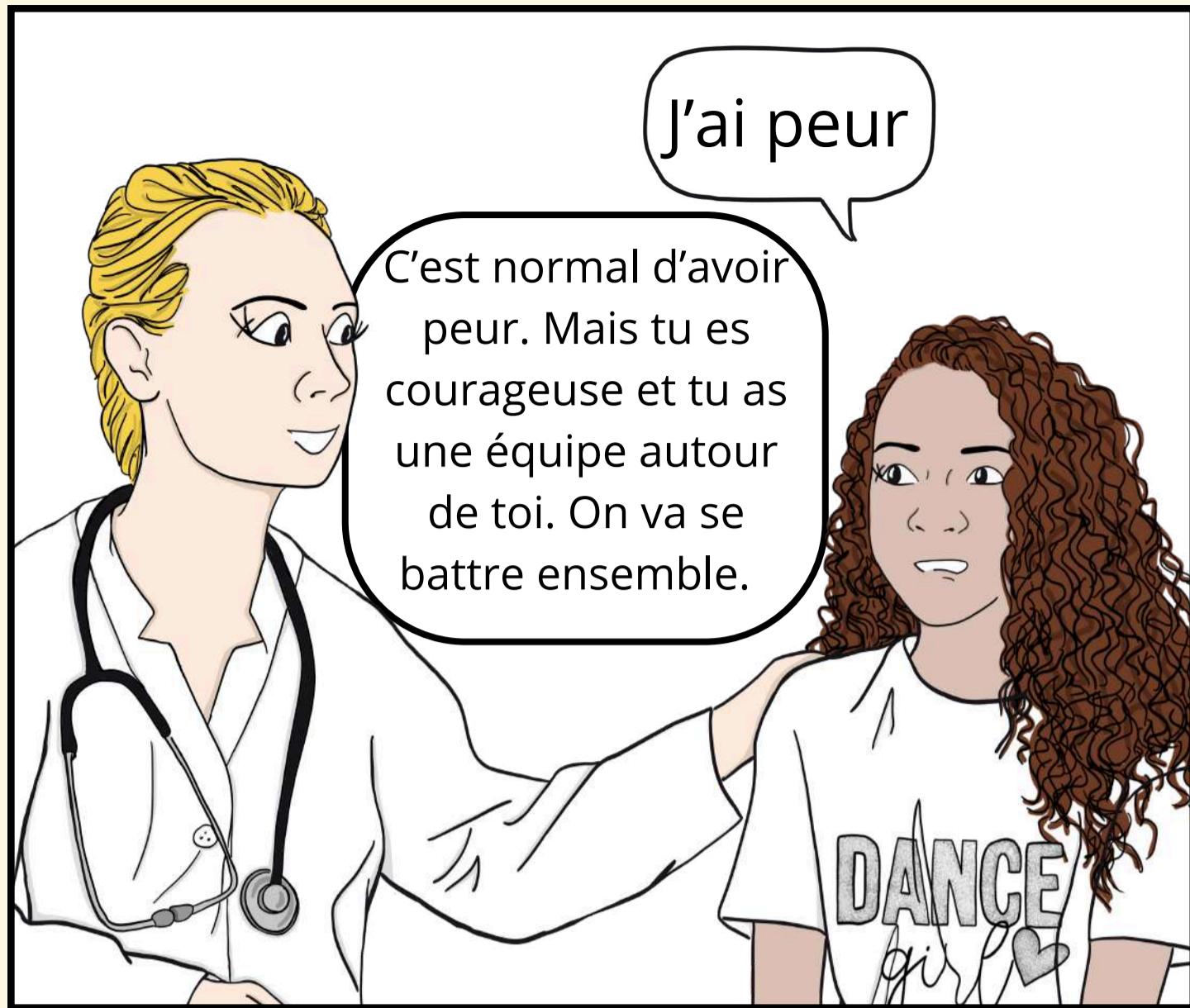



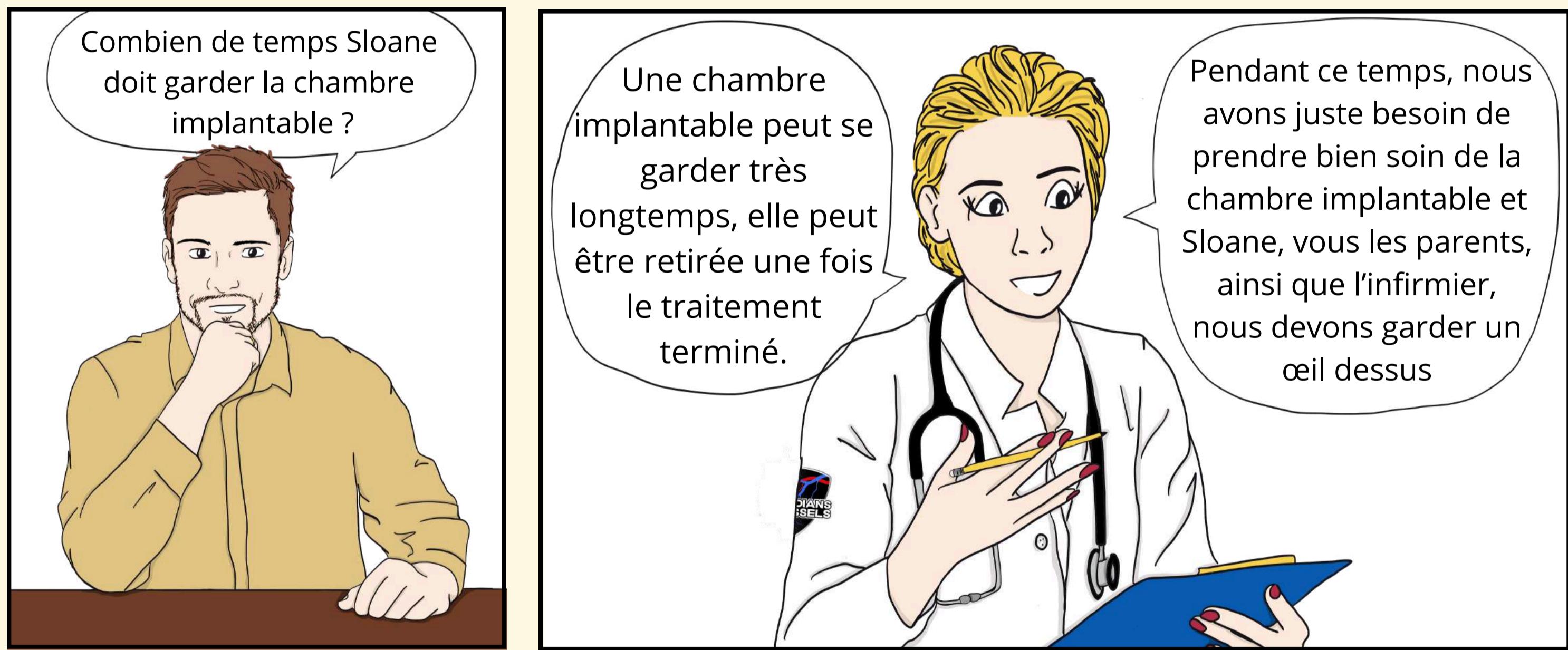




## Chapitre 2 : Mila, l'ange protectrice

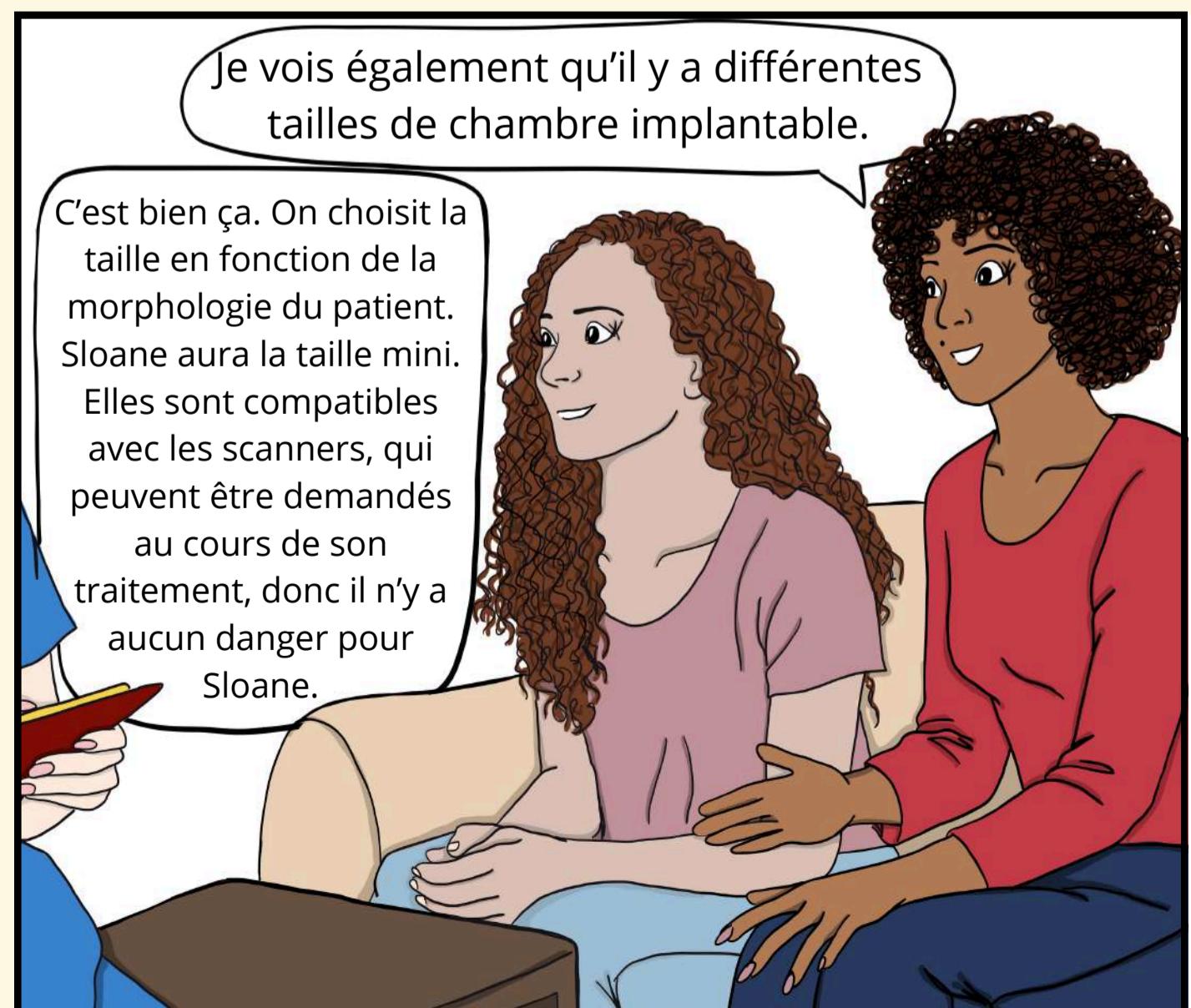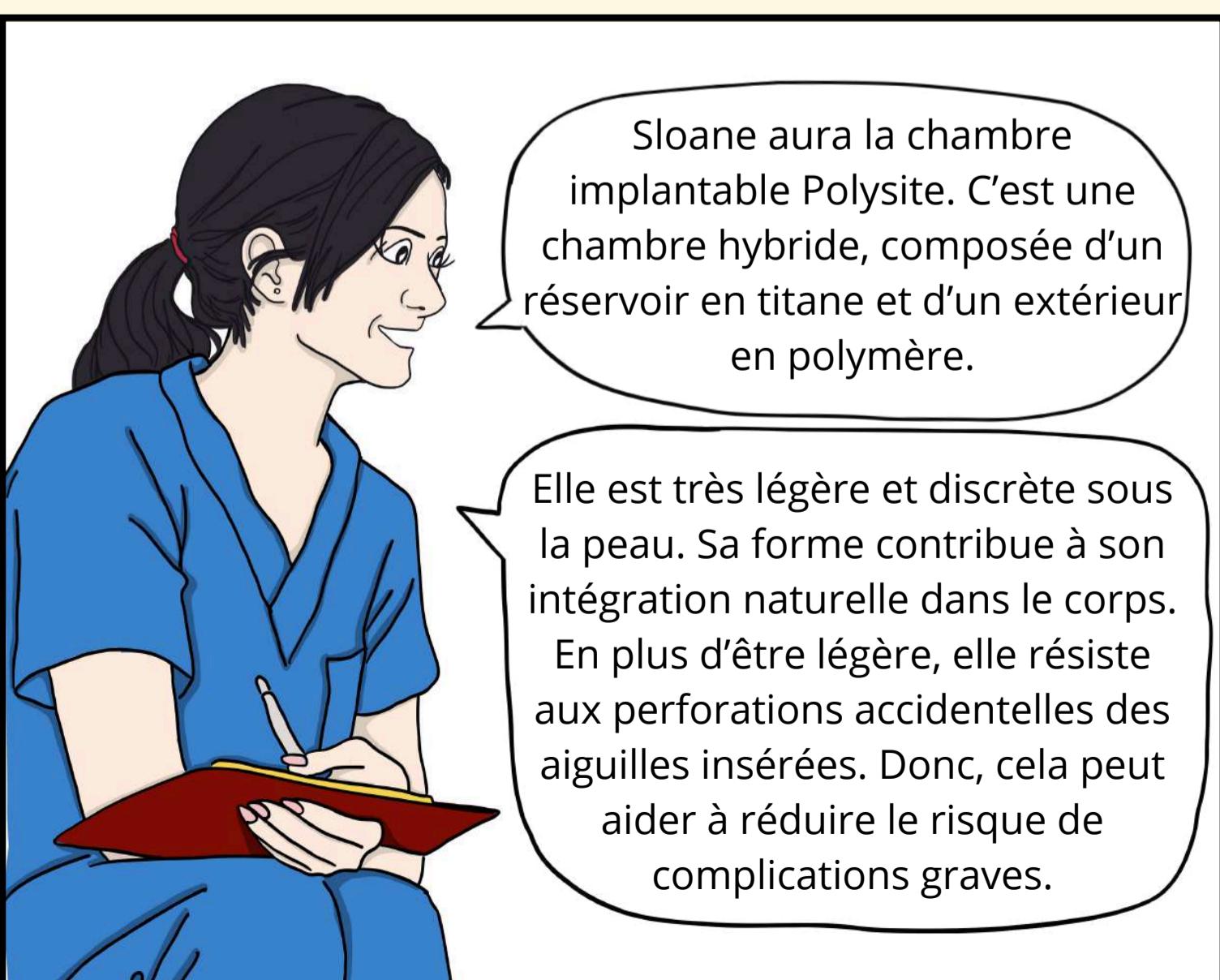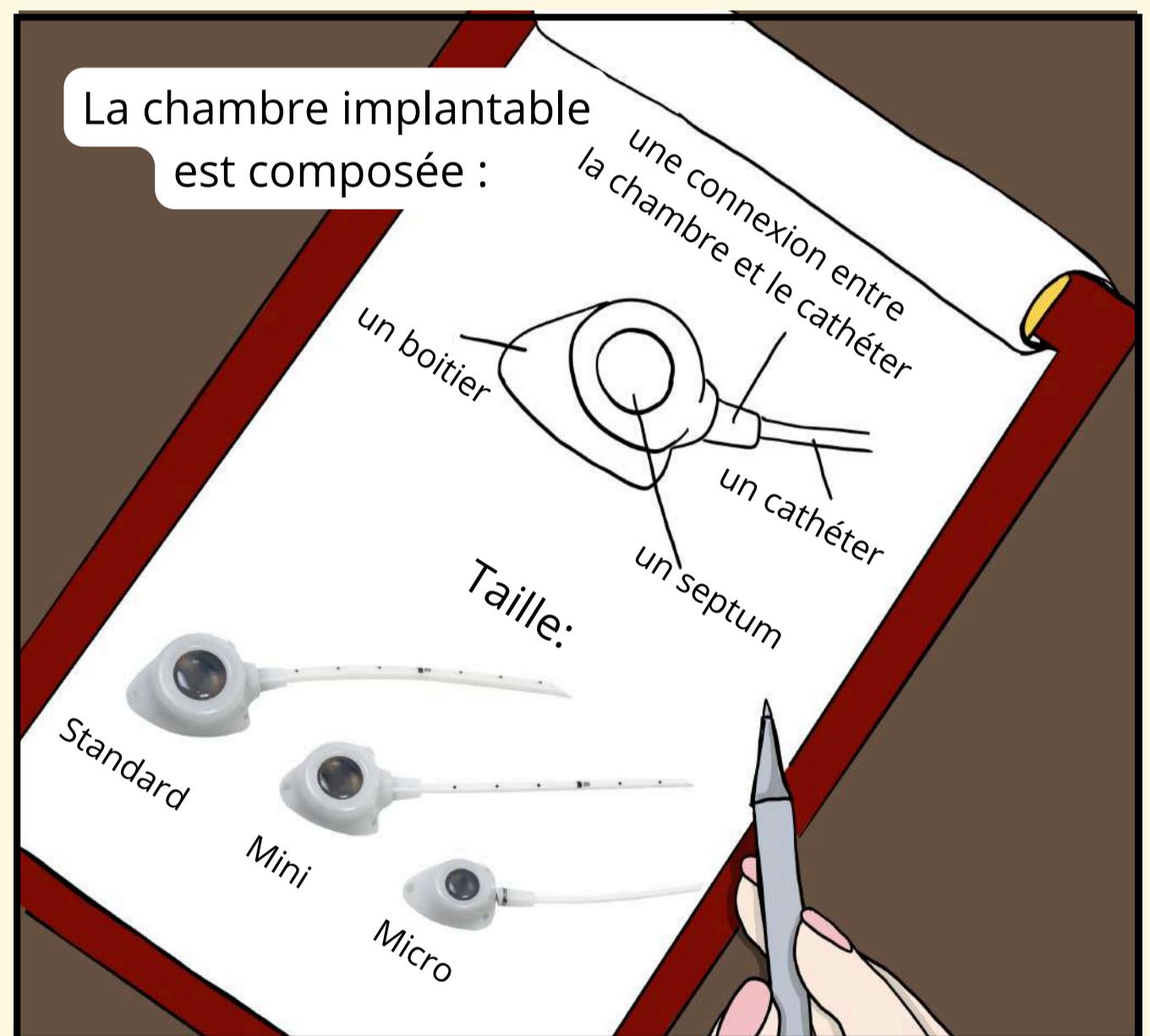

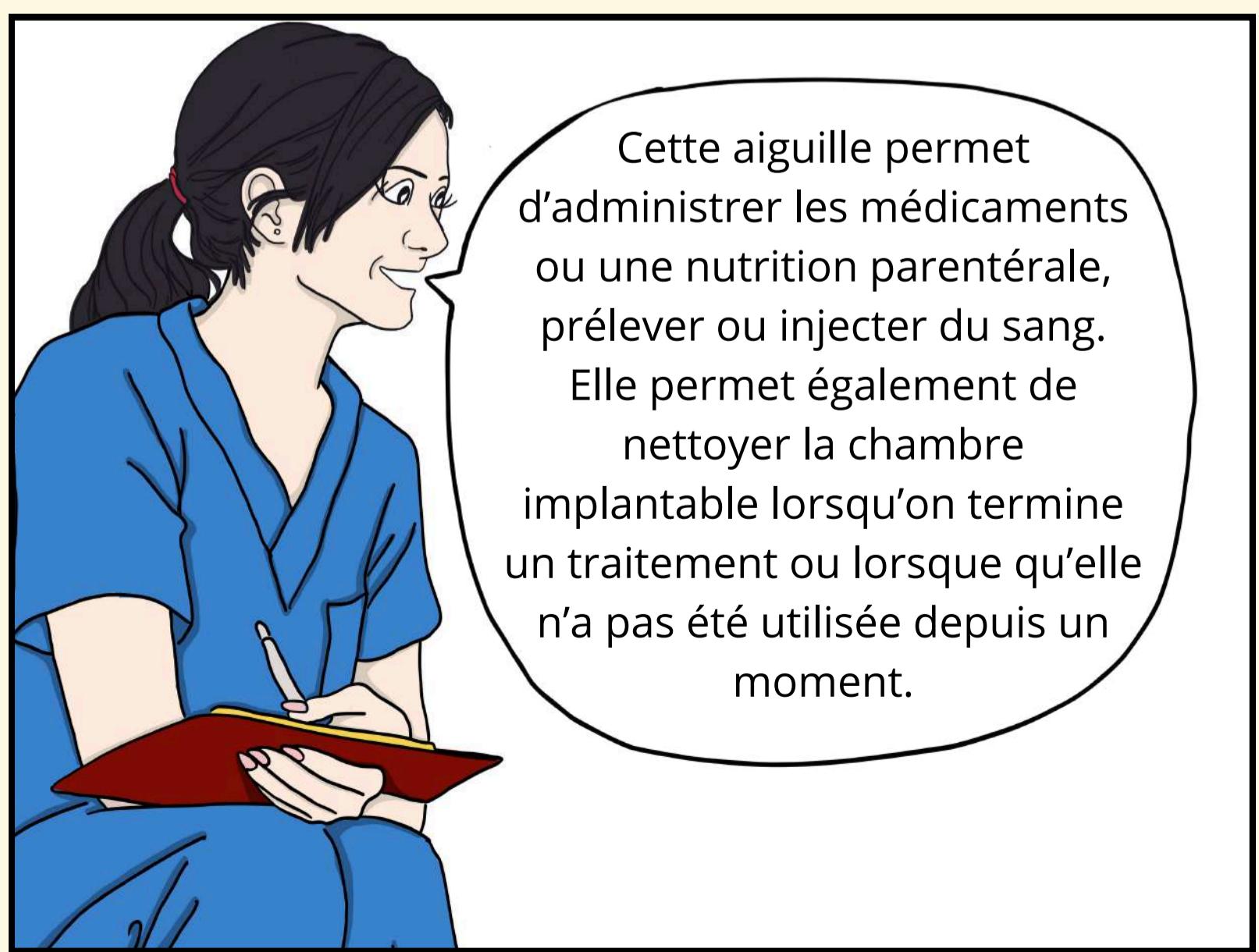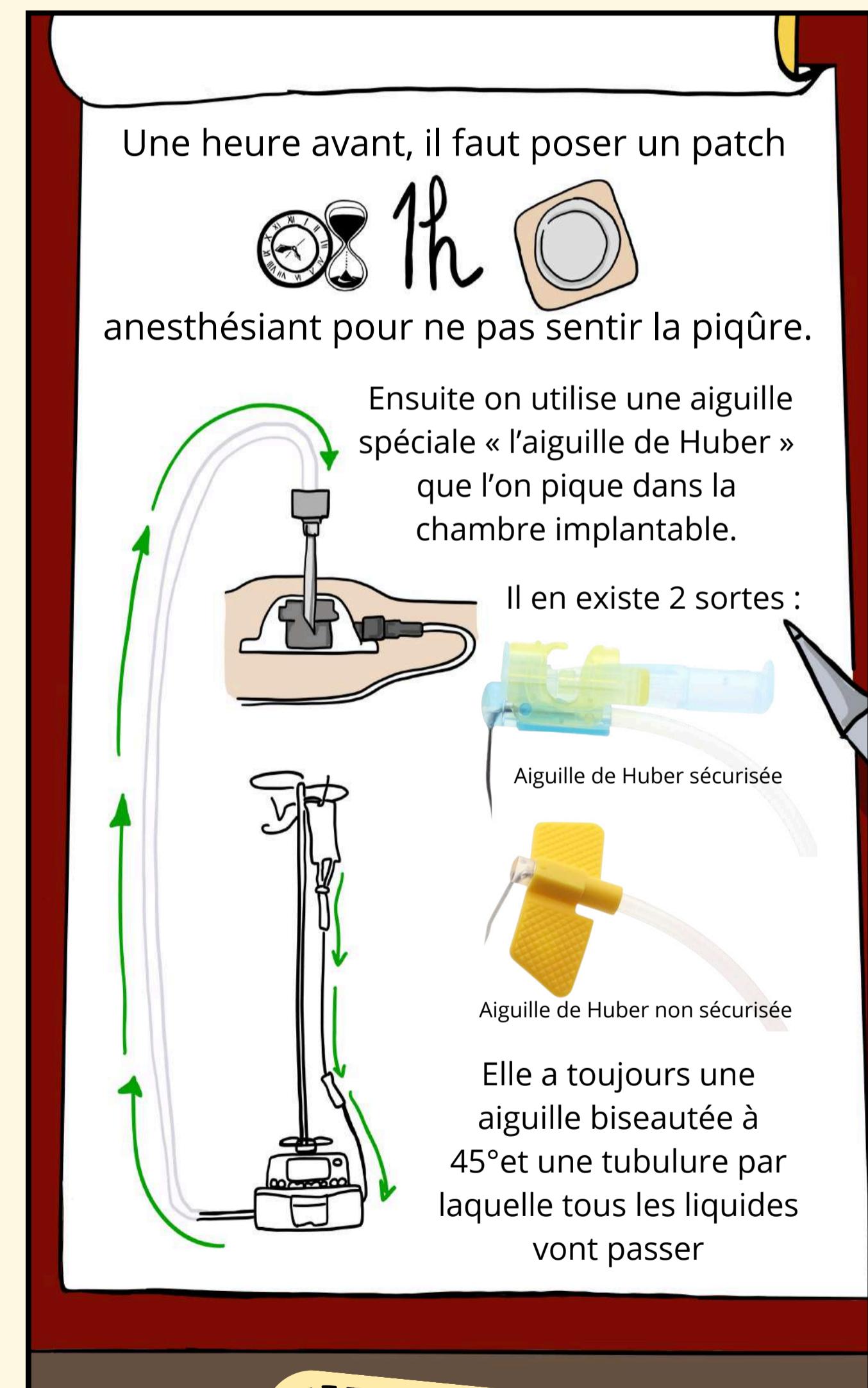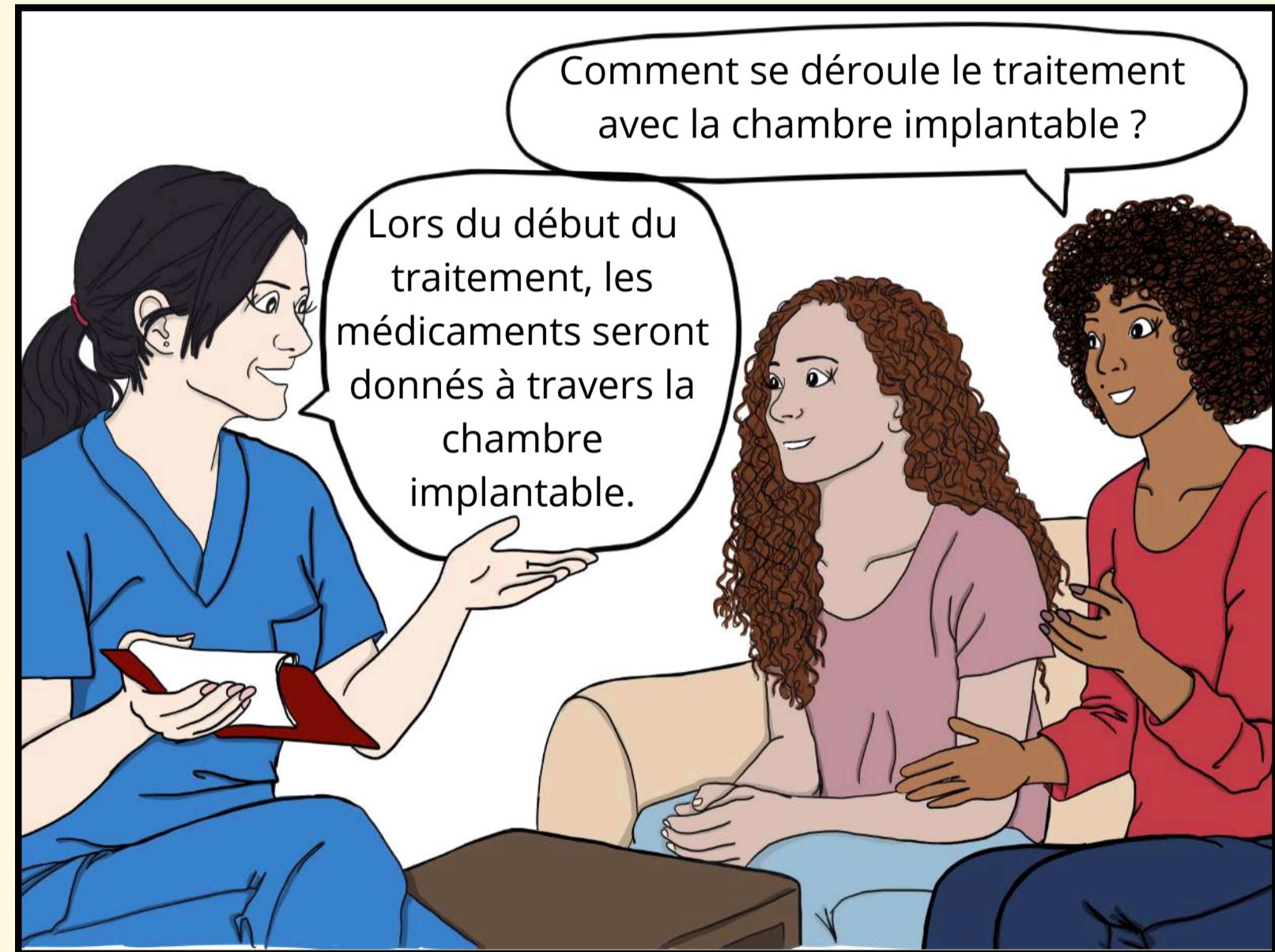


Retrouve ces fiches  
mémo à la fin de la BD

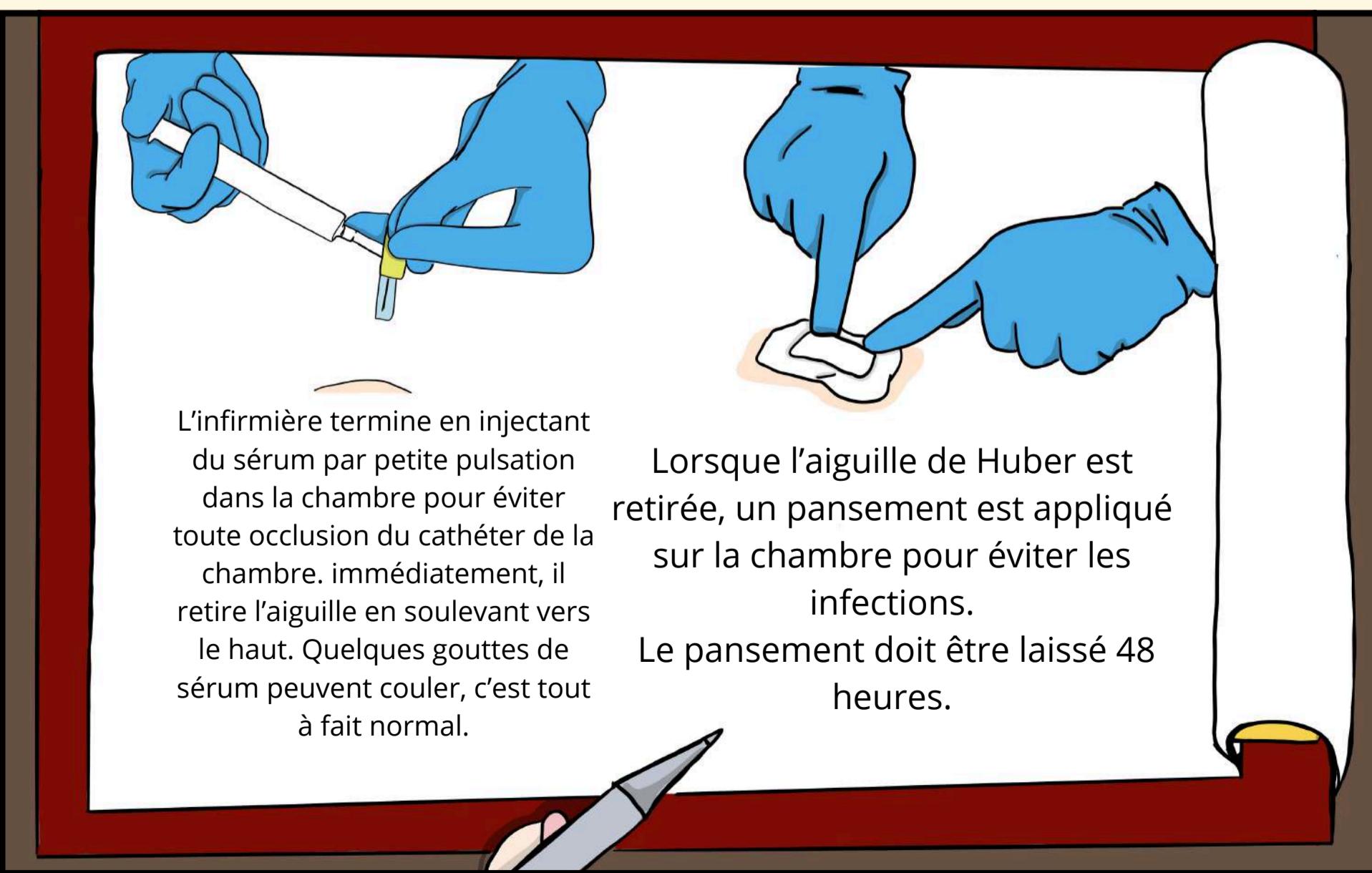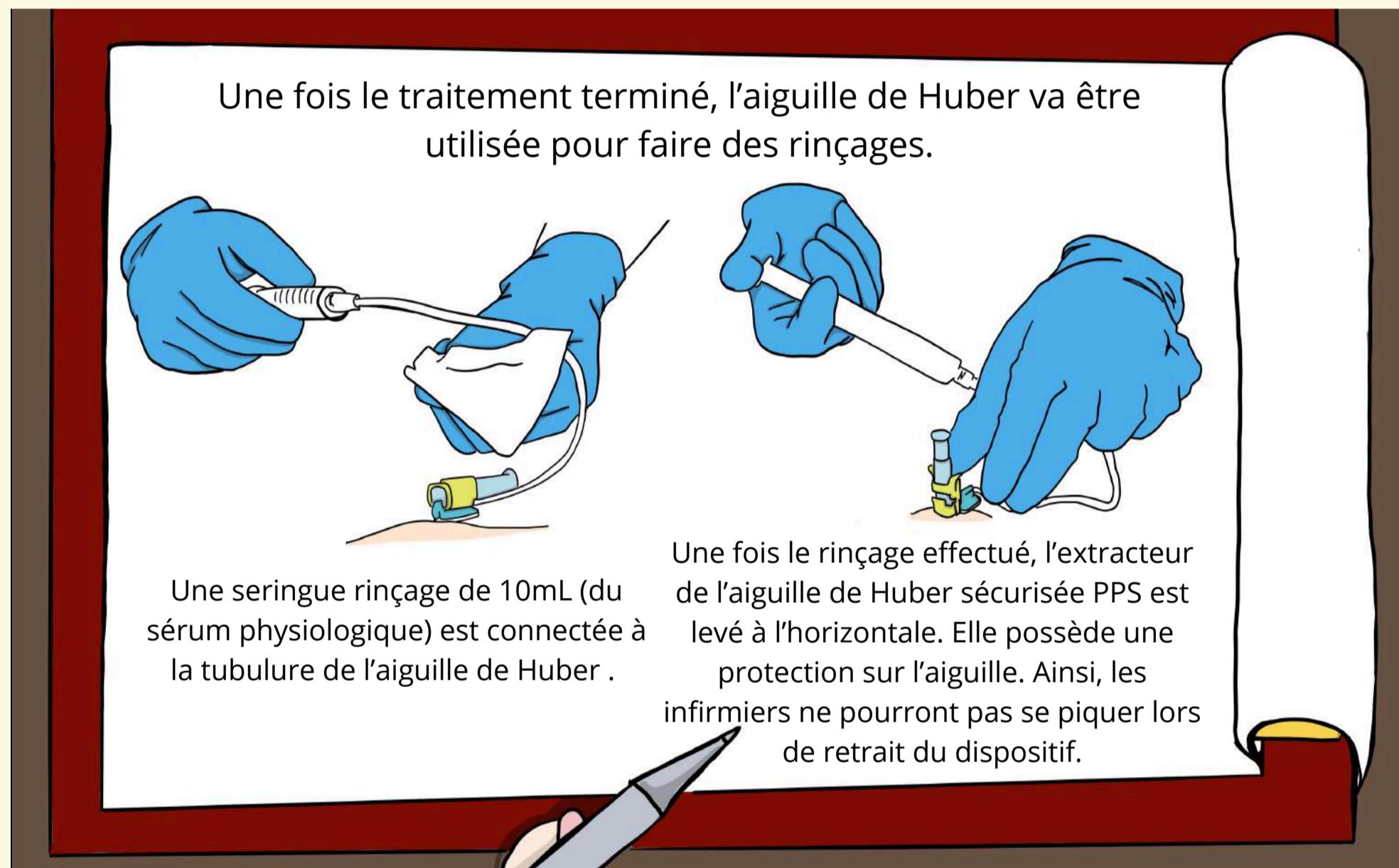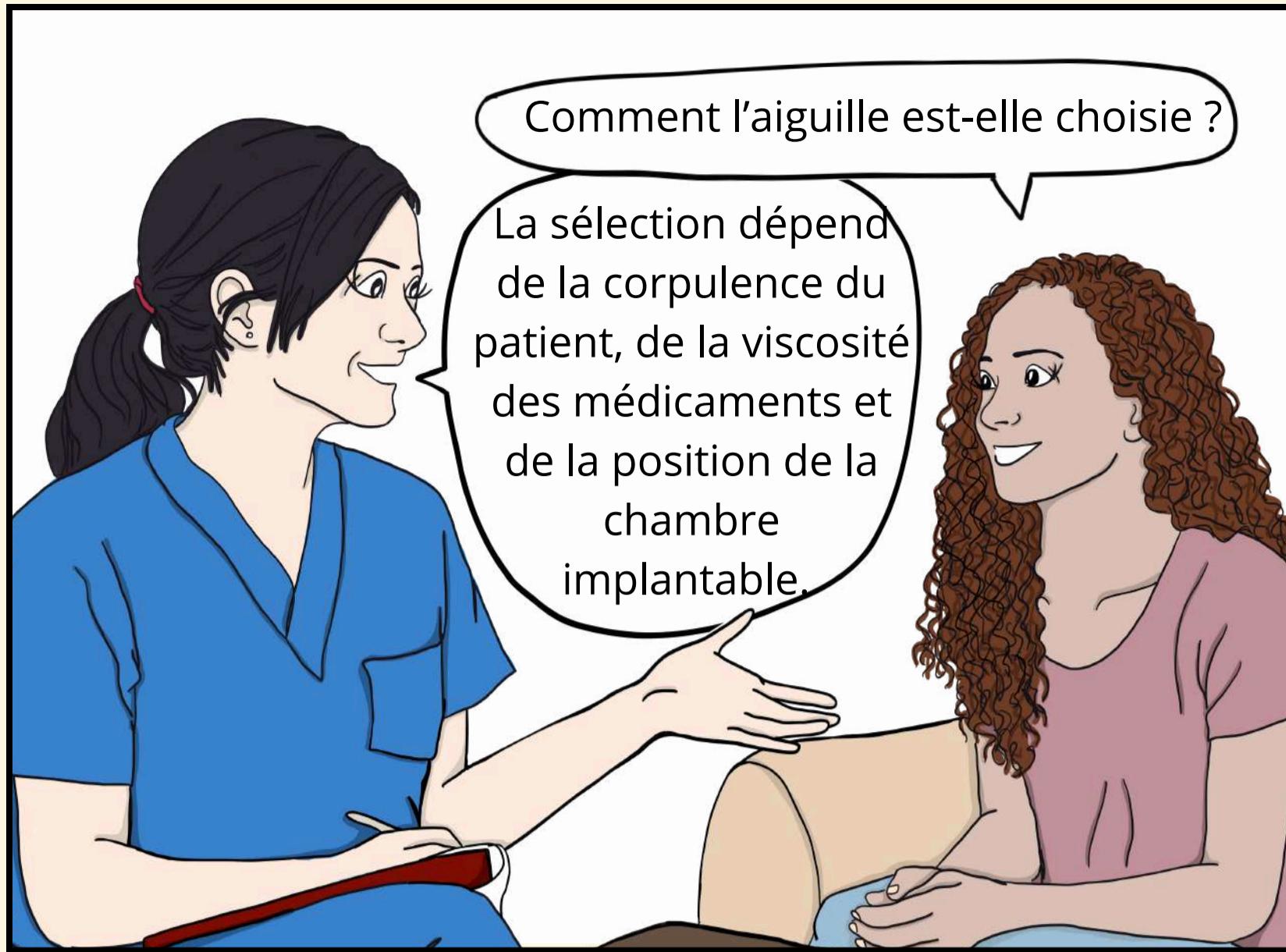

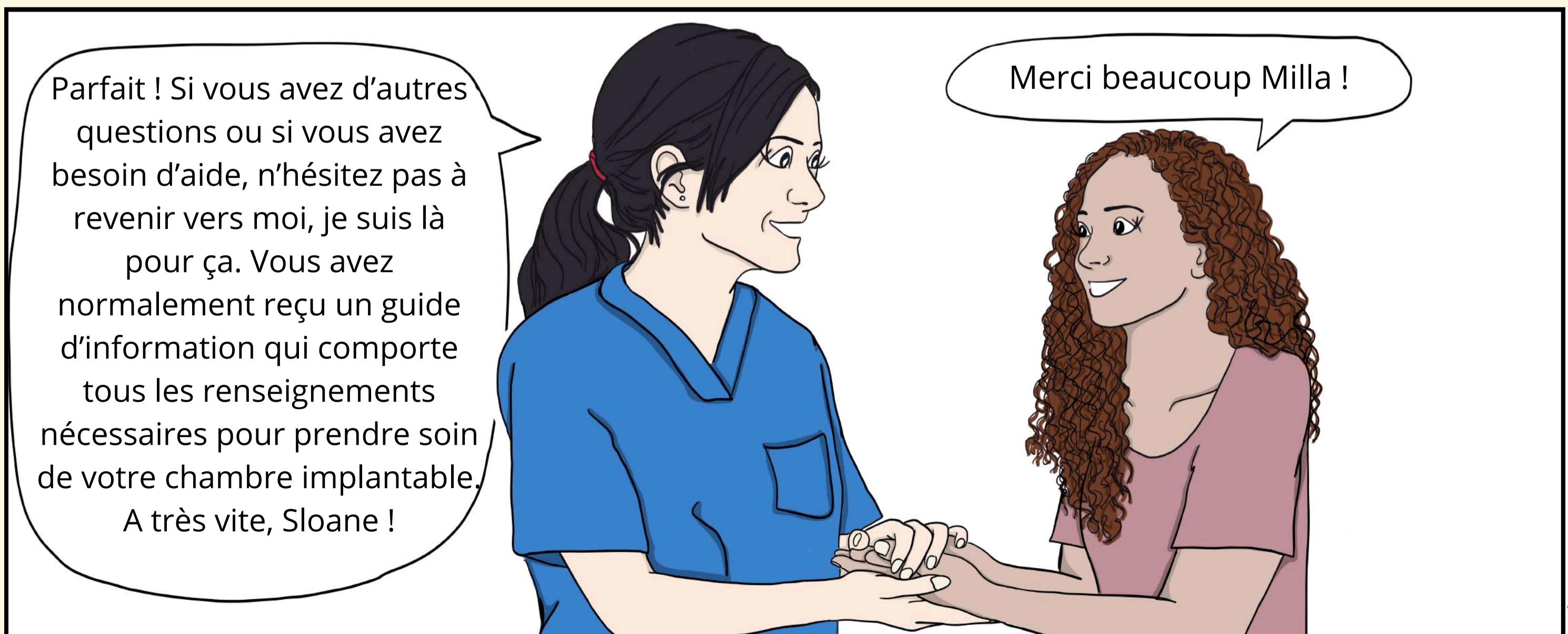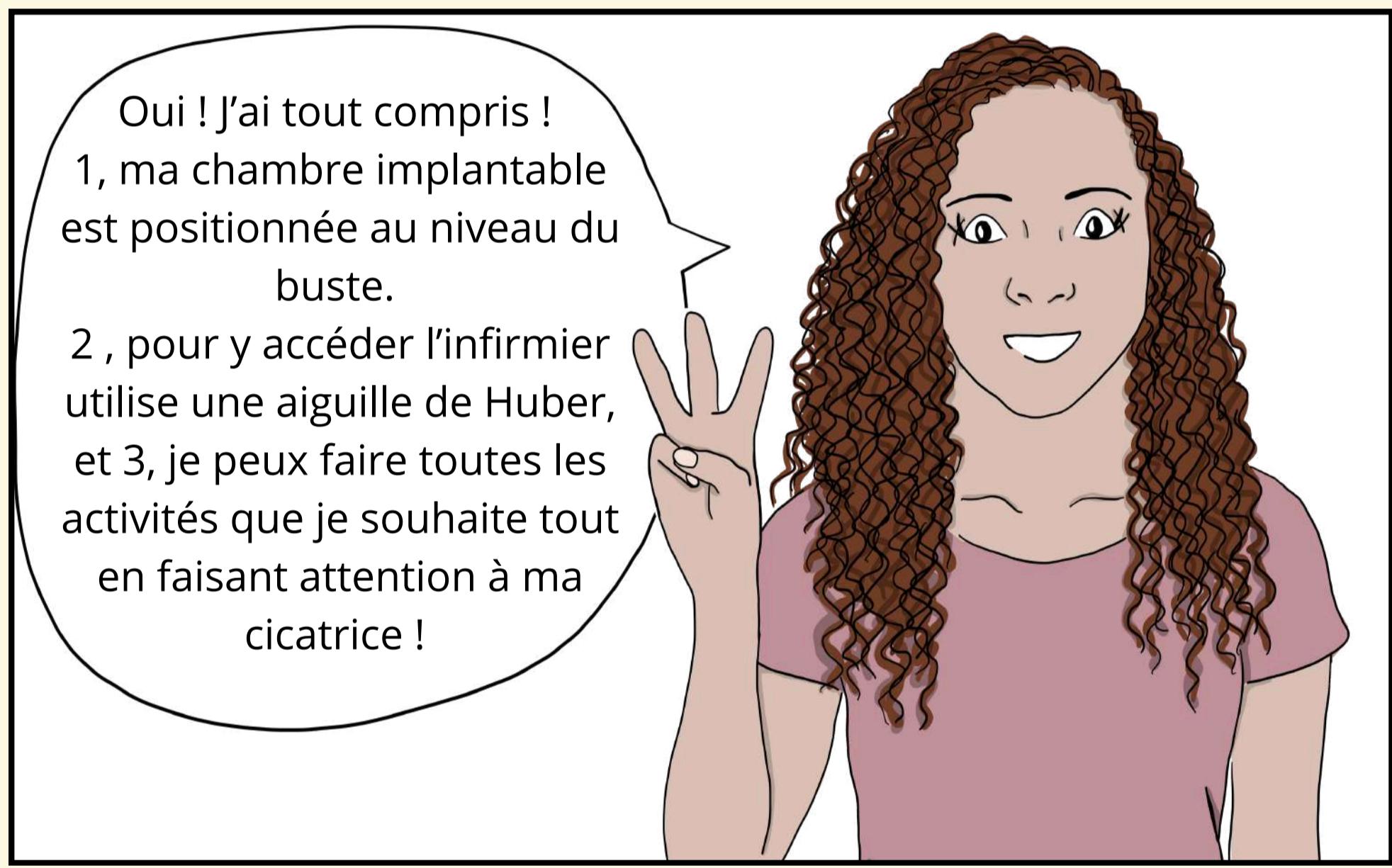


## Chapitre 3 : L'opération

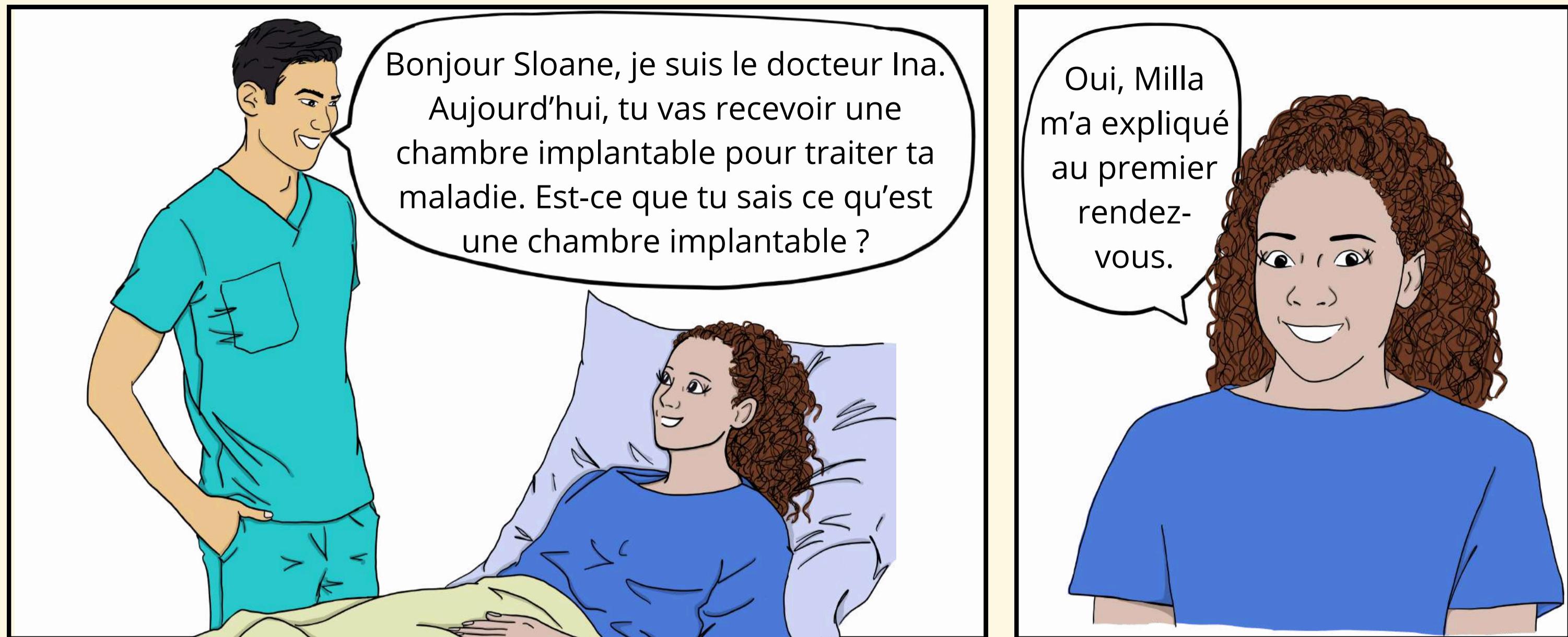

Mila m'a dit que j'allais avoir une cicatrice.


Effectivement, tu vas avoir une petite cicatrice. Je vais faire deux insertions, une pour le cathéter et l'autre pour la chambre implantable.

Les deux cicatrices seront discrètes.

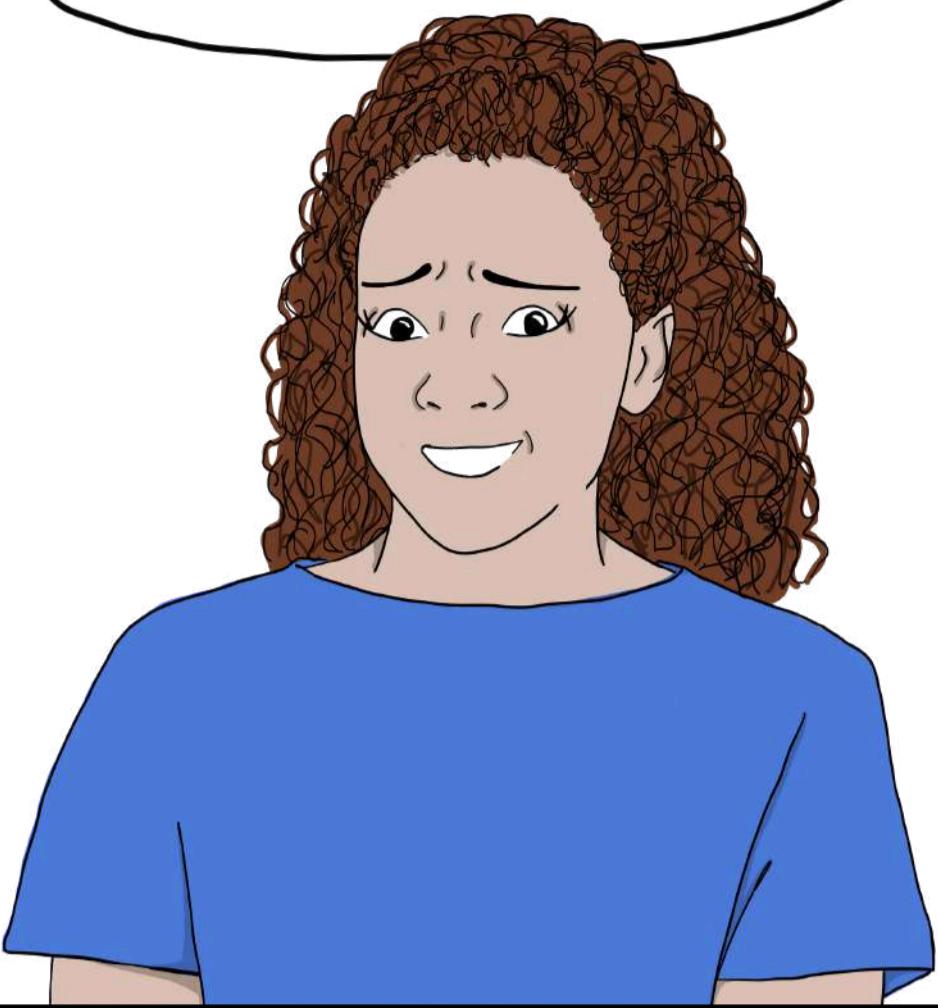


Je vais utiliser la colle pour ta cicatrice. Il ne faut pas y toucher pendant les 15 premiers jours. Après la colle va partir seule.

Est-ce qu'on va beaucoup voir ma chambre implantable ?

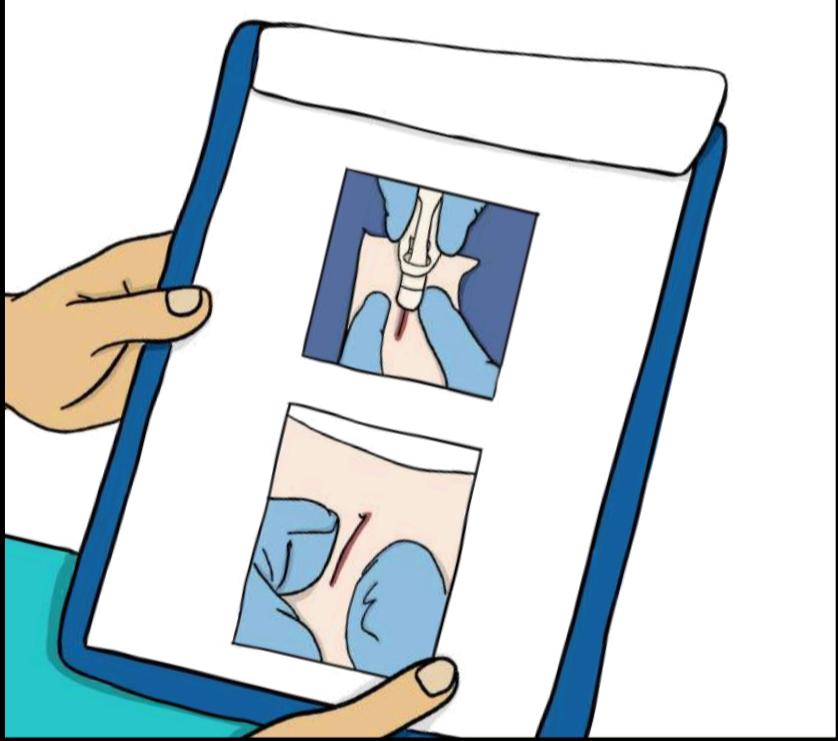


Non, regarde la chambre implantable sera à peine visible sous la peau. En plus, ce modèle a des bouts arrondis donc elle sera très discrète.

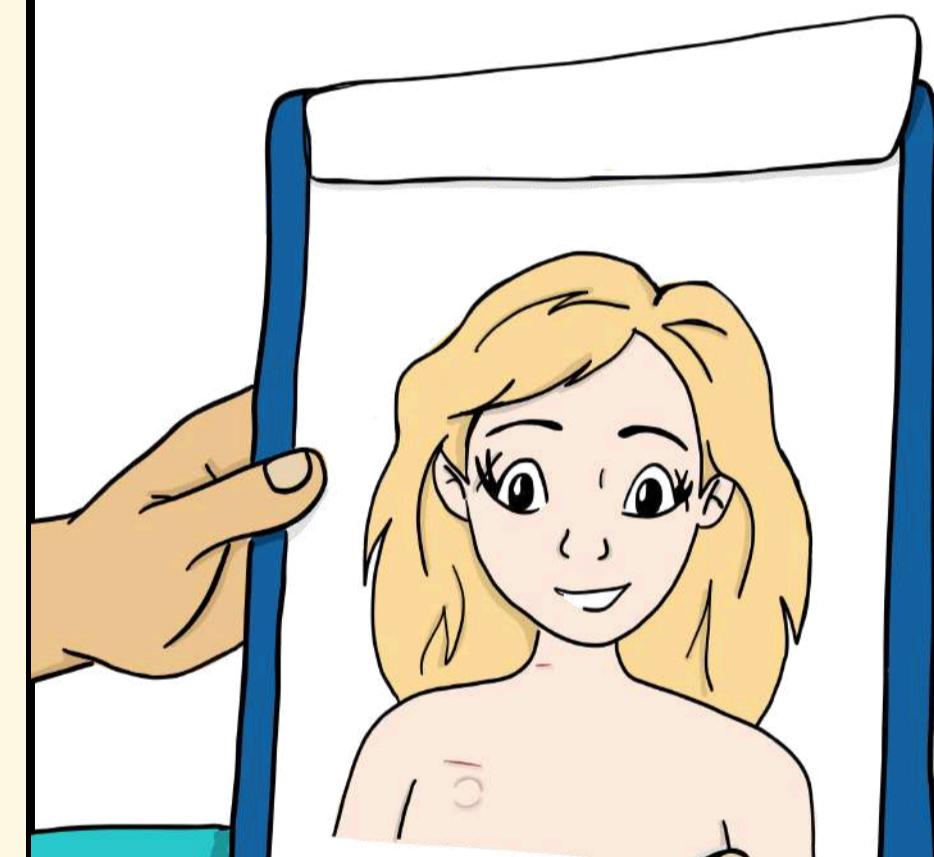

Elle ne dure pas très longtemps, environ une demi-heure.

Combien de temps dure l'opération ?


Est-ce que tu te sens prête ?

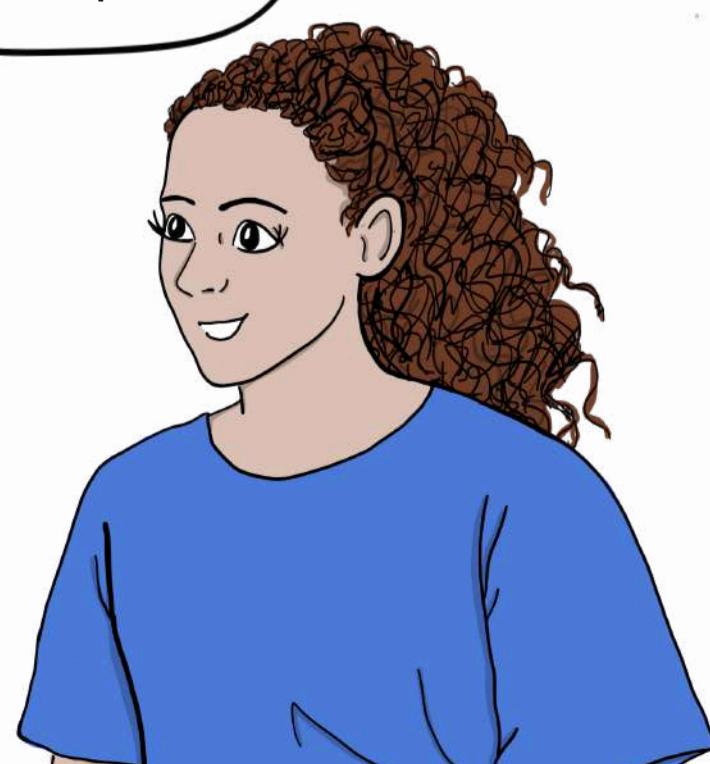

Oui, je suis prête !



## Chapitre 4 : La première chimiothérapie

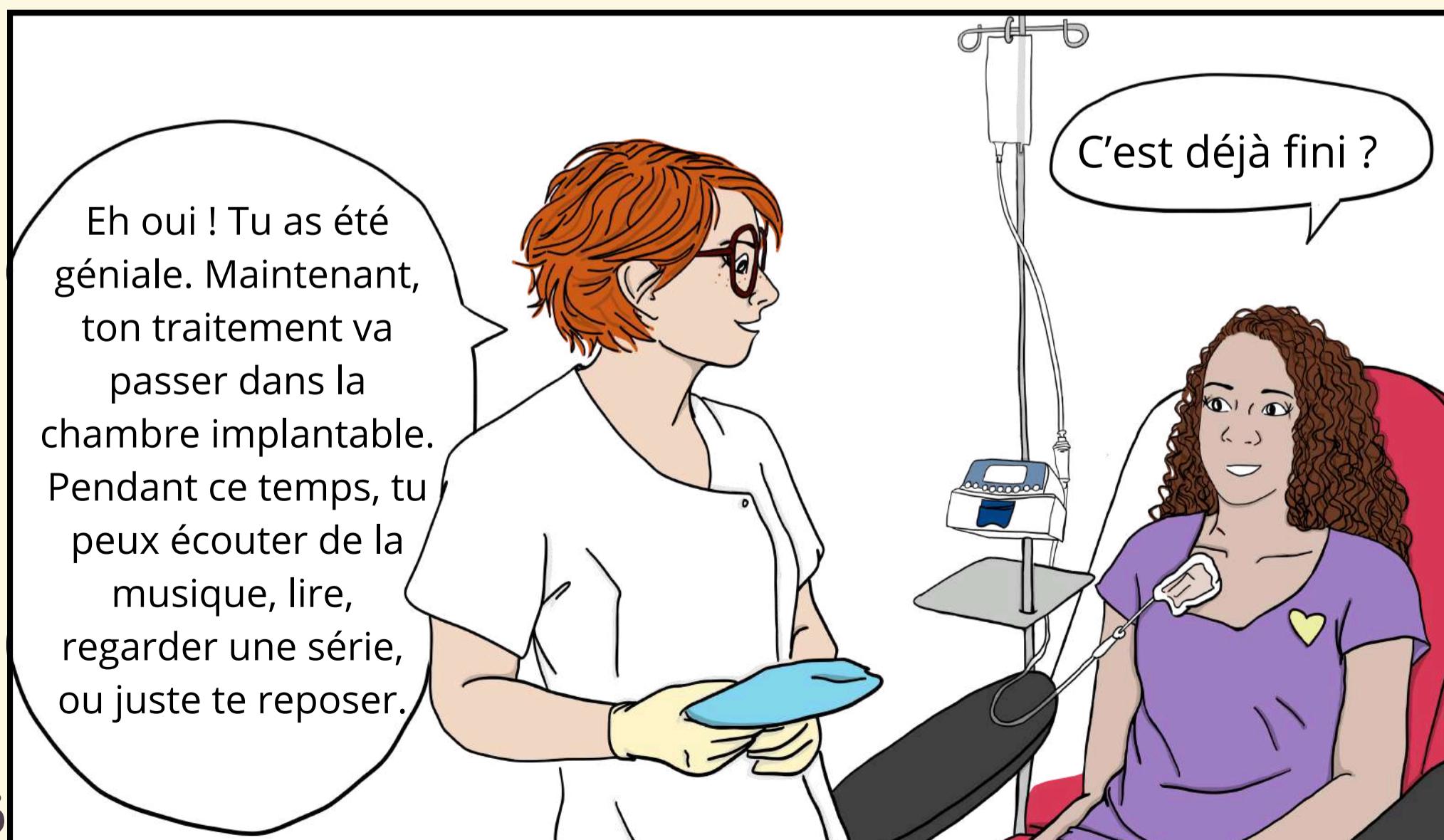

## Chapitre 5: Les vacances à la mer

Tu sais que tu peux me poser des questions.

Est-ce que ça te fait mal ?

Non, elle ne me fait absolument pas mal !

Ah bon ? Ça ne te dérange pas ?

Non, je ne la sens même pas.

Tu peux aller dans l'eau avec ça ?

Oui, je n'ai pas de pansement donc pas de problème !

J'étais inquiet pour toi. Je pensais que ça serait compliqué...

Pas du tout. La chambre implantable m'aide à aller mieux,  
mais elle ne change pas ma vie !




Fin

# Fiche mémo POST OPERATOIRE

Après la pause de la chambre  
implantable, soit j'aurai

un pansement

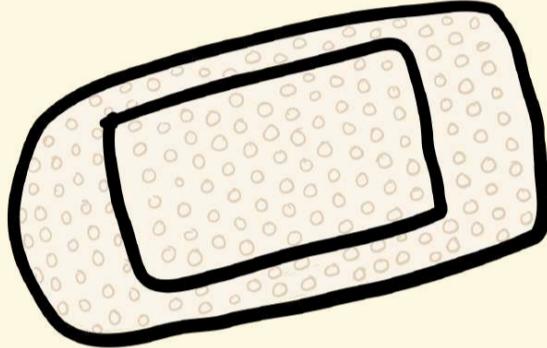


je le garde



Je ne mouille pas le pansement



une colle

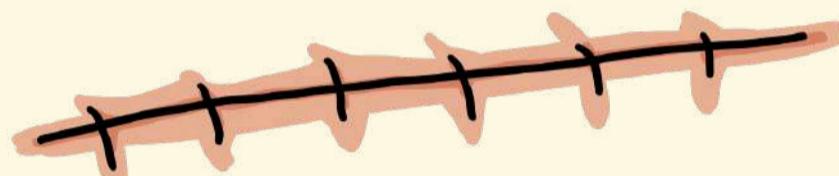

elle va partir au bout



pas de piscine    pas de bain



Pour bien cicatriser, j'évite de  
Porter des charges lourdes  
les mouvements répétitifs



# Fiche mémorisation

## Chimiothérapie



1h avant la chimiothérapie, je pose un patch anesthésiant sur la chambre implantable



Aiguille de Huber non sécurisée




Aiguille de Huber sécurisée

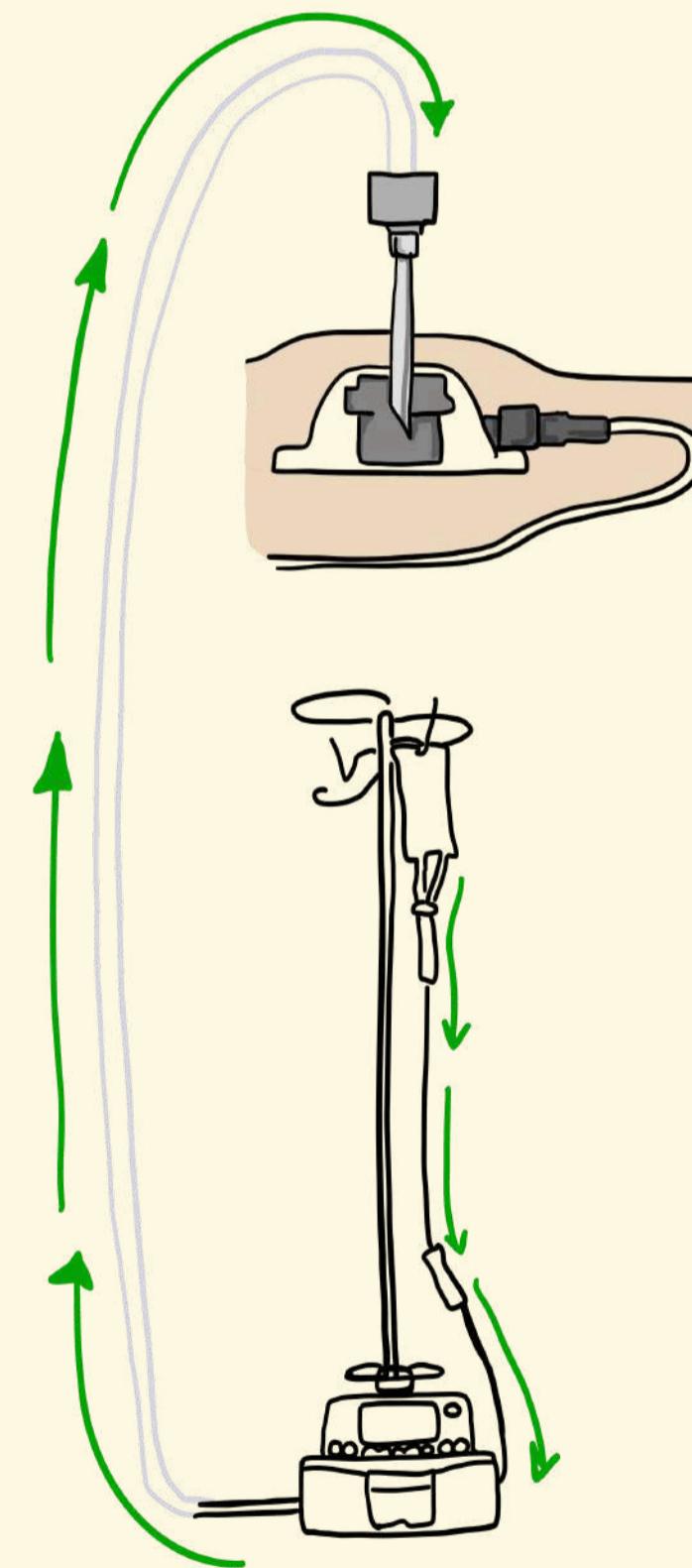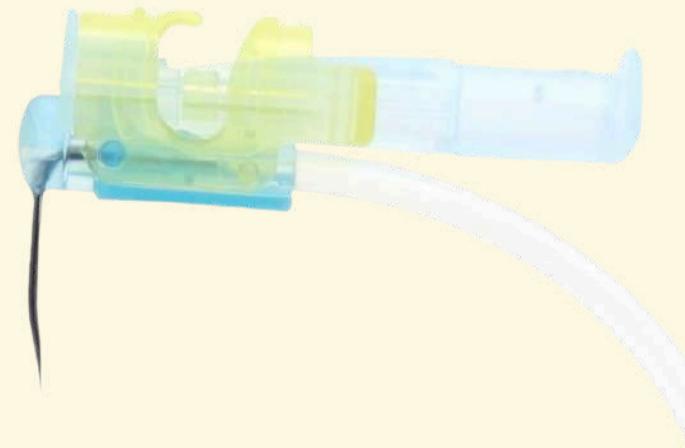


On vient planter l'aiguille de Huber dans la chambre implantable. C'est via la chambre que les traitements sont administrés.

1h après la chimiothérapie, je garde le pansement

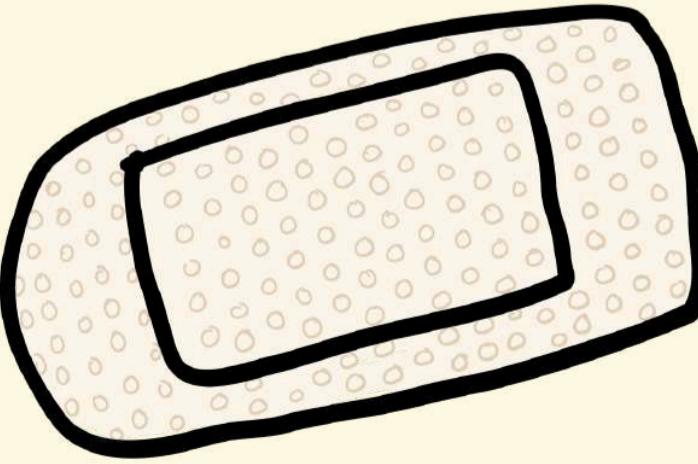


# Fiche mémo

## Protocole retrait aiguille de Huber

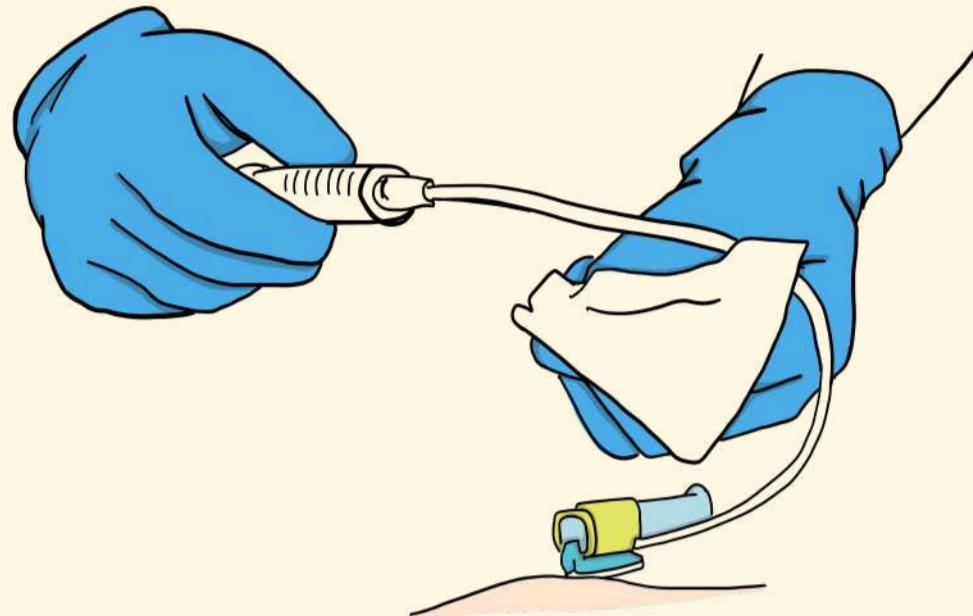


1

Une seringue rinçage de 10mL (de la saline ou de l'héparine) est connectée à la tubulure de l'aiguille de Huber .

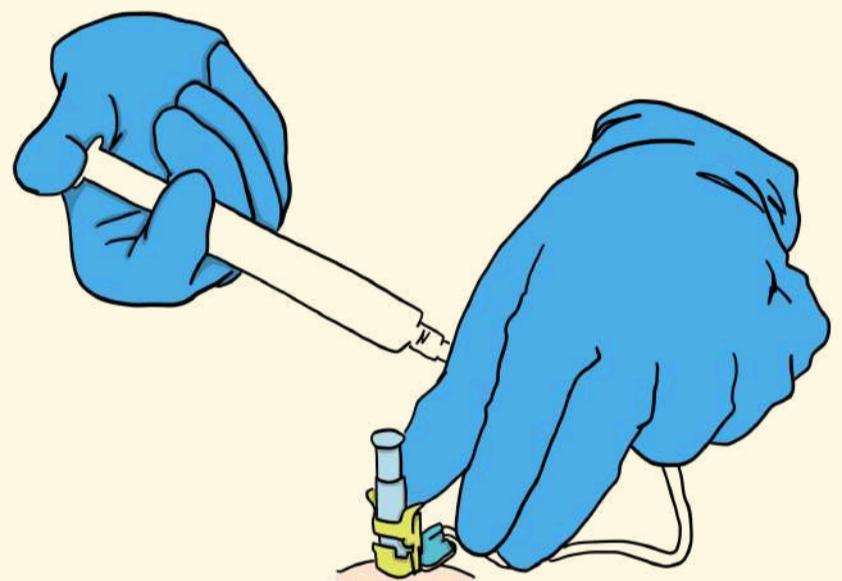


2

Une fois le rinçage effectué, l'extracteur de l'aiguille de Huber sécurisée PPS est levé à l'horizontale. Elle possède une protection sur l'aiguille. Ainsi, les infirmiers ne pourront pas se piquer lors du retrait du dispositif.

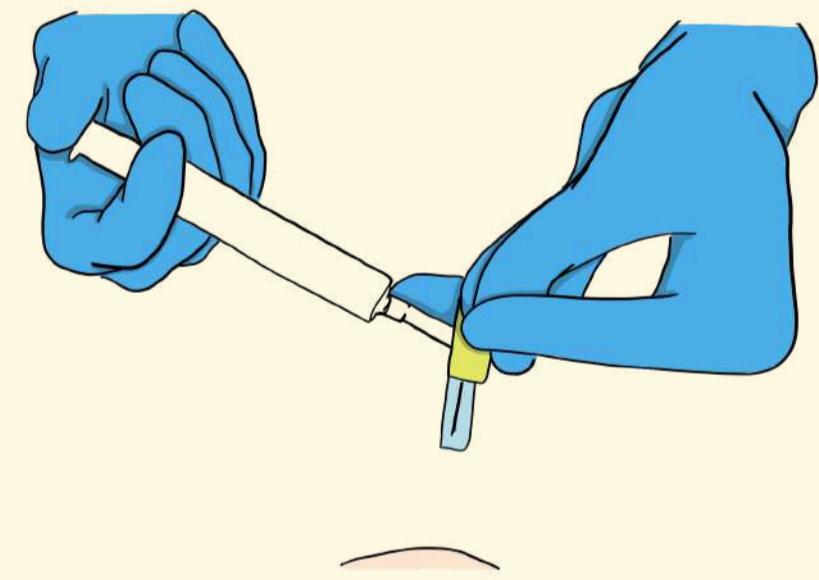

3

Puis l'aiguille est extraite de la chambre implantable par un mouvement fluide vers le haut.

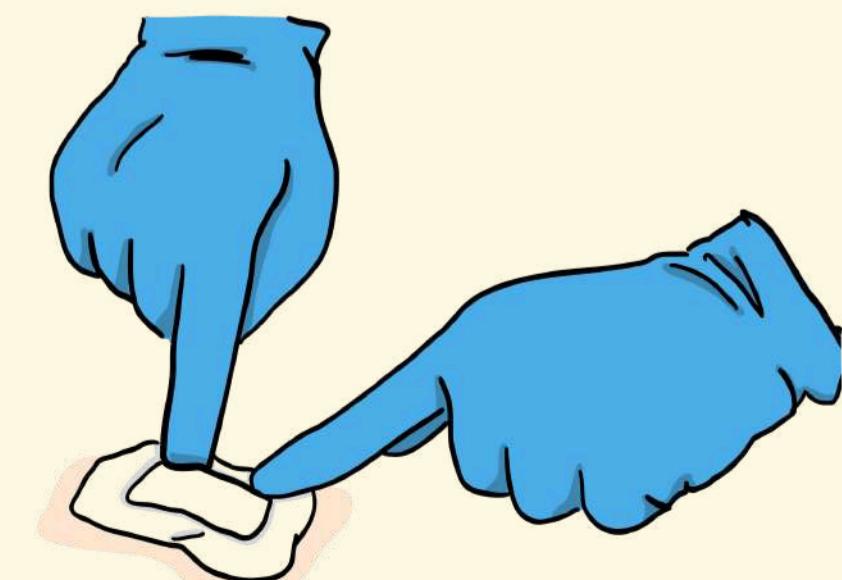

4

Lorsque l'aiguille de Huber est retirée, un pansement est appliquée sur la chambre pour éviter les infections. Le pansement doit être laissé 48 heures.