

1




Punção com a agulha

2




Introduzir o fio-guia

3

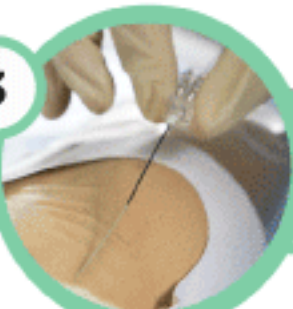


Retirar a agulha

4

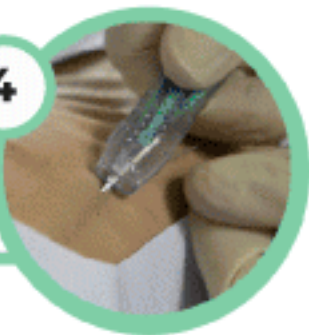


Realizar uma pequena incisão com o bisturi

5

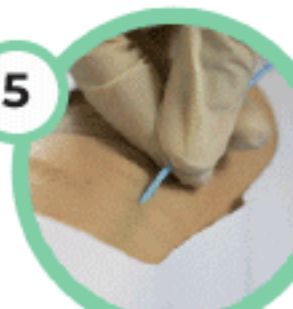

Introduzir o dilatador

6

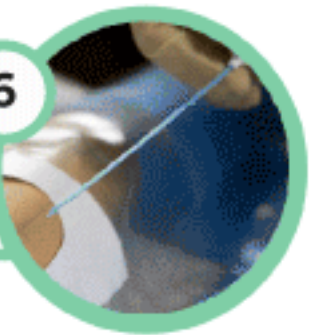


Retirar cuidadosamente o dilatador

7



Introduzir o cateter sobre o fio-guia

8

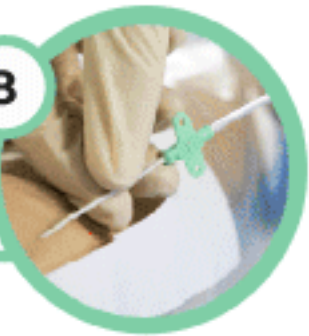

Avançar o cateter completamente

9



Retirar o fio-guia

10



Fixar o cateter com um sistema de fixação sem sutura



Value Life

# TÉCNICA DE INSERÇÃO: MÉTODO DE SELDINGER