

## Protocolo A Procedimento de limpeza: grupo mais diligente

### 1. Materiais necessários

- Compressa de gaze
- Água estéril
- Seringa enteral – 3 ou 6 ml
- Escova de limpeza de conector ENFit™ (escova de limpeza ENFit™ comercial e escova de dentes com cerdas firmes)

2. Realizar a higiene das mãos.

3. Abrir o conector ENFit™ e limpar a tampa com uma compressa de gaze estéril embebida em água.

4. Tapar o lúmen do conector ENFit™ com uma ponta de algodão para evitar que entrem resíduos na sonda durante a lavagem.

5. Enxaguar a ranhura do conector ENFit™ com 2-3 ml de água estéril num movimento pulsátil.

6. Remover a água restante da ranhura.

7. Remover o algodão do lúmen do conector.

8. Com uma escova mergulhada em água estéril, limpar as ranhuras e o fundo do conector com um movimento rotativo vigoroso durante 10-15 segundos.

9. Enxaguar a escova em água estéril.

10. Fechar o lúmen do conector com algodão.

11. Enxaguar a ranhura com 2-3 ml de água estéril no mesmo movimento pulsátil.

12. Remover o algodão do lúmen do conector.

13. Voltar a colocar a escova mergulhada em água estéril e limpar com o mesmo movimento rotativo vigoroso.

14. Se permanecerem resíduos visíveis, repetir a operação até que os resíduos desapareçam.

15. Remover o excesso de água da ranhura e da tampa.

16. Enxaguar a escova em água estéril.

17. Secar o conector ENFit™ tocando suavemente com um pano e deixar secar ao ar.