

Protocolo B | Procedimento de limpeza: grupo menos diligente

Materiais necessários:

- Compressa de gaze
- Água estéril
- Seringa enteral – 3 ou 6 ml
- Escova de limpeza de conector ENFit™ (escova de limpeza ENFit™ comercial e escova de dentes com cerdas firmes)

2. Realizar a higiene das mãos.

3. Abrir o conector ENFit™ e limpar a tampa com uma compressa de gaze estéril embebida em água.

4. Se utilizar uma escova de dentes com cerdas rígidas, certifique-se de que algumas cerdas centrais estão no lúmen do conector ENFit™ para o fechar.

5. Utilizando uma escova de dentes mergulhada em água estéril, limpar as ranhuras e o fundo do conector com um movimento de torção durante 10 segundos.

6. Mergulhar a escova em água estéril e limpar as ranhuras e o fundo do conector com um movimento rotativo durante 10 segundos.

7. Mergulhar a escova em água estéril e limpar as ranhuras e o fundo do conector com um movimento rotativo durante 10 segundos.

8. Remover o excesso de água da ranhura e da tampa.