

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFUSÃO E ACESSÓRIOS

1

Para o manuseamento do equipamento, conexões-chave e bioconectores, deve ser realizada a lavagem higiénica das mãos e o uso de luvas limpas.

2

Devem ser utilizadas o menor número possível de torneiras de três vias e as vias livres devem estar sempre protegidas pela respetiva

3

Utilizar apenas uma via das torneiras de três vias para colocar um bioconetor, que deve ser previamente protegido com uma tampa impregnada com solução alcoólica ou a área deve ser desinfetada com solução alcoólica durante 30 segundos.

4

Substituir o equipamento, extensões e conetores a cada 96 - 72 horas e sempre que as conexões estiverem visivelmente sujas ou em caso de desconexão accidental.

5

Identificar nos sistemas de soro quando o soro é trocado.

6

Sempre que um cateter é trocado, todos os sistemas de infusão, extensões e outros acessórios devem também ser trocados.

7

A perfusão de fluidos contendo lípidos deve ser terminada num prazo de 24h.

8

Escolher e designar uma via exclusiva para Nutrição Parentérica.

9

Trocar o equipamento de nutrição parentérica e outras emulsões lipídicas a cada 12-24 horas.