

Cómo montar una CPAP de Boussignac con nebulizador

1

Elige la talla correcta de
Mascarilla (S/M/L)

2

Conecta el TUBO ENT del
nebulizador a la mascarilla

3

Llena el NEBULIZADOR
con la droga apropiada

4

Conecte el tubo de extensión al
NEBULIZADOR y a la FUENTE
DE OXÍGENO. (Flujo: 6 L/min.)

5

Conecta el NEBULIZADOR al puerto
inferior del TUBO ENT.

6

Conecta un FILTRO HEPA o FILTRO
HME/HEPA a la mascarilla facial

7

Adjuntar el conector
al FILTRO HEPA

8

Conecta la CPAP de BOUSSIGNAC
al conector

