

COLOCACIÓN DEL CATÉTER **MIDLINE** EN NEONATOS


Elección del punto de la vena a puncionar y medición del catéter a intartar.

La enfermera de apoyo en el proceso de colocación **inmovilizará la zona de punción.**




1

Realizar la punción de la vena con **catéter corto 24G.**

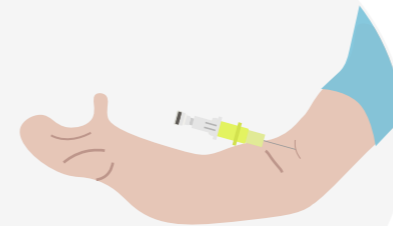

2

Retirar la aguja y **dejar colocada la cánula.**

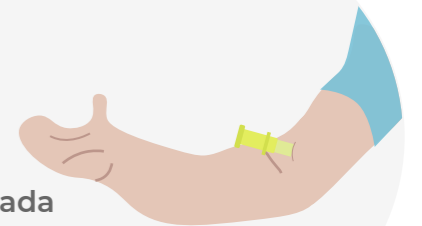


3

Introducir el extremo de la guía a través de la cánula.

▼ **Por el extremo en "J"**, utilizando el dispositivo introductor. Conectarlo a la cánula canalizada en la vena

▼ **Por el extremo recto** sin necesidad de dispositivo.

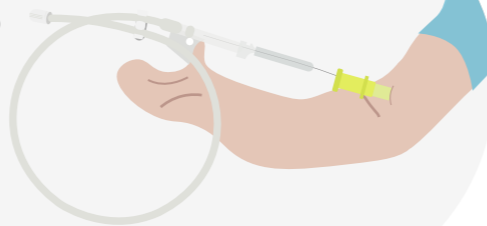


4

La **guía** debe avanzar **sin resistencias.**

La guía tiene que quedar fuera de la cánula, de la piel y del catéter.

Retirar la cánula asegurando la posición de la guía para que no salga

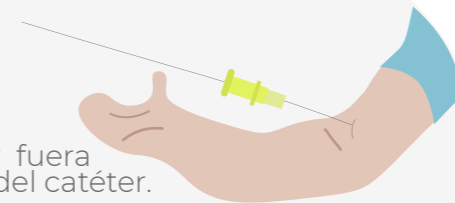

5


Introducir el catéter con ayuda de la guía metálica y avanzar.

Se debe relalizar un ligero movimiento de giro y empujarlo hacia dentro a través de la piel.




6

Avanzar el catéter hasta la posición deseada y **retirar la guía**

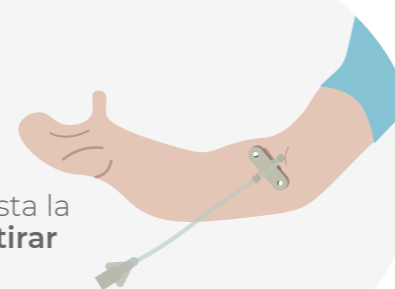

7

Verificar la **permeabilidad del catéter** y **colocar válvula antirreflujo.**

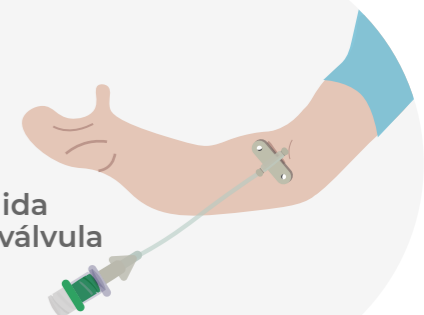

8