

COLOCACIÓN DE SecurAcath

Selecciona el tamaño apropiado de SecurAcath para que coincida con el diámetro del catéter. Coloca el catéter añadiendo 3cm más a la medida calculada a insertar para poder poner el dispositivo SecurAcath.




Dobla la base de SecurAcath hasta que las solapas se unen.

Levanta el catéter para visualizar el lugar de inserción

Aplica una ligera tracción sobre la piel para ayudar a dilatar el punto de inserción


**Utiliza la punta de un dilata-
dor** para ello si fuese neces-
ario.

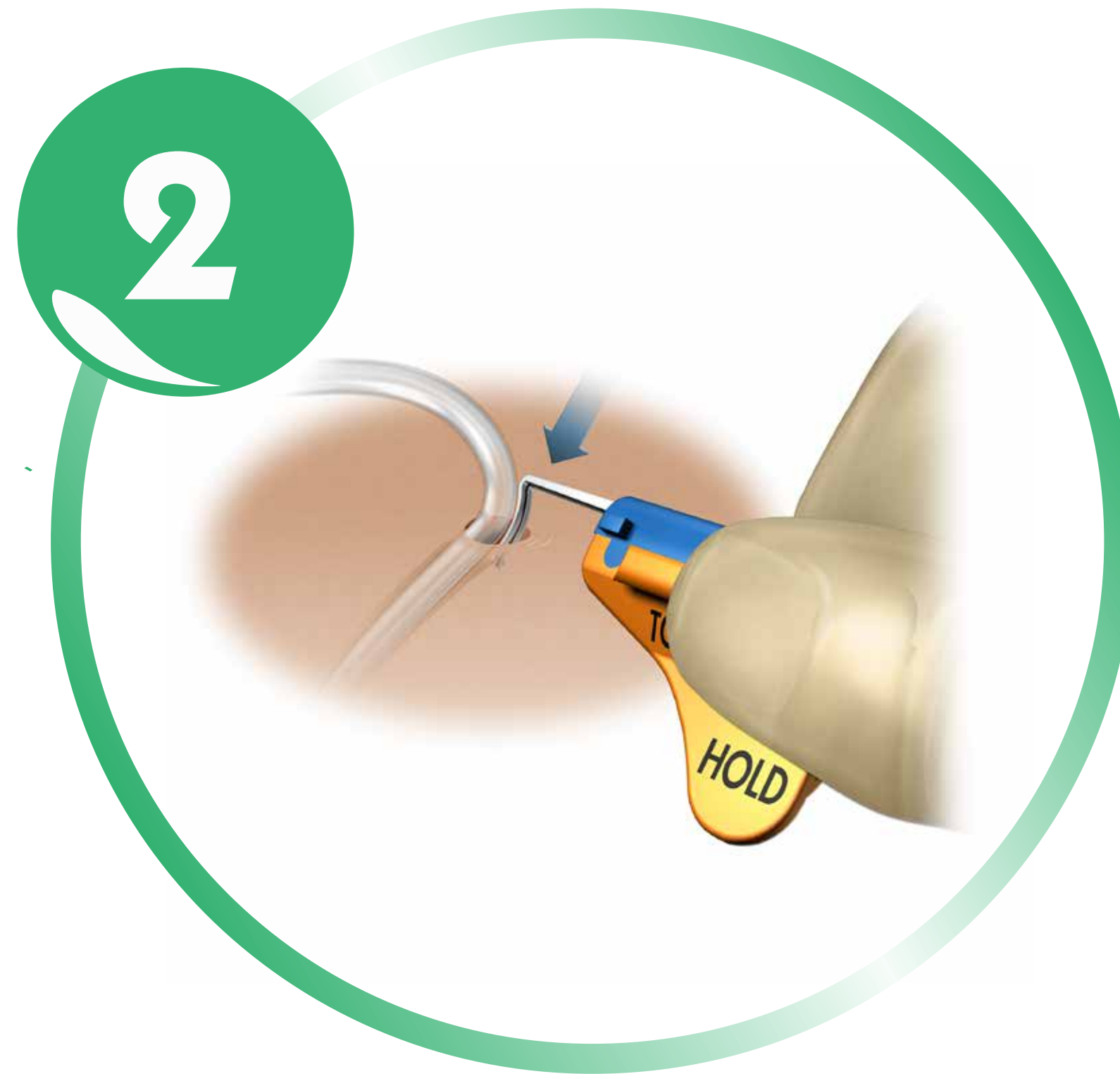

Sostén la base plegada **per-
pendicularmente** al catéter.
Levanta el catéter con cui-
dado sin desplazarlo.

Con el ancla a **90°** respecto
al catéter, **inserta los pies**
del ancla debajo del catéter
en el punto de inserción.

Introduce el dispositivo en el
punto de inserción **siguien-
do el recorrido del catéter**
hasta que el segmento
curvo no sea visible

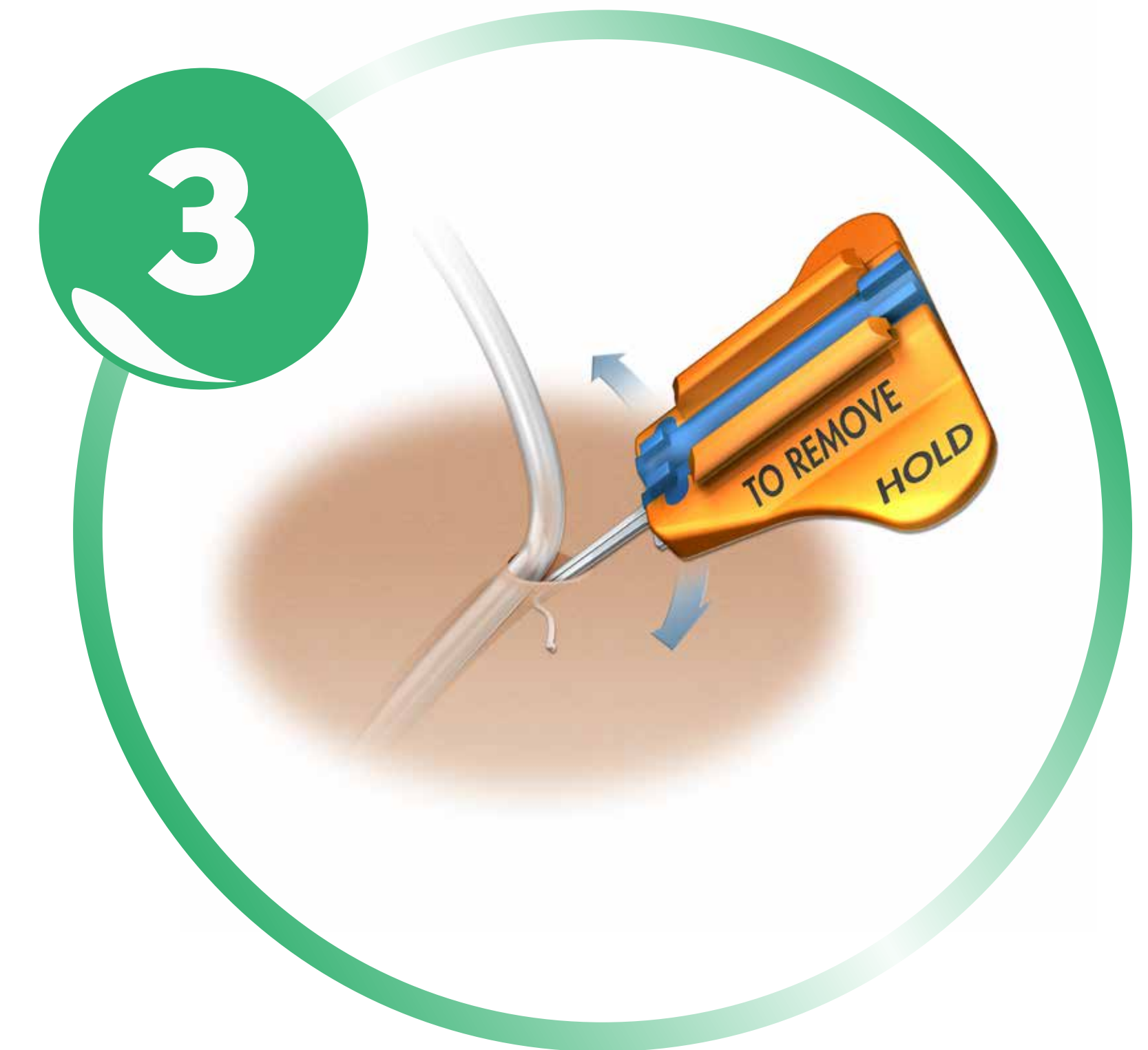

Alinea el dispositivo con la
orientación deseada.

Avanza los pies del ancla
unos mm **hasta el tejido**
subcutáneo.

Suelta la base para permitir
que **se abra** hasta que esté
plana.

Retrae suavemente la base
para asegurar que haya
tejido subcutáneo entre el
ancla de SecurAcath y la
dermis.



Limpia con una gasa estéril
el catéter y el punto de
inserción.


Asegúrate de que el catéter
y la base estén **limpios** y
secos.

Inserta el catéter en la
ranura de la misma base.



Coloca la tapa de la base
presionando firmemente
en el centro y luego **en los**
bordes mientras sostienes la
base.

Comprueba que la tapa
esté **perfectamente coloca-
da.** No debe ser visible
ningún hueco entre la tapa
y la base.

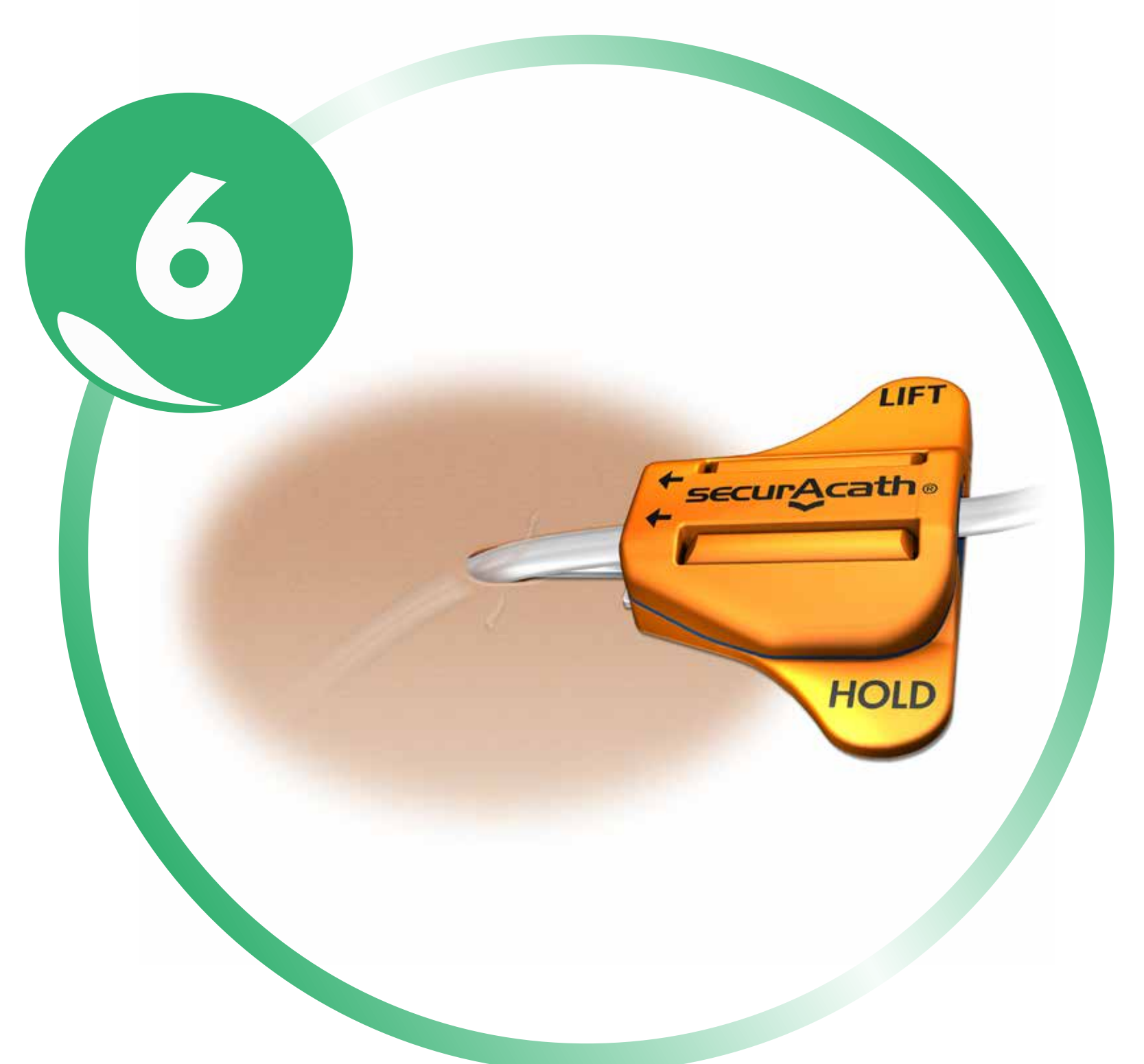

**EL CATÉTER AHORA
ESTÁ FIJADO**

SecurAcath **se coloca en po-
sición plana sobre la piel**, el
catéter siendo fijado de
forma segura para la dura-
ción de la terapia.

**SIGUE SEGÚN EL
PROTOCOLO DEL SERVICIO**

**Aplica un apósito transpa-
rente.** Asegúrate de que el
pabellón del catéter esté
debajo del apósito y el pro-
longador fuera.

