



SIMULACIÓN TEÓRICA CON CÁNULA DE EXTRACCIÓN EN LA CARGA DE JERINGA




Value Life

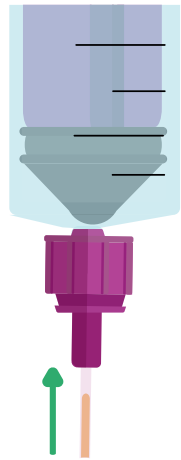


- 1** Conectar la jeringa y cargar con la fórmula

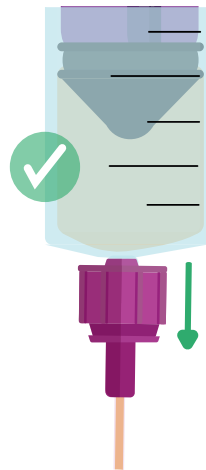

- 2** Desconectar la cánula una vez se haya hecho el reajuste eliminado las burbujas o aire

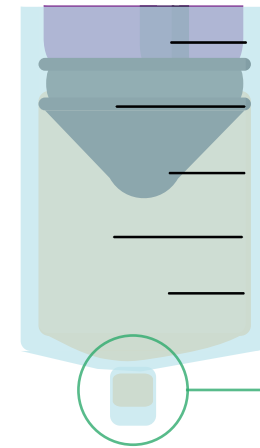


- 3** Observar el líquido que queda en la punta

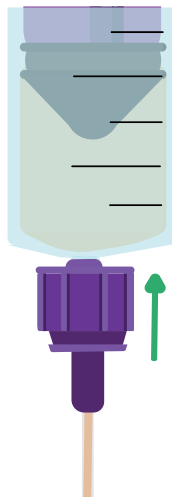

- 4** Conectar la jeringa a la sonda de administración



- 5** Realizar la administración

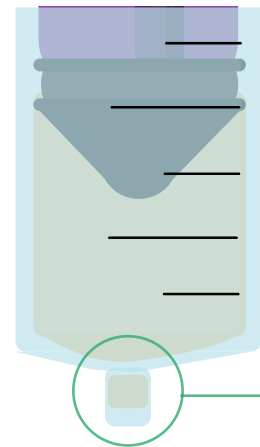

- 6** Observar que el volumen que queda en la punta jeringa es exactamente el mismo que el que se había observado antes de la administración

MISMA CANTIDAD DE LÍQUIDO