

# MEDIDAS PARA EL CORRECTO CUIDADO DEL MIDLINE

1



UTILIZAR UNA TÉCNICA ANTT (A SEPTIC NON TOUCH TECHNIQUE)

REALIZAR CORRECTAMENTE LA LIMPIEZA EXTRALUMINAL

- Cura del punto y zona de inserción
- Limpieza de la parte externa del catéter: cambio de conectores sin aguja, cambio equipos de infusión, alargaderas
- Correcta retirada y colocación del apósito (evitar fricciones, forma cómoda para el paciente) respetar tiempos de secado



2


3



MANTENER FIJO EL DISPOSITIVO (USO DE FIJACIÓN SIN SUTURAS)  
Cambio si precisa cuando se realiza la cura


LAVADO INTRALUMINAL ADECUADO DEL CATÉTER

Mantener permeable y con reflujo el catéter: lavado con suero antes y después de cada infusión y entre fármacos; técnica pulsada, push-stop y presión positiva

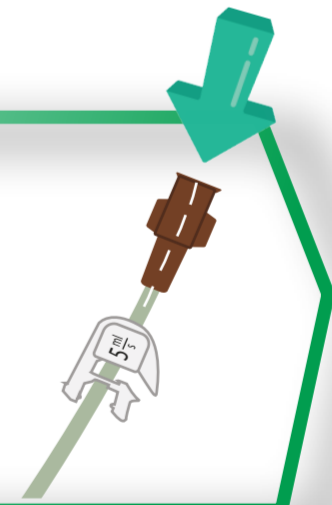

4

5

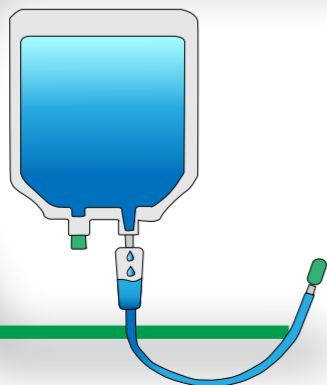

PRECAUCIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS  
pH y osmolaridad del tratamiento periférico, no administrar fármacos incompatibles.

No OLVIDAR QUE ES UNA VÍA PERIFÉRICA