




RETIRADA DE SECURACATH


MÉTODO DE CORTE

EL CATÉTER SE TIENE QUE RETIRAR PREVIAMENTE

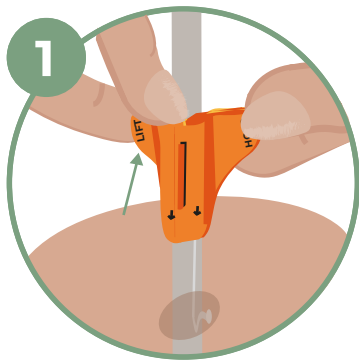


Sujetar la pestaña HOLD con el pulgar y el dedo índice para estabilizar el dispositivo y los pies de sujeción bajo la piel.

Haga **palanca hacia arriba en el borde de la lengüeta LIFT con la punta del dedo índice de la otra mano y el pulgar** colocado en el centro para liberar la tapa de la base.

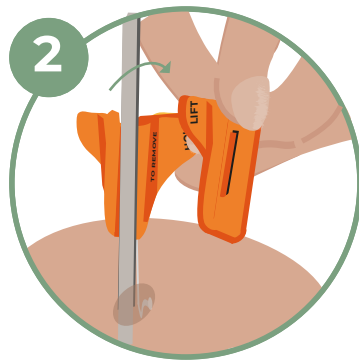

Quitar la parte superior de la base.

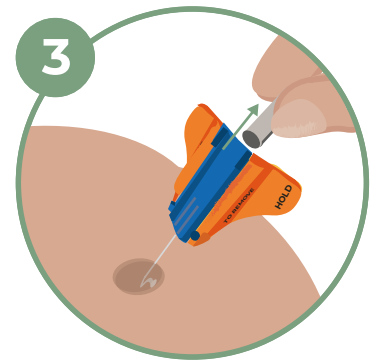

Retirar el catéter - no utilizar una fuerza excesiva.

Mantener la presión en el sitio de punción para lograr la hemostasia.

Si el lugar de inserción está costroso o duro, **aplicar una gasa estéril con solución salina** durante unos minutos. El tejido se ablandará y la extracción será más fácil.




Utilizar unas tijeras de punta roma para **cortar toda la base** por la mitad a lo largo de la ranura azul.



Aplicar una presión firme en el lugar de inserción con una mano.

Las anclas flexibles de sujeción tienen forma de "L" y se extienden **5 mm** a cada lado del sitio de inserción.

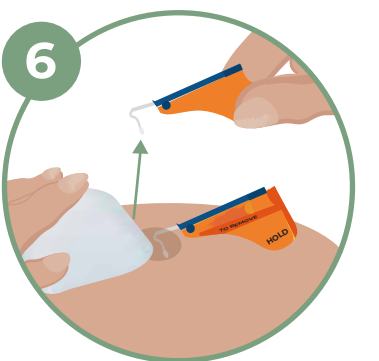

Girar el borde azul y utilizar un **movimiento rápido y seguro** hacia arriba para retirar cada ancla por separado siguiendo la forma su forma.