



TEST DE L'ONDE CARRÉE (FLUSH TEST)

La forme d'onde de la pression artérielle est-elle fiable?

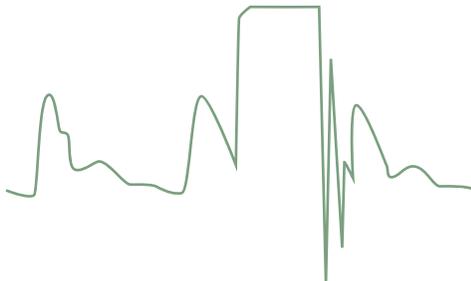

Optimalement amorti

1,5 - 2 oscillations avant de retourner la trace.
Les valeurs obtenues sont exactes.

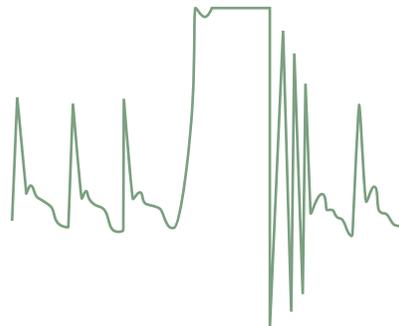

Sous-amortie

>2 oscillations. Pression artérielle systolique surestimée; pression artérielle diastolique peut être sous-estimée.



Sur-amortie

<1,5 oscillations. Sous-estimation de la tension artérielle systolique; tension artérielle diastolique peut être affectée.