

Protocol B, procédure de nettoyage: groupe le moins diligent⁵:

1. Matériel nécessaire :

- Tampon de gaze
- Eau stérile
- Seringue entérale - 3 ou 6 ml
- Brosse de nettoyage du connecteur ENFit™ (brosse de nettoyage ENFit™ commerciale et brosse à dents avec des poils fermes).

2. Procéder à l'hygiène des mains.

3. Ouvrez le connecteur ENFit™ et nettoyez le bouchon à l'aide d'une compresse de gaze stérile imbibée d'eau.

4. Si vous utilisez une brosse à dents à poils rigides, veillez à ce que quelques poils centraux se trouvent dans la lumière du connecteur ENFit™ pour le fermer.

5. À l'aide d'une brosse à dents trempée dans de l'eau stérile, nettoyez les rainures et le fond du connecteur en effectuant un mouvement de rotation pendant 10 secondes.

6. Trempez la brosse dans de l'eau stérile et nettoyez les rainures et le fond du connecteur en effectuant un mouvement rotatif pendant 10 secondes.

7. Trempez la brosse dans de l'eau stérile et nettoyez les rainures et le fond du connecteur par un mouvement rotatif pendant 10 secondes.

8. Retirer l'excédent d'eau de la rainure et du bouchon.